



amoena

CATALOGUE DES PRODUITS 2021


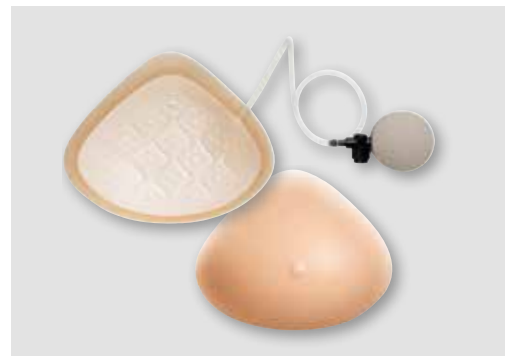


VOTRE PARTENAIRE POUR LES SOINS DU SEIN

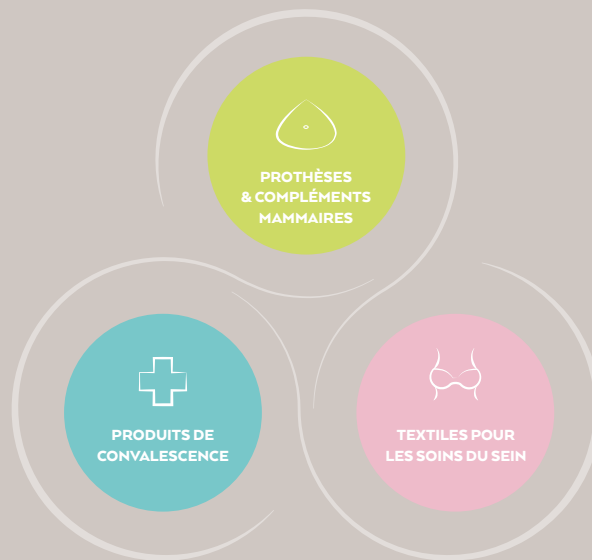

CANCER DU SEIN


FAITS ET CHIFFRES

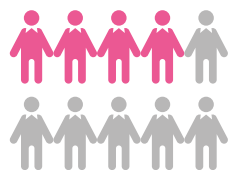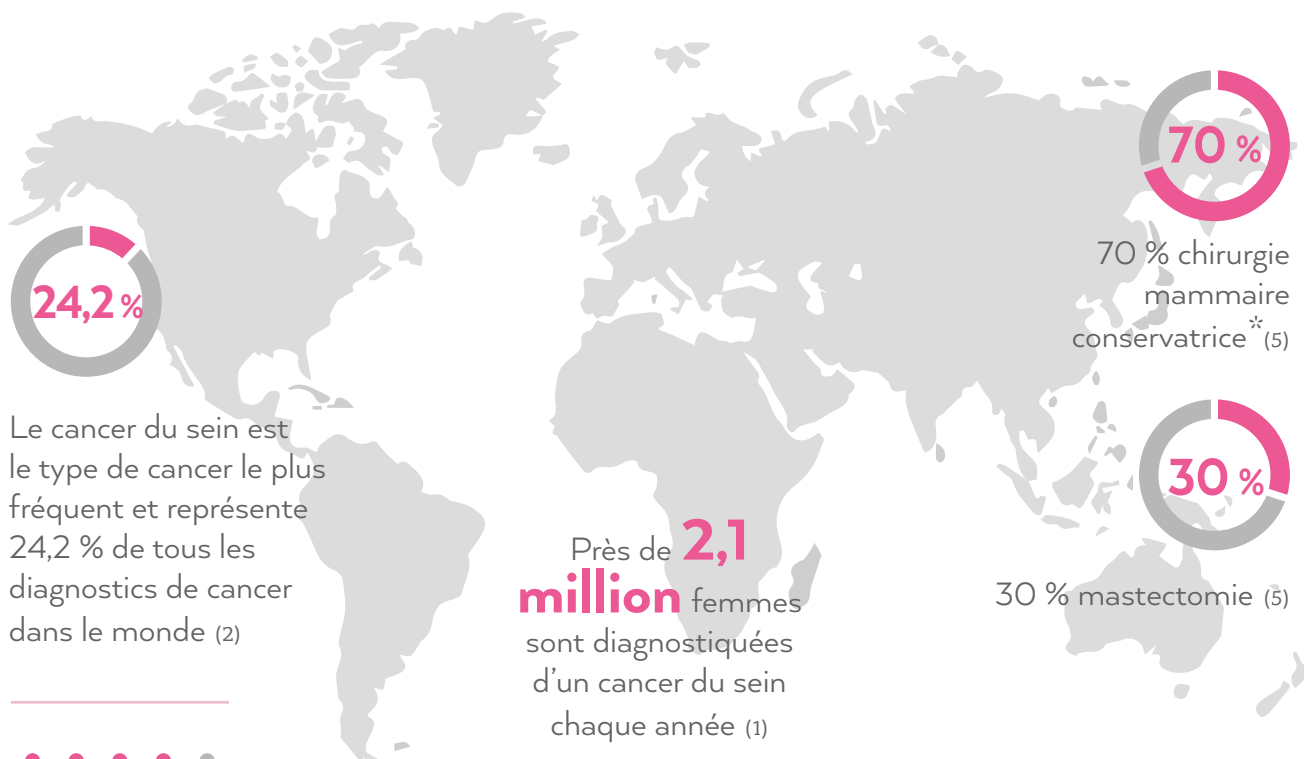

10 à 40 %
ne sont pas
satisfaites du
résultat de leur CCS* (6)

Environ **40 à 60 %**
des femmes qui
subissent une CCS*
subissent une
nouvelle intervention
chirurgicale (7)

*Chirurgie conservatrice du sein

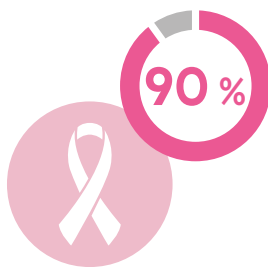

Dans le monde,
le taux global de
survie relative à 5 ans
pour le cancer du sein
est de 90 % (3)

Le cancer du sein est le plus
fréquent chez les femmes
de plus de **50 ans.**

Selon le National Cancer
Institute (NCI), les médecins
diagnostiquent le plus souvent
le cancer du sein chez les femmes
âgées de 55 à 64 ans (4)

Environ
20 à 30 %
développent un
lymphœdème dans les
bras ou le thorax après une
chirurgie mammaire (8)

Sources :

- (1) <https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf>
- (2) <https://gco.iarc.fr/today/>
- (3) <https://www.webmd.com/breast-cancer/breast-cancer-survival-rates>
- (4) <https://www.medicalnewstoday.com/articles/325654#risks-at-different-ages>
- (5) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4504664/>
- (6) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29605247/>
- (7) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18259820/>
- (8) <https://www.oatext.com/lymphedema-following-breast-cancer-the-importance-of-surgical-methods-and-obesity.php#gsc.tab=0>

TABLE DES MATIÈRES

À PROPOS D'AMOENA	4
Votre partenaire dans les soins du sein	5
Le parcours de soins de la patiente	6
Solutions Amoena	8
Basic Advanced Premium	11
AMOCURA – SOINS POSTOPÉRATOIRES	12
Solutions pendant la convalescence	14
CuraSupport	17
CuraSupport Compression	17
CuraSupport Comfort	21
Accessoires CuraSupport	24
CuraScar	26
CuraScar Vêtements	26
CuraScar Silicones	29
PROTHÈSES ET COMPLÉMENTS MAMMAIRES	32
Prothèses mammaires	35
Prothèses mammaires après mastectomie	35
Gamme de prothèses mammaires	36
Amoena Adapt et Adapt Air	38
Amoena Contact	42
Amoena Energy	45
Amoena Natura	47
Amoena Essential	51
Autres prothèses mammaires et entretien des prothèses	53
Compléments mammaires	55
Gamme de compléments mammaires	56
Amoena Balance Adapt Air	58
Amoena Balance Contact et Balance Natura	59
Amoena Balance Essential	60
Prothèses et compléments mammaires — Accessoires	61
TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN	64
Caractéristiques particulières	69
Lingerie	70
Soutien-gorges en dentelle	70
Soutien-gorges classiques	78
Soutien-gorges sans coutures	82
Soutien-gorges à haut effet couvrant	92
Active	94
Wellness	96
Accessoires	98
Maillots	99
Caractéristiques particulières	100
Style	101
Classic	103
Active	105
Accessoires	106
Styles bientôt discontinués	107
Foulards bientôt discontinués	117
RESSOURCES	119
4 trucs pour augmenter vos ventes	120
Assistance en-ligne Amoena	122
Aperçu des fonctions — Prothèses mammaires	123
Aperçu des fonctions — Compléments mammaires	124
Tableau des tailles	125
Index AmoCura — Soins Postopératoires	130
Index de lingerie	132
Index des maillots	136
Index des styles bientôt discontinués	137



VOTRE PARTENAIRE POUR LES SOINS DU SEIN

Chez Amoena, nous sommes tous là pour aider les femmes opérées du sein à vivre en toute confiance. Nous testons davantage, nous investissons davantage dans la R&D, nous écoutons plus attentivement et nous collaborons avec les professionnels de santé et les leaders d'opinion les plus admirés. Être là signifie ne jamais faire de compromis sur les détails, car chaque détail favorise la confiance.

LA SOLUTION AMOENA

Chez Amoena, nous savons que nous ne devons négliger aucun détail, même le plus petit, lorsqu'il s'agit d'aider les femmes opérées du sein à vivre en toute confiance. Les brevets sur les matériaux et les méthodes de fabrication sont la preuve de nos progrès.


Nous ne cesserons cependant jamais de nous efforcer de répondre à tous les besoins avec des produits de la plus haute qualité. Plus de quarante-cinq ans après l'introduction de la première prothèse mammaire en silicone, nous accompagnons aujourd'hui les femmes tout au long de leur parcours, depuis le moment où elles sont diagnostiquées jusqu'à ce qu'elles puissent à nouveau vivre pleinement leur vie.

Nous l'appelons « **La Solution Amoena** ».



LE PARCOURS DE SOINS DE LA PATIENTE

Chez Amoena, nous savons exactement ce dont les femmes ont besoin tout au long de leur parcours avec le cancer du sein et comment faciliter la vie quotidienne des points de vente spécialisés. C'est pourquoi nous proposons désormais des produits pour chaque étape du parcours d'une femme.

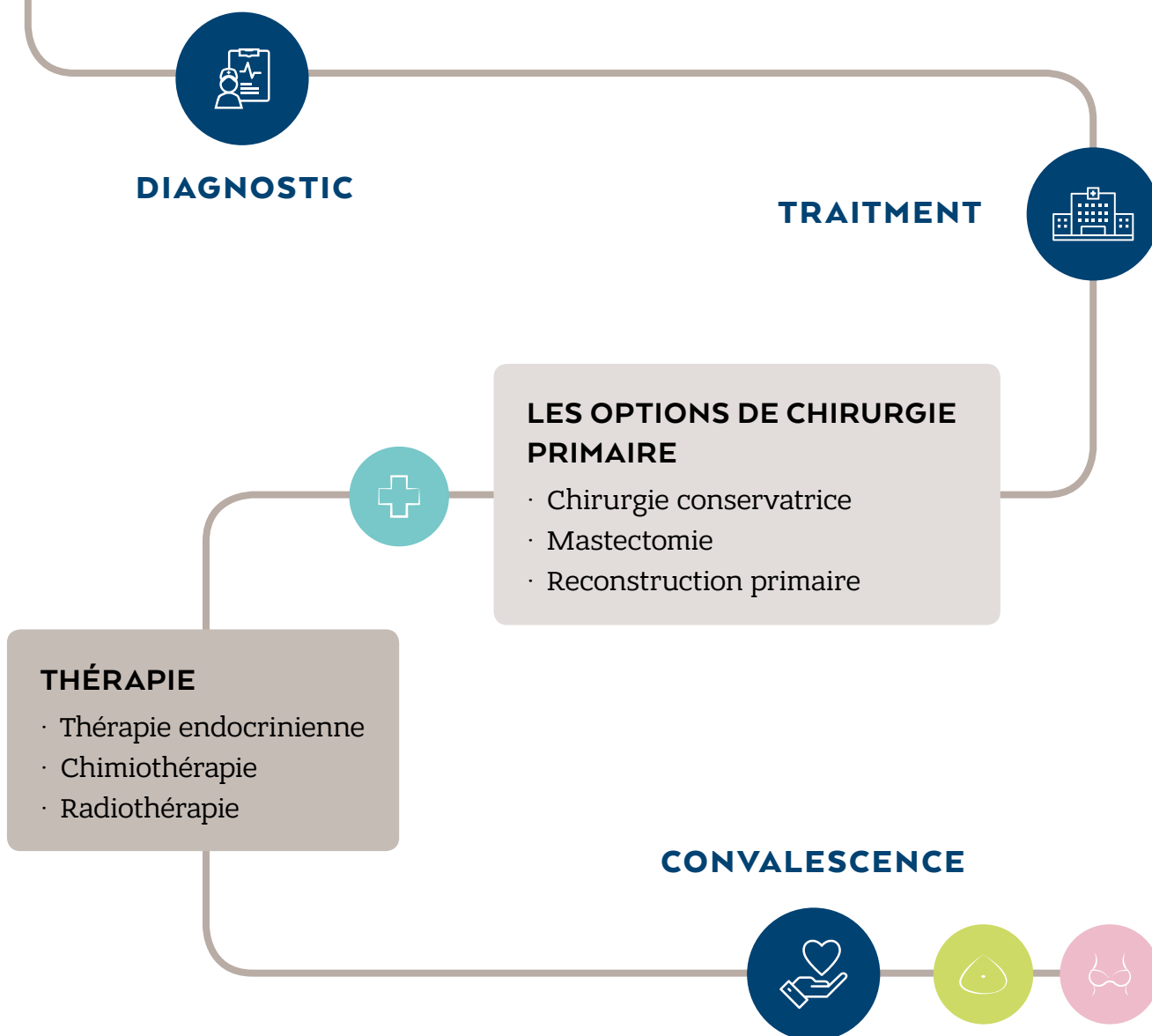

LÀ OÙ LA GUÉRISON COMMENCE



PRODUITS DE CONVALESCENCE

CURASUPPORT COMPRESSION

CURASCAR VÊTEMENTS

CURASUPPORT COMFORT

CURASCAR SILICONES

LÀ OÙ LA VIE REPREN D SON QUOTI DIEN



TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN

LINGERIE

ACTIVE

WELLNESS

MAILLOTS

VIE AU QUOTIDIEN



LES OPTIONS DE CHIRURGIE SECONDAIRE

- Reconstruction avec implants
- Reconstruction avec transplantation autologue ("flap")



LÀ OÙ LA CON FIANCE SE RENFORCE



PROTHÈSES & COMPLÉMENTS MAMMAIRES

ADAPT

CONTACT

ENERGY

NATURA

ESSENTIAL

BALANCE

SOLUTIONS AMOENA

Une adéquation parfaite pour des soins du sein complets

Nos produits s'associent parfaitement entre eux, créant de véritables combinaisons de soins pour chaque étape du parcours de la patiente. Ces associations ne sont que des recommandations basées sur nos 45 ans d'expertise et sur notre collaboration avec les médecins, les professionnels de la santé et points de vente spécialisés.

POUR UNE CHIRURGIE MAMMAIRE CONSERVATRICE SANS RECONSTRUCTION



CURASUPPORT SOUTIEN-GORGE DE COMPRESSION

ex. Leyla ZIP-ST-LOW



CURASCAR SILICONES

ex. Anchor / Ancre

Les soutiens-gorge de compression Amoena sont conçus pour stabiliser et fixer la zone chirurgicale. Associés aux patches en silicone CuraScar, ils garantissent un traitement optimal des cicatrices.

POUR UNE CHIRURGIE MAMMAIRE CONSERVATRICE/MASTECTOMIE AVEC RECONSTRUCTION (propre tissu)




CURASUPPORT SOUTIEN-GORGE DE COMPRESSION

ex. Sina HE-ST-MEDIUM



CURASCAR SILICONES

ex. Mamilla Circle / Couronne

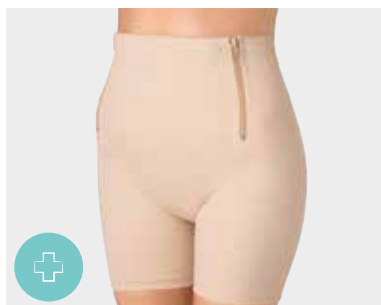

CURASCAR GARMENTS

ex. Capri 2-ZIP-BO



CURASCAR SILICONES

ex. Strips / Bandes étroites

Les soutiens-gorge de compression Amoena sont conçus pour stabiliser et fixer la zone chirurgicale. Nos sous-vêtements pour la cicatrisation soutiennent les tissus et optimisent le processus de cicatrisation après des reconstructions secondaires. Associés aux patches en silicone CuraScar, ils garantissent un traitement optimal des cicatrices.

POUR L'ASYMÉTRIE MAMMAIRE



COMPLÉMENTS MAMMAIRES

ex. Balance Adapt Air



SOUTIENS-GORGE ET MAILLOTS DE BAIN

ex. Soutien-gorge bustier sans armatures Amanda

Nos compléments Amoena sont une manière simple, sans chirurgie d'équilibrer un manque de tissu ou une asymétrie naturelle ou résultant d'une opération. Nos soutiens-gorges sont spécialement conçus pour bien maintenir en place le complément mammaire.

POUR LE LYMPHOÈDÈME



PROTHÈSES MAMMAIRES ALLÉGÉES

ex. Cosmetic, Light, Xtra Light; Adapt Air



SOUTIENS-GORGE AVEC BRETELLES PLUS LARGES OU REMBOURRÉES

ex. Clara bonnets souples – fermeture avant


Des prothèses mammaires allégées et des soutiens-gorge avec des bretelles plus larges soulagent la pression sur les épaules.

POUR LA NATATION



PROTHÈSE DE BAIGNADE AQUA WAVE

ex. Aqua Wave

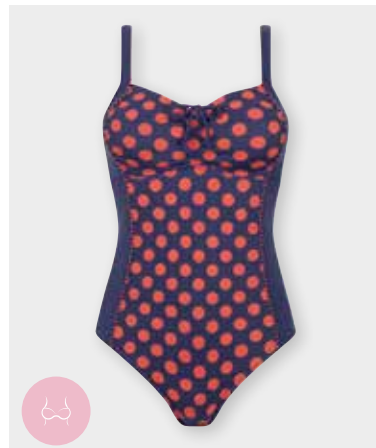


MAILLOTS DE BAIN

ex. Alabama mi-corsage encolure haute

Les prothèses mammaires conçues spécialement pour la baignade offrent symétrie et sûreté pendant les activités nautiques.

NOS NOUVEAUX PRODUITS 2021

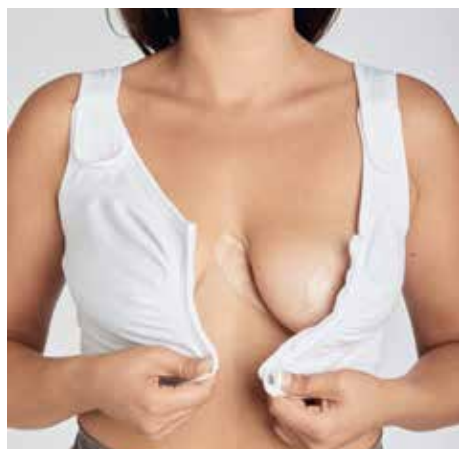

Leyla p. 18 / Anchor (Ancre) et Mammilla Circle (Couronne) patches en silicone pour la cicatrisation, p. 31



Squares (Bandes larges) patches en silicone pour la cicatrisation, p. 30



Sina HE-ST-MEDIUM, p. 19



Culotte 2-ZIP-BO, p. 27



Emilia ZIP-ST-LOW, p. 22



CuraScar patch cicatriciel en silicone, p. 29



Capri 2-ZIP-BO, p. 27



Ceinture ventrale Belly Bandage 3-VE, p. 28



Pamela ZIP-ST-HIGH, p. 19



Balance Adapt Air complément mammaire, p. 58



Mara bonnets souples fermeture avant, p. 88



Nancy bonnets souples
fermeture avant, p. 83



Haut Kitty, p. 84



Clara bonnets souples
fermeture avant, p. 83



Rome une pièce, p. 101



Toronto une pièce
encolure haute, p. 105



Florida plein corsage, p. 104



Alabama mi-corsage
encolure haute, p. 102



Ayon haut rembourré
sans armatures, p. 103

SEGMENTATION PRODUITS

En divisant les produits en Basic, Advanced et Premium, vous obtenez une meilleure vue d'ensemble de la gamme, vous permettant de trouver le bon produit pour vos clientes.

AMOENA PREMIUM

Ces produits combinent ce qu'Amoena a de mieux à offrir en termes de matériaux, de fabrication, de fonction et de design. Pour les femmes ayant les normes les plus élevées qui souhaitent bénéficier des technologies les plus innovantes et développer des produits élaborés.

AMOENA ADVANCED

Le confort et la fonctionnalité de ces produits sont d'une qualité supérieure. Pour les femmes exigeantes qui apprécient une qualité exceptionnelle et des technologies de fabrication innovantes.

AMOENA BASIC

Ces produits répondent à toutes les exigences essentielles avec la qualité attendue d'Amoena. Pour les femmes qui ne veulent pas faire de compromis sur les matériaux, la fabrication, la fonction ou le design, et tout cela à des prix très attractifs.

AMOCURA – SOINS POSTOPÉRATOIRES

La phase postopératoire du parcours de soins d'une femme opérée est la plus délicate. Il est crucial de ne pas compromettre les résultats de la chirurgie et c'est pourquoi toutes nos solutions pour la convalescence sont axées sur la cicatrisation et le confort.

Notre gamme croissante de solutions reflète l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales et le fait que chaque femme a des besoins individuels après l'opération.

Nos produits Soins Postopératoires peuvent être combinés de nombreuses façons afin de répondre aux besoins spécifiques des femmes qui guérissent de tout type de chirurgie mammaire.



PRODUITS AMOCURA

Le diagnostic de cancer du sein est un moment qui change la vie de nombreuses femmes. Elles sont non seulement inquiètes au sujet de la maladie, mais aussi des conséquences physiques qu'elles risquent d'affronter. Amocura est là pour les soutenir dès le moment où elles sont diagnostiquées, tout au long de leur traitement et de leur convalescence.

Dans le cadre de la gamme Soins Postopératoires, nous avons développé des produits qui soutiennent ces femmes dans les moments difficiles juste après l'intervention chirurgicale et pendant le processus de guérison.

Nous vous présentons CuraScar pour le traitement des cicatrices


Environ 65 % des femmes atteintes d'un cancer du sein subissent une chirurgie conservatrice du sein.* La chirurgie conservatrice du sein (CCS) élimine le cancer tout en conservant autant de tissu mammaire que possible. En général, certains tissus sains environnants, ainsi que les ganglions lymphatiques et les vaisseaux sont également retirés. Cela signifie que le nombre de mastectomies sans reconstruction diminue et que le nombre de chirurgies partielles et de reconstructions (après une mastectomie) augmente.

Pour celles qui ont subi une chirurgie conservatrice, de petites marques ou cicatrices peuvent rester. Même après une chirurgie de reconstruction, lorsque la poitrine est reconstruite avec transplantation autologue (ex : FLAP), une importante cicatrisation fait partie du résultat.

Avec CuraScar, nos NOUVEAUX produits axés sur la cicatrisation, la compression et un patch pour la cicatrisation constituent une combinaison idéale pour guérir le corps et les cicatrices.



AMOCURA – SOINS POSTOPÉRATOIRES

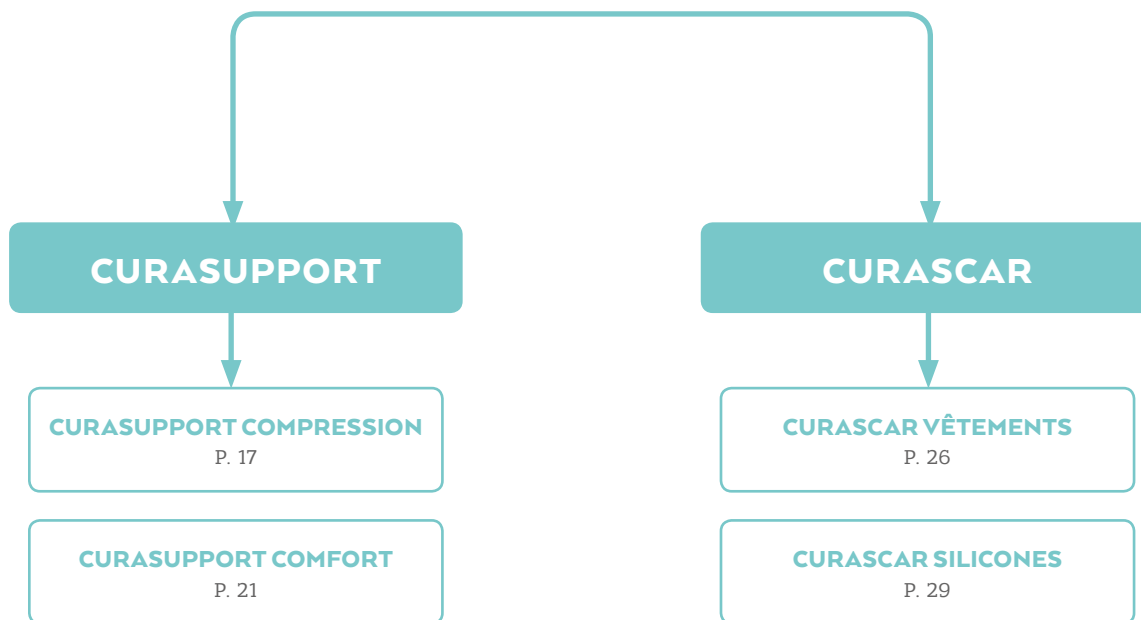

* "Breast Cancer Treatment," https://progressreport.cancer.gov/treatment/breast_cancer, National Cancer Institute, March, 2020.

SOLUTIONS PENDANT LA CONVALESCENCE

TRAITEMENT DES CICATRICES AVEC COMPRESSION ET SILICONE

Le silicone et la compression constituent la combinaison idéale dans le traitement des cicatrices.

Appliqué au début de la phase de traitement, le traitement combiné agit comme un traitement prophylactique pour minimiser le risque de cicatrice excessive..

COMMENT LA THÉRAPIE COMBINÉE FONCTIONNE

- Le traitement par compression consiste à exercer une pression thérapeutiquement efficace et uniforme sur la zone fermée de la plaie, ce qui permet de contrer un remodelage excessif du tissu conjonctif.
- L'association de la pression constante de la surface du vêtement de compression et du silicone favorise la cicatrisation.
- Le silicone crée un environnement humide au niveau de la cicatrice, ce qui empêche cette dernière de sécher. Il en préserve la souplesse et a un effet positif sur le tissu cicatriciel.

EXEMPLES DE SOLUTION



Après reconstruction

Patches en silicone Mammilla Circle (Couronne) et Anchor (Ancre) associés avec le soutien-gorge de compression sans coutures Leyla



Après reconstruction avec tissu autologue (FLAP reconstruction)

Patch en silicone Squares / Bandes larges avec panty de compression 2-ZIP-BO

NIVEAUX DE COMPRESSION



NIVEAU DE
COMPRESSION
LÉGER

Niveau de pression léger


Pression légère pour la fixation et la stabilisation – pas de pression sur la zone du bonnet



NIVEAU DE
COMPRESSION
MOYEN

Niveau de pression élevé

Pression élevée pour la fixation et la stabilisation avec une pression uniforme également sur la zone du sein

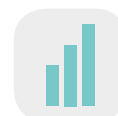

NIVEAU DE
COMPRESSION
ÉLEVÉ

Niveau de pression élevé

Pression élevée pour la fixation et la stabilisation avec une pression uniforme également sur la zone du sein

EXEMPLES DE SOLUTION

Post chirurgie conservatrice du sein et reconstruction

Tous les détails
du produit peuvent
être trouvés dans les
pages suivantes.

SOUTIEN-GORGE DE COMPRESSION SANS COUTURES



LEYLA ZIP-ST-LOW

Style 44604 Leyla ZIP-ST-LOW (Rose Nu)
44605 Leyla ZIP-ST-LOW (Blanc)
44606 Leyla ZIP-ST-LOW (Noir)

Bonnets Universels / Taille unique

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Leyla peut soutenir les résultats chirurgicaux pour diverses indications
- Tissu doux et sans coutures sur le site chirurgical pour réduire l'irritation cutanée, l'inconfort et la pression indésirable
- Une compression légère assure une immobilisation et une stabilisation suffisantes du tissu mammaire opéré et une meilleure cicatrisation
- Préparé pour une utilisation clinique directe grâce au processus de prélavage



PATCHS CICATRiciels EN SILICONE



MAMMILLA CIRCLE / COURONNE

Style 012 (Transparent)
Dimensions Ø extérieur 75 mm / 3 po
Ø intérieur 20 mm / 0.8 po
Zone d'application Sein



ANCHORS

Style 013 (Transparent)
Dimensions 230 x 145 mm / 9 x 5.7 po
Zone d'application Sein

EXEMPLES DE SOLUTION

Post reconstruction avec tissu autologue

COMPRESSION VÊTEMENTS



PANTY

Style 45000 Panty 2-ZIP-BO NU (Nu)
45001 Panty 2-ZIP-BO BK (Noir)

CAPRI

Style 45002 Capri 2-ZIP-BO NU (Nu)
45003 Capri 2-ZIP-BO BK (Noir)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ceinture thermocollée pour éviter les points de pression
- Finition par ultrason aux extrémités des jambes pour plus de contrôle et une finition plate
- Deux fermetures éclair pour un habillage facile
- Compression du ventre et des jambes (uniquement pour les Capri)
- Tissu respirant certifié OEKO-TEX®
- Le tissu ne s'effiloche pas si vous devez le couper pour les tubes de drainage
- Conçu pour être combiné avec les patches en silicone Amoena



BELLY BANDAGE / CEINTURE VENTRALE

Style 45004 Belly bandage 3-VE NU (Nu)
45005 Belly bandage 3-VE BK (Noir)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ceinture de compression
- Attaches VELCRO® pour fermeture et ouverture plus faciles et un ajustement adaptable
- Peut être combiné avec des patches en silicone Amoena

PATCHS CICATRICIELS EN SILICONE



STRIPES / BANDES ÉTROITES

Style 010 (Transparent)
Dimensions 260 x 35 mm / 10.25 x 1.4 po
Zone d'application Ventre/cuisse



SQUARES / BANDES LARGES

Style 011 (Transparent)
Dimensions 260 x 100 mm / 10.25 x 4 po
Zone d'application Ventre/cuisse



CURASUPPORT COMPRESSION

Des textiles de compression ont été développés pour favoriser la cicatrisation de la plaie après une chirurgie mammaire. En stabilisant la forme et la fonction du sein opéré pendant la phase de cicatrisation, nos soutiens-gorge de compression aident à protéger les tissus cicatriciels sensibles et à réduire l'irritation. Cela minimise également le risque d'œdème postopératoire et réduit le gonflement et la douleur postopératoires.


Nouveau couleur

Le soutien-gorge de compression Leyla est préparé de manière hygiénique grâce à un processus de pré lavage. Il est emballé dans un sac scellé pour garantir qu'il reste propre pour une utilisation clinique directe.


CURASUPPORT COMPRESSION

Préparé hygiéniquement pour une utilisation directement en clinique
avec un prélavage et un processus de désinfection

Les soutien-gorges de compression CuraSupport sur ces pages sont préparés hygiéniquement pour utilisation directement en clinique et possèdent les caractéristiques et avantages suivants :

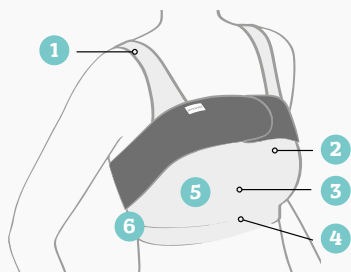

- 1. Bretelles larges et ajustables** avec attaches VELCRO® pour un ajustement facile et un port confortable
- 2. Conception sans couture** utilisant un matériel solide et extensible, offrant une faible compression
- 3. Fermeture avant** pour un accès facile au site chirurgical avec un rabat à agrafes pour plus de sécurité
- 4. Le rabat en tissu doux** au bas de la fermeture à glissière empêche le frottement sur la peau sensible
- 5. Les pochettes sans couture** maintiennent une prothèse postopératoire bien en place

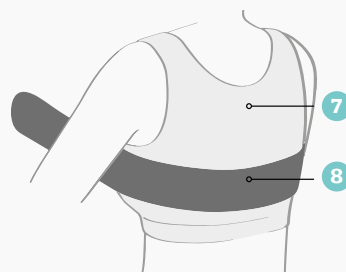

- 6. Zones de stabilisation ciblées** qui contribuent à un flux lymphatique optimal autour du torse
- 7. Tissu doux de haute qualité**, léger et confortable sur la peau sensible
- 8. La bande de compression** (vendue séparément, p. 20) stabilise la zone de la poitrine, et se fixe facilement au rabat à bouclettes à l'arrière pour aider à la maintenir en place

REMARQUE IMPORTANTE ! En raison de la technologie de tricotage circulaire sans couture, il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'emballage des Leyla ZIP-ST-LOW, Sina HE-ST-MEDIUM et Pamela ZIP-ST-HIGH et d'essayer si la taille convient vraiment. Grâce à cette technologie de tricotage circulaire, ils s'adaptent parfaitement aux contours de la partie supérieure du corps. Ils sont préparés pour une utilisation clinique directe et emballés individuellement dans un sachet peelpack. L'ouverture détruit l'atmosphère protectrice, donc aucun retour possible.

Maintenant
jusqu'à
52/54



**NIVEAU DE
COMPRESSION
LÉGER**

*** Notre tableau des tailles avec codes couleurs vous aidera à identifier facilement la bonne taille dans votre stock (voir page 125)**

LEYLA ZIP-ST-LOW

Soutien-gorge de compression sans couture

Style	44605	Blanc
	44604	Rose Nu (NOUVEAU)
	44606	Noir
Tailles*	32/34; 36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54	
Bonnets	Universel / Taille Unique	
Composition	49 % Nylon, 43 % Coton, 8 % Spandex	
Indication	après diverses chirurgies mammaires	



Caractéristiques supplémentaires :

- Niveau de compression léger offrant une immobilisation et stabilité adéquates des tissus cicatriciels, assurant des conditions de guérison optimales.
- La technologie de délicates mailles circulaires sans coutures et la taille unique de bonnets offre un maintien polyvalent et adaptable tout en réduisant l'irritation de la peau, l'inconfort et la pression indésirable.
- Fermeture à glissière avant avec rabat à agrafes à l'intérieur pour plus de sûreté et bretelles larges, ajustables avec fermeture autoagrippante de marque VELCRO®
- Les pochettes maintiennent bien en place une prothèse postopératoire.
- En association avec CuraScar Silicones pour le traitement des cicatrices (voir p. 30-31)

CARACTÉRISTIQUES

Pochettes bilatérales

Sans pochettes

Haute teneur en coton

ST
Technologie sans couture

ZIP
Zip à l'avant

BO
Thermocollé

HE
Agrafes à l'avant

VE
VELCRO® à l'avant

AS
Bretelles ajustables

IN
Enfilement facile

CURASUPPORT COMPRESSION

Préparé hygiéniquement pour une utilisation directement en clinique avec un prélavage et un processus de désinfection

SINA HE-ST-MEDIUM

Soutien-gorge de compression – fermeture avant à agrafes

Style	45007		Blanc
	45006		Rose Nu
	45008		Noir

Tailles 32/34; 36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54

Bonnets Universel / Taille Unique

Composition 98 % Nylon, 2 % Spandex

Indication après diverses chirurgies mammaires



Caractéristiques supplémentaires :

- La technologie de mailles circulaires sans coutures et la taille unique de bonnets offre un maintien polyvalent et adaptable.
- Immobilise et stabilise la région opérée avec des zones spécialement tissées dans la partie inférieure du bonnet, permettant un niveau de compression moyen ciblé afin de favoriser le drainage lymphatique et le processus de guérison.
- Les bonnets pré-formés, souples et sans coutures assurent une stabilité optimale du sein postopératoire avec une pression constante, même à l'intérieur du bonnet (sans anneau de contention autour du bonnet).
- Fermeture avant avec rabat à agrafes et bretelles larges, ajustables avec fermeture autoagrippante de marque VELCRO®.
- En association avec CuraScar Silicones pour le traitement des cicatrices (voir p. 30-31)

PAMELA ZIP-ST-HIGH

Soutien-gorge de compression – fermeture à glissière avant

Style	45010		Blanc
	45009		Rose Nu
	45011		Noir

Tailles 32/34; 36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54

Bonnets Universel / Taille Unique

Composition 98 % Nylon, 2 % Spandex

Indication après diverses chirurgies mammaires



Caractéristiques supplémentaires :

- La technologie de mailles circulaires sans coutures et la taille unique de bonnets offre un maintien polyvalent et adaptable.
- Immobilise et stabilise la région opérée avec des zones spécialement tissées dans la partie inférieure du bonnet, permettant un niveau de compression élevé ciblé afin de favoriser le drainage lymphatique et le processus de guérison.
- Les bonnets pré-formés, souples et sans coutures assurent une stabilité optimale du sein postopératoire avec une pression constante, même à l'intérieur du bonnet (sans anneau de contention autour du bonnet).
- Fermeture à glissière avant avec rabat à agrafes à l'intérieur pour plus de sûreté et bretelles larges, ajustables avec fermeture autoagrippante de marque VELCRO®.
- Les pochettes maintiennent bien en place une prothèse postopératoire.
- En association avec CuraScar Silicones pour le traitement des cicatrices (voir p. 30-31)

NOUVEAU



NIVEAU DE
COMPRESSION
MOYEN

NOUVEAU



NIVEAU DE
COMPRESSION
ÉLEVÉ

Substitution pour le style Patricia

CURASUPPORT COMPRESSION

Avec prise en charge des drains



**NIVEAU DE
COMPRESSION
MOYEN**

SARAH HE-MEDIUM

Camisole de compression avec fermeture avant à agrafes

Style 0778 ☐ Blanc

0779 ☒ Noir

Tailles 34-46 A, B, C, D, DD

Agrafes 7 rangées : 34 A

8 rangées : 36-38 A; 34-36 B; 34 C

9 rangées : 40-42 A; 38-40 B; 36-38 C; 34-36 D; 34 DD

10 rangées : 44-46 A; 42-44 B; 40-42 C; 38-40 D; 36-38 DD

11 rangées : 46 B; 44-46 C; 42-44 D; 40-42 DD

12 rangées : 46 D; 44-46 DD


Composition 62 % Coton, 24 % Nylon, 14 % Spandex

Indication après diverses chirurgies mammaires



- Deux couches à haute teneur en coton à l'avant
- Moulés, les bonnets ne renferment aucune pochette et les coutures sont plates pour atténuer l'irritation
- Bande élastique souple conçue pour ne pas rouler vers le haut
- Bretelles larges, ajustables avec fermeture avant autoagrippante de marque VELCRO®
- Un rabat au dos permet à la bande de compression Amoena de s'y fixer facilement. Le rabat peut être plié lorsqu'il ne sert pas. Bande de compression vendue séparément, voir ci-bas
- Sac de Drainage Amovible qui se fixe à la sous-bande. (Vendu séparément, p. 24)
- Utiliser combiné avec les Silicones CuraScar pour une thérapie de cicatrisation (voir p. 30-31)

Maintenant
jusqu'à 54

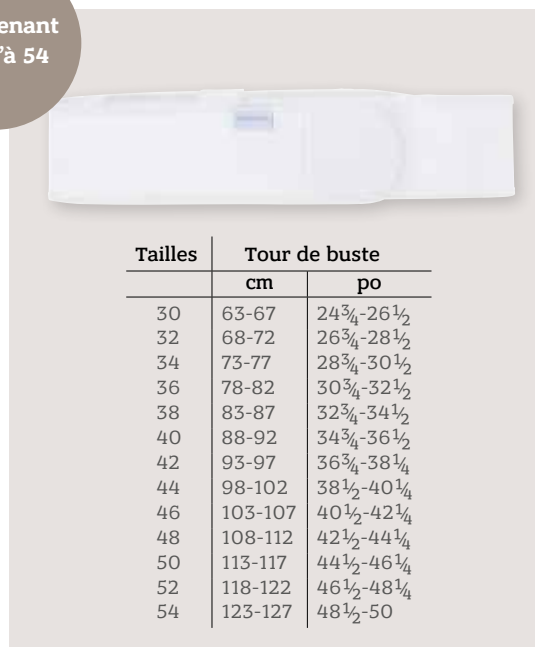

Tailles	Tour de buste	
	cm	po
30	63-67	24 $\frac{3}{4}$ -26 $\frac{1}{2}$
32	68-72	26 $\frac{3}{4}$ -28 $\frac{1}{2}$
34	73-77	28 $\frac{3}{4}$ -30 $\frac{1}{2}$
36	78-82	30 $\frac{3}{4}$ -32 $\frac{1}{2}$
38	83-87	32 $\frac{3}{4}$ -34 $\frac{1}{2}$
40	88-92	34 $\frac{3}{4}$ -36 $\frac{1}{2}$
42	93-97	36 $\frac{3}{4}$ -38 $\frac{1}{4}$
44	98-102	38 $\frac{1}{2}$ -40 $\frac{1}{4}$
46	103-107	40 $\frac{1}{2}$ -42 $\frac{1}{4}$
48	108-112	42 $\frac{1}{2}$ -44 $\frac{1}{4}$
50	113-117	44 $\frac{1}{2}$ -46 $\frac{1}{4}$
52	118-122	46 $\frac{1}{2}$ -48 $\frac{1}{4}$
54	123-127	48 $\frac{1}{2}$ -50

BANDE DE COMPRESSION

Pour être utilisé avec CuraSupport Compression

Style 0776N ☐ Blanc


0789N ☒ Noir

Tailles 30-54


Composition 72 % Nylon, 14 % Polyester, 8 % Coton, 6 % Spandex

Indication Après une reconstruction avec implants, augmentation avec implants


- La coupe est conçue pour assurer un résultat optimal de la en immobilisant le ou les seins opérés et en empêchant la migration des implants pendant le processus de guérison
- Forme anatomique faite de tissu élastique résistant, pour un ajustement et une compression optimum de la partie supérieure de la poitrine
- Ne cause pas de marques ou d'irritation grâce à des tissus doux pour la peau. Fermeture à VELCRO® à l'avant pour un ajustement simple et personnalisable
- Le rabat au dos permet à la bande de compression Amoena de se fixer facilement et de façon sécuritaire au vêtement. Le rabat peut être plié lorsqu'il ne sert pas ou lorsque porté avec les vêtements Leyla, Sarah ou Patricia
- Peut être utilisée avec tout soutien-gorge ou bandage
- Utiliser combiné avec les Silicones CuraScar pour une thérapie de cicatrisation (voir p. 30-31)

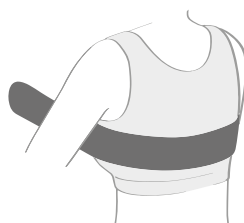

La bande de compression s'ajuste à l'arrière à la même hauteur que le soutien-gorge.

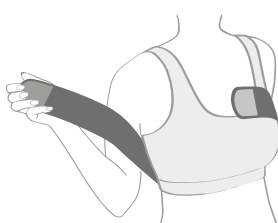

À l'avant, la bande se fixe au-dessus du décolleté.

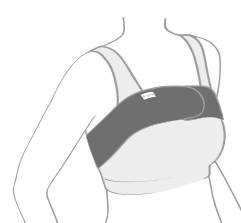

La bande est correctement placée lorsque l'étiquette Amoena est lisible lorsque vous regardez en bas à votre droite.



CURASUPPORT COMFORT

Les soutiens-gorge et CuraSupport Comfort répondent à des besoins spécifiques une fois la plaie cicatrisée, par ex. en cas de sensibilité élevée ou de brûlures liées à l'irradiation. Ils sont tous très confortables à porter et sont exceptionnellement faciles à utiliser.

CURASUPPORT COMFORT

Avec prise en charge des drains

NOUVEAU



EMILIA ZIP-ST-LOW



Soutien-gorge postopératoire, fermeture à glissière à l'avant

Style	45013	☐ Blanc
	45012	☐ Rose Nu
	45014	☐ Noir



Tailles 32/34; 36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54

Bonnets Universel / Taille Unique

Composition 69 % Coton, 25 % Nylon, 6 % Spandex

Indication Après diverses chirurgies mammaires

- La technologie de mailles circulaires sans coutures et la taille unique de bonnets offre un maintien polyvalent et adaptable tout en réduisant l'irritation de la peau, l'inconfort et la pression indésirable.
- Tissu maille intégré sur les côtés et sous le buste permettant une aération pour plus de confort.
- Fermeture à glissière avant avec rabat à agrafes à l'intérieur pour plus de sûreté.
- Les pochettes maintiennent bien en place une prothèse postopératoire.
- Bretelles larges qui s'ajustent au dos.
- Les Sacs de Drainage Amovibles peuvent être attachés à la bande du bas. (Vendus séparément, p. 24)



HANNAH SOUTIEN-GORGE POSTOPÉRATOIRE



Fermeture avant; prise en charge des drains

Style	2160	☐ Blanc
-------	------	--------------------------------

Tailles XS (26/28); S (28/30); M (32/34) L (36/38);
XL (38/40); 2XL (42/44); 3XL (46/48);
4XL (50/52)

Bonnets A/B; C/D

Agrafes 4 rangées : XS (A/B); S (A/B); M (A/B); XS (C/D)

5 rangées : L (A/B); XL (A/B); S (C/D); M (C/D); L (C/D); XL (C/D)

Composition 85 % Coton, 15 % Spandex

Indication Après diverses chirurgies mammaires



- Vêtements en coton doux avec fermeture à agrafes à l'avant.
- Les pochettes en coton maintiennent bien en place une prothèse postopératoire
- Bretelles élastiques qui s'attachent à l'avant pour un accès facile
- Les Sacs de Drainage Amovibles peuvent être attachés à la bande du bas. (Vendus séparément, p. 24)



HANNAH CAMISOLE POSTOPÉRATOIRE



Fermeture à glissière à l'avant; prise en charge des drains

Style	2860	☐ Blanc
-------	------	--------------------------------

Tailles XS (2/4); S (6/8); M (10/12); L (14/16);
XL (18/20); 2XL (22/24); 3XL (26/28); 4XL (30)

Bonnets A/B; C/D

Accessoires Comprend deux prothèses postopératoires
Fibrefill 2106 et deux Sacs de Drainage
Amovibles 2107

Composition 85 % Coton, 15 % Spandex

Indication Après diverses chirurgies mammaires



- Un vêtement en coton confortable, avec une fermeture à glissière à l'avant qui offre un ajustement serré, sans être restrictif
- Les pochettes en coton maintiennent bien en place une prothèse postopératoire.
- Bretelles élastiques et coussinées avec attaches à l'avant permettant un accès et un habillage facile.
- Comprend deux Sacs de Drainage Amovibles peuvent être attachés à la bande du bas. (Vendus séparément, p. 24)

CURASUPPORT COMFORT

Avec prise en charge des drains



MICHELLE CAMISOLE POSTOPÉATOIRE



Style à glisser vers le haut ou passer par-dessus la tête

Style	2105	Blanc	Nu	Noir
Tailles	XS (2/4); S (6/8); M (10/12); L (14/16); XL (18/20); 2XL (22/24); 3XL (26/28); 4XL (30)			
Accessoires	Comprend deux prothèses postopératoires Fibrefill 2106 et deux Sacs de Drainage Amovibles 2107			
Composition	85 % Coton, 15 % Spandex			
Indication	Après diverses chirurgies mammaires			



- Coton ultradoux, ce style offre un ajustement ferme mais non restrictif. Les coutures intérieures lisses favorisent un confort accru pour la peau sensible
- Col élastique facile à enfiler par les jambes
- Comprend deux Sacs de Drainage Amovibles peuvent être attachés à la bande du bas. (Vendus séparément, p. 24)
- Les pochettes en coton maintiennent bien en place une prothèse postopératoire



ESTER SOUTIEN-GORGE POSTOPÉATOIRE



Fermeture à agrafes à l'avant

Style	42576	Blanc
	42577	Noir/Grey
Tailles	34-44 A, B, C, D; 36-42 DD	
Agrafes	7 rangées : 34-38 A; 34-36 B; 34 C 8 rangées : 40-44 A; 38-42 B; 36-40 C; 34-38 D; 36 DD 9 rangées : 44 B; 42-44 C; 40-44 D; 38-42 DD	
Composition	83 % Nylon, 17 % Spandex	
Indication	Après diverses chirurgies mammaires	



- Coupe moderne et allure sportive; se porte aussi comme cami sport
- Tissus synthétiques laissant circuler l'air; mailles sur le côté et à l'arrière permettant une rapide évaporation de l'humidité
- Bonnets moulés et lisses, discrets sous les vêtements
- Tissus synthétiques laissant circuler l'air; mailles sur le côté et au dos aide à l'évacuation de l'humidité
- Bretelles larges, rembourrées et ajustables
- Les Sacs de Drainage Amovibles peuvent être attachés à la bande du bas. (Vendus séparément, p. 24)

NOUVEAU
couleur

Haute teneur
en coton



FRANCES SOUTIEN-GORGE POSTOPÉATOIRE



2,5

Style	Blanc	Nu	Bleu/Blanc
2128	Noir	Rose/Taupe	Gris/Blanc
	Bleu Pâle/Aqua (NOUVEAU)		
Tailles	XS (28/30); S (32/34); M (36/38); L (40/42); XL (44/46); 2XL (48/50)		
Bonnets	Affaissé/Moyen A/B; C/D; DD/DDD		
Agrafes	4 rangées : XS (A/B, C/D); S (A/B); M (A/B) 5 rangées : XS (DD/DDD); S (C/D, DD/DDD); M (C/D, DD/DDD); L (A/B, C/D); XL (A/B, C/D); 2XL (A/B, C/D) 6 rangées : L (DD/DDD); XL (DD/DDD) 7 rangées : 2XL (DD/DDD)		
Composition	90 % Coton, 10 % Spandex		



- Soutien-gorge de loisirs à fermeture avant
- Tissu en coton ultra doux offrant un confort apaisant à la peau sensible
- Pour un meilleur support, nous vous recommandons de porter une prothèse Amoena Loisir avec ce soutien-gorge (voir p. 25)

CARACTÉRISTIQUES

Pochettes bilatérales

Sans pochettes

Haute teneur en coton

ST Technologie sans couture

ZIP Zip à l'avant

BO Thermocollé

HE Agrafes à l'avant

VE VELCRO® à l'avant

AS Bretelles ajustables

IN Enfilement facile

CURASUPPORT COMFORT

Avec prise en charge des drains



THERAPORT SOUTIEN-GORGE POSTOPÉRATOIRE

Vêtement pour traitements de radiothérapie à fermeture à l'avant

Style 2161 ☐ Blanc

Tailles S : 30-34 A; 30-32 B; 30 C
M : 36-40 A; 34-38 B; 32-36 C; 30-34 D;
30-32 DD; 30 DDD
L : 42-46 A; 40-44 B; 38-42 C; 36-40 D;
34-38 DD; 32-36 DDD; 30-34 G-H
XL : 48-52 A; 46-50 B; 44-48 C; 42-46 D;
40-44 DD; 38-42 DDD; 36-40 G; 36-38 H
2XL : 54-58 A; 52-56 B; 50-54 C; 48-52 D;
46-50 DD; 42-46 DDD; 42-46 G; 40-44 H

Composition 81 % Coton, 12 % Nylon, 7 % Spandex

Indication Après diverses chirurgies mammaires, notamment la brachythérapie

- Spécialement conçu pour porter immédiatement après tout type de chirurgie mammaire ou pendant les traitements de radiothérapie, incluant l'irradiation mammaire partielle (grains radioactifs et curiethérapie).
- Le tissu de coton sans couture comprend une fermeture VELCRO® à l'avant et des bretelles VELCRO® permettant un accès facile aux régions traitées sans devoir se dévêtir complètement
- Le tissu peut être coupé de chaque côté pour recevoir un cathéter
- La bande inférieure sans couture repose confortablement et s'ajuste délicatement autour des cathéters de curiethérapie et du site d'irradiation tout en maintenant fermement les sacs de drainage Amoena (vendus séparément)
- Les pochettes de coton maintiennent bien en place une prothèse post-opératoire



CURASUPPORT ACCESSOIRES



SAC DE DRAINAGE AMOVIBLE

Style 2107S ☐ Blanc

Tailles Taille Unique

Emballage 2 pieces

Composition 95 % Coton, 5 % Spandex

Indication Après diverses chirurgies mammaires

- S'attache au vêtement de façon sécuritaire grâce à la languette de VELCRO®
- Forme standard pour une utilisation avec les systèmes de drainage Jackson-Pratt®, Hemovac® ou autres

CARACTÉRISTIQUES



Pochettes bilatérales



Sans pochettes



Haute teneur en coton

ST

Technologie sans couture

ZIP

Zip à l'avant

BO

Thermocollé

HE

Agrafes à l'avant

VE

VELCRO® à l'avant

AS

Bretelles ajustables

IN

Enfillement facile



PROTHÈSE POSTOPÉRATOIRE EN FIBRES DE REMBOURRAGE



Style 2106 ☐ Blanc

Tailles XS (28/30); S (32/34); M (36/38); L (40/42);
XL (44); 2XL (46); 3XL (48); 4XL (50); 5XL (52)
Refers to bra band size

Composition 67 % Coton, 30 % Polyester, 3 % Spandex

- Offre une solution de symétrie ultra confortable, immédiatement après la chirurgie
- Facile à ajuster au volume désiré en ajoutant ou en enlevant des fibres de rembourrage. Des fibres de rembourrage supplémentaires sont comprises



PREMIUM PRIFORM

Style 216

Tailles 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14

Composition Avant : 40 % Coton, 23 % Polyuréthane,
20 % Polyester, 14 % Nylon, 3 % Spandex
Remplissage : 100 % Polyester



- Une prothèse temporaire conçue pour un usage immédiat après une chirurgie du sein ou pour les moments de répit
- Un design s'inspirant d'un bonnet moulé pour offrir un fini doux et lisse dans la pochette d'un soutien-gorge postopératoire ou d'une camisole Amoena
- Remplie de fibre légère. Le volume peut être ajusté en ajoutant ou en enlevant des fibres.
- L'arrière est en coton doux pour la peau et permet le passage de l'air
- Idéal pour restaurer la silhouette durant le processus de guérison en attendant une prothèse permanente
- Fibres additionnelles incluses dans l'emballage



PROTHÈSE DE LOISIR EN MOUSSE CALIBRÉE

Style 132N

Tailles 3-14

Composition Mousse calibrée : 30 % Polyuréthane,
70 % Baryum Sulfate (7727-43-7)
Couverture : 82 % Nylon, 18 % Spandex



- La mousse de polyuréthane est légèrement lestée avec du sulfate de baryum (7727-43-7), un minéral naturel sous forme de poudre
- Le revêtement en tissu ultradoux amovible et lavable aide à maintenir un environnement propre
- Prothèse idéale pour dormir

Une prothèse Priform ne remplace pas une prothèse mammaire en silicone, qui elle, est conçue pour un usage quotidien à long terme et qui procure à votre corps l'équilibre approprié.

CURASCAR VÊTEMENTS

Les vêtements postopératoires de compression cicatricielle peuvent accélérer le processus de cicatrisation en empêchant l'accumulation de liquide. Ils peuvent également soulager la douleur et maintenir les muscles dans la bonne position après l'intervention chirurgicale. Le bon niveau de compression et le bon support tissulaire jouent un rôle important dans ce processus.

Pour un traitement idéal des cicatrices, utilisez CuraScar Vêtements combiné avec les patches de silicone CuraScar.





PANTY 2-ZIP-BO

Panty de compression cicatricielle avec environ 20-23 mmHg

Style 45000  Nu

45001  Noir

Tailles XS; S; M; L; XL; 2XL*

Composition 56 % Nylon, 42 % Spandex, 2 % Coton

Indication lésions cutanées et difficultés de cicatrisation, avec une formation de cicatrices altérées

- après une chirurgie reconstructive
- pour améliorer la cicatrisation jusqu'à la cicatrisation complète
- pour stabiliser les résultats de l'opération



- Coupe taille haute avec élastique large, taille assemblée pour protéger les plaies; conçue pour rester en place et ne pas rouler
- Mélange de tissu respirant qui peut être coupé pour les tubes de drainage
- Fermeture éclair sur le côté avec rabat à agrafes à l'intérieur offrant facilité pour l'habillage et un maintien sécuritaire
- Finition ultrasonique assurant des ourlets plats
- Compositions certifiées Oeko-Tex, sans latex, silicone ou nickel
- En association avec CuraScar Silicones pour le traitement des cicatrices (voir p. 30-31)

*Voir le tableau des tailles à la p.125



CAPRI 2-ZIP-BO

Capri de compression cicatricielle avec environ 20-23 mmHg

Style 45002  Nu

45003  Noir

Tailles XS; S; M; L; XL; 2XL*

Composition 56 % Nylon, 42 % Spandex, 2 % Coton

Indication lésions cutanées et difficultés de cicatrisation, avec une formation de cicatrices altérées

- après une chirurgie reconstructive
- pour améliorer la cicatrisation jusqu'à la cicatrisation complète
- pour stabiliser les résultats de l'opération



- Coupe taille haute avec élastique large, taille assemblée pour protéger les plaies; conçue pour rester en place et ne pas rouler
- Longueur de jambe 3/4 supportant le drainage lymphatique
- Mélange de tissu respirant qui peut être coupé pour les tubes de drainage
- Fermeture éclair sur le côté avec rabat à agrafes à l'intérieur offrant facilité pour l'habillage et un maintien sécuritaire
- Finition ultrasonique assurant des ourlets plats
- En association avec CuraScar Silicones pour le traitement des cicatrices (voir p. 30-31)

*Voir le tableau des tailles à la p.125

Avis
d'une PRO

Pour enfiler le Panty et Capri, ouvrez premièrement les deux fermetures éclair et les rabats à agrafes. Tirez sur le vêtement. Fermez les rabats à agrafes sur les deux côtés et ensuite fermez les fermetures à éclair..



BELLY BANDAGE 3-VE / CEINTURE VENTRALE

Ceinture ventrale compression avec environ 20-23 mmHg

Style 45004  Nu

45005  Noir

Tailles S/M; L/XL; 2XL/3XL

Composition Nu : 59 % Nylon, 31 % Spandex,
8 % Coton, 2 % Polyester

Noir : 33 % Nylon, 31 % Spandex, 29 % Polyester,
7 % Coton

Indication lésions cutanées et difficultés de cicatrisation, avec une formation de cicatrices altérées

- après une chirurgie reconstructive
- pour améliorer la cicatrisation jusqu'à la cicatrisation complète
- pour stabiliser les résultats de l'opération



Avis
d'une PRO

Pour porter la Ceinture ventrale, fermez la partie centrale en premier, ensuite stabilisez chaque bande additionnelle pour une compression confortable et ferme.

Suivez les positionnements suivants comme guide :

Taille S sur le côté
Taille M sur le centre
Taille L sur le côté
Taille XL sur le centre
Taille 2XL sur le côté
Taille 3XL sur le centre

- Coupe flexible grâce à la fermeture VELCRO® réglable
- Ceinture ventrale divisée en trois parties permettant un ajustement individuel de la taille. Chaque bande est 8 cm (3.15 po) de haut, rendant le vêtement d'une hauteur de 24 cm
- Une combinaison de matières spécialement sélectionnées garantit un ajustement parfait. Matières certifiées Oeko-Tex®, sans latex, silicone ou nickel
- En association avec CuraScar Silicones pour le traitement des cicatrices (voir p. 30-31)



CURASCAR SILICONES

Le silicone est un composant important dans le traitement des cicatrices causées par des blessures ou une intervention chirurgicale. Il assure un environnement humide pour que la cicatrice ne sèche pas et a donc un effet positif sur le processus de cicatrisation.

Pour un traitement idéal des cicatrices, utilisez les patchs de silicone CuraScar combinés avec les vêtements de compression CuraScar.





STRIPS / BANDES ÉTROITES

Patch cicatriciel en silicone pour le traitement des cicatrices

Style	010 Transparent
Taille	260 x 35 mm / 10.25 x 1.4 po
Emballage	4 pièces
Composition	Polydimethylsiloxane, film polyuréthane, film protecteur en polyéthylène, bandes de recouvrement en polyéthylène
Indication	• Prévention et traitement des cicatrices altérées • Traitement des cicatrices rouges et surélevées • Traitement post-chirurgical (par ex. après une intervention de chirurgie reconstructive ou esthétique)

- Pour usage sur n'importe quelle partie du corps pour une thérapie de cicatrisation
- Pellicule de polyuréthane respirant très élastique
- Réutilisable, la languette sert à faciliter le positionnement et repositionnement
- Résistant aux UV
- Facile d'entretien, ce qui aide l'adhérence. Nettoyant doux Amona est recommandé. Vendu séparément, p. 53.
- Couche protectrice pour l'endos additionnelle fournie pour rangement sécuritaire lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Peut être taillé pour une taille et forme idéales.
- Utilisez combiné avec CuraSupport et les vêtements de compression CuraScar pour un traitement idéal des cicatrices (voir p. 18-20 et p. 27-28)



SQUARES / BANDES LARGES

Patch cicatriciel en silicone pour le traitement des cicatrices

Style	011 Transparent
Taille	260 x 100 mm / 10.25 x 4 po
Emballage	2 pièces
Composition	Polydimethylsiloxane, film polyuréthane, film protecteur en polyéthylène, bandes de recouvrement en polyéthylène
Indication	• Prévention et traitement des cicatrices altérées • Traitement des cicatrices rouges et surélevées • Traitement post-chirurgical (par ex. après une intervention de chirurgie reconstructive ou esthétique)

- Pour usage sur n'importe quelle partie du corps pour une thérapie de cicatrisation
- Pellicule de polyuréthane respirant très élastique
- Réutilisable, la languette sert à faciliter le positionnement et repositionnement
- Résistant aux UV
- Facile d'entretien, ce qui aide l'adhérence. Nettoyant doux Amona est recommandé. Vendu séparément, p. 53.
- Couche protectrice pour l'endos additionnelle fournie pour rangement sécuritaire lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Peut être taillé pour une taille et forme idéales.
- Utilisez combiné avec CuraSupport et les vêtements de compression CuraScar pour un traitement idéal des cicatrices (voir p. 18-20 et p. 27-28)



CURASCAR SILICONES : VOYEZ COMMENT ILS SONT FACILES À UTILISER

Regarder des vidéos d'utilisation des CuraScar Silicones. Scannez simplement le code QR !





MAMMILLA CIRCLE / COURONNES

Patch cicatriciel en silicone pour le traitement des cicatrices

- | | |
|-------------|--|
| Style | 012 Transparent |
| Taille | Ø extérieur 75 mm / 3 po
Ø intérieur 20 mm / 0.8 po |
| Emballage | 2 pièces |
| Composition | PPolydimethylsiloxane, film polyuréthane, film protecteur en polyéthylène, bandes de recouvrement en polyéthylène |
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> • Prévention et traitement des cicatrices altérées • Traitement des cicatrices rouges et surélevées • Traitement post-chirurgical (par ex. après une intervention de chirurgie reconstructive ou esthétique) |
- Pour usage sur les mamelons pour une thérapie de cicatrisation
 - Pellicule de polyuréthane respirant très élastique
 - Réutilisable, la languette sert à faciliter le positionnement et repositionnement
 - Résistant aux UV
 - Facile d'entretien, ce qui aide l'adhérence. Nettoyant doux Amona est recommandé. Vendu séparément, p. 53.
 - Couche protectrice pour l'endos additionnelle fournie pour rangement sécuritaire lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - Peut être taillé pour une taille et forme idéales.
 - Utilisez combiné avec CuraSupport et les vêtements de compression CuraScar pour un traitement idéal des cicatrices (voir p. 18-20 et p. 27-28)



ANCHOR / ANCRES

Patch cicatriciel en silicone pour le traitement des cicatrices

- | | |
|-------------|--|
| Style | 013 Transparent |
| Taille | 230 x 145 mm / 9 x 5.7 po |
| Emballage | 2 pièces |
| Composition | Polydimethylsiloxane, film polyuréthane, film protecteur en polyéthylène, bandes de recouvrement en polyéthylène |
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> • Prévention et traitement des cicatrices altérées • Traitement des cicatrices rouges et surélevées • Traitement post-chirurgical (par ex. après une intervention de chirurgie reconstructive ou esthétique) |
- Pour usage sur les cicatrices de reconstruction mammaire
 - Pellicule de polyuréthane respirant très élastique
 - Réutilisable, la languette sert à faciliter le positionnement et repositionnement
 - Résistant aux UV
 - Facile d'entretien, ce qui aide l'adhérence. Nettoyant doux Amona est recommandé. Vendu séparément, p. 53.
 - Couche protectrice pour l'endos additionnelle fournie pour rangement sécuritaire lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - Peut être taillé pour une taille et forme idéales.
 - Utilisez combiné avec CuraSupport et les vêtements de compression CuraScar pour un traitement idéal des cicatrices (voir p. 18-20 et p. 27-28)

CuraScar Silicones disponibles en 4 modèles différents peuvent être parfaitement combinés avec les vêtements CuraSupport Compression ou CuraScar Vêtements pour traiter de manière optimale une cicatrice après une chirurgie mammaire. Vous trouverez des détails à la pages 14 et 26.

PROTHÈSES ET COMPLÉMENTS MAMMAIRES



Notre gamme complète de prothèses et de compléments mammaires offre des formes adaptées aux tendances chirurgicales actuelles, associées aux caractéristiques innovantes du produit, fournissant **la meilleure solution adaptée aux besoins de vos clientes.**



PROTHÈSES MAMMAIRES

Une solution non-chirurgicale après une mastectomie

Plus de 10,000 femmes canadiennes subissent une forme quelconque de mastectomie chaque année. Elle est généralement utilisée pour traiter le cancer du sein, mais dans certains cas, elle est utilisée pour réduire les risques de cancer du sein* – et ce ne sont pas toutes les femmes qui décident d'avoir une reconstruction après une mastectomie.

Nos prothèses constituent une alternative idéale pour ces femmes. Avec nos textiles spécifiques, elles créent une silhouette harmonieuse et une symétrie physique. Dotées de technologies innovantes, elles peuvent aider à soulager les effets d'un lymphoedème, douleurs au cou et épaules, et la ménopause.

Les prothèses mammaires Amoena sont idéales après :

- une mastectomie simple
- une mastectomie radicale (mastectomie de Halsted)
- une mastectomie radicale modifiée

COMPLÉMENTS MAMMAIRES

Fournit un équilibre dans les cas d'asymétrie mammaire

Selon les statistiques les plus récentes, près de 65% des patientes du cancer du sein invasif âgées de 20 ans et plus subissent des tumorectomies, ou des chirurgies mammaires conservatrices.**

Malgré le fait que la tumeur est retirée d'une manière à préserver le plus de tissu naturel du sein possible, l'asymétrie peut quand même se produire. Ceci peut être équilibré visuellement avec nos compléments partiels – ils rétablissent une silhouette équilibrée, garantissent un ajustement correct du soutien-gorge, et aident à la santé de la colonne vertébrale.

Les compléments mammaires Amoena sont idéaux après :

- une chirurgie conservatrice du sein
- des biopsies multiples
- une reconstruction (rétablissement partiel, résultats insatisfaisants)
- une reconstruction suivant une thérapie par expandeur
- une asymétrie mammaire naturelle, une malformation mammaire ou une dégénérescence



LA SOLUTION AMOENA

Nos textiles pour les soins du sein (débutant à la page 65) ainsi que nos prothèses et compléments mammaires offrent la solution parfaite pour des soins complets après une chirurgie du sein.

* "Mastectomy and Double Mastectomy," <https://www.brighamandwomens.org/surgery/surgical-oncology/resources/mastectomy>, Brigham and Women's Hospital, August 18, 2020.

** "Breast Cancer Treatment," https://progressreport.cancer.gov/treatment/breast_cancer, National Cancer Institute, August 18, 2020.

LA PROMESSE DE QUALITÉ AMOENA



PLUS DE 45 ANS D'EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE SOINS DU SEIN

Amoena, l'inventeur et le leader en matière de développement des prothèses en silicone revêtues de film, propose des prothèses mammaires complètes et des compléments mammaires partiels pour une esthétique naturelle et un maintien sûr. Avec plus de 45 ans d'expérience et les normes de qualité les plus strictes, nous garantissons la qualité de produit la plus élevée conformément aux normes DIN ISO 9001 et 13485 pour les dispositifs médicaux.

Tous les films et gels en silicone ont été testés pour la compatibilité cutanée et correspondent à l'état actuel de la « biocompatibilité » conformément à la norme DIN ISO 10993.

- Fabriqué en Allemagne
- Leader technologique de qualité dans le domaine des prothèses mammaires
- Plus de 17 millions de prothèses vendus dans le monde depuis 1975
- Plus de 15 000 points de vente spécialisés dans le monde font confiance à nos produits
- Certifié conforme aux normes DIN ISO 9001 et 13485 pour les dispositifs médicaux



Siège social | Raubling, Allemagne

LEADER TECHNOLOGIQUE

L'innovation constante et la définition de nouvelles normes sont les forces motrices chez Amoena. En étroite collaboration avec les médecins, les points de vente spécialisés et les femmes qui ont subi une chirurgie mammaire, nous développons continuellement de nouvelles technologies pour répondre de façon optimale aux besoins des patientes après une chirurgie du sein.

NOS TECHNOLOGIES



Douce et naturelle grâce à la silicone Intouch

Une formulation spéciale de silicone associée à un film lisse et doux crée une prothèse mammaire aussi naturelle que possible en apparence et en sensation.



Soulagement et confort naturel des prothèses autoadhérentes

Les prothèses mammaires Amoena Contact adhèrent directement à la peau sans additifs. Le silicone de l'Amoena Contact conserve son adhérence avec un entretien approprié tout au long de la durée de vie de la prothèse mammaire.



Apparence et sensation naturelle

Il s'agit de la combinaison de silicone allégée et silicone traditionnelle pour obtenir un résultat qui s'apparente en aspect, en ressenti et en mouvement à la poitrine naturelle. Pour une prothèse mammaire légère avec une sensation ultra douce et un tombé naturel.



Adaptation facile grâce à la technologie de chambre à air innovante

La technologie innovante de la chambre à air permet d'ajuster le volume afin d'obtenir une application au plus près du corps, même sur une paroi thoracique irrégulière, permettant ainsi d'adapter à tout moment la prothèse aux besoins individuels de vos clientes.



Régulation de température de la technologie Comfort+

La technologie Comfort+ assure une régulation de la température constante et douce entre le corps et la prothèse. De cette manière, elle empêche une accumulation de chaleur et de transpiration désagréables sous la prothèse.



Circulation d'air intégrée

Une structure composée de perles tridimensionnelles sur la face interne de la prothèse assure la circulation de l'air et permet à l'humidité de s'évaporer. Ceci a été confirmé par les Laboratoires Hohenstein en Allemagne après des tests intensifs.



red dot winner 2020

Notre toute dernière technologie, la plus innovante (prothèse avec chambre à air) a reçu le Red Dot Award 2020. Le concept Adapt Air a obtenu un prix dans la catégorie Product Design. Élaboré pour offrir le confort le plus élevé possible et une apparence naturelle, ce concept a été particulièrement remarqué. Découvrez nos prothèses mammaires ajustables à la page 38 et les compléments mammaires à la page 58.



Nos prothèses mammaires Adapt Air ont été récompensées par le German Design Award 2021, avec la distinction « Or » pour l'excellence du design produit dans la catégorie « Médecine, rééducation et soins de santé ». Le jury a affirmé que « les prothèses mammaires Adapt Air peuvent être parfaitement ajustées et apportent une apparence naturelle au sein féminin. Une solution qui aide les femmes concernées à vivre une vie quotidienne normale, sans stigmatisation ».

PROTHÈSES MAMMAIRES APRÈS MASTECTOMIE

Nos prothèses mammaires fournissent non seulement un équilibre visuel-poids, mais répondent également aux besoins résultant du traitement et de médicaments pour le lymphœdème, les zones de cicatrice inégales ou sensibles. Les caractéristiques spécifiques du produit permettent à son utilisatrice de poursuivre son mode de vie habituel. Grâce à plus de 45 ans d'expérience, nous savons exactement ce dont les femmes ont besoin après une chirurgie mammaire et comment nous pouvons faciliter la vie quotidienne des ajusteuses

Particulièrement adapté aux femmes avec :	GAMME DE PRODUITS	Prothèses plein poids*	Prothèses allégées**
➤ Zone avec cicatrices inégales ➤ Variations de poids ➤ Swelling due to lymphedema	ADAPT S'adapte à la forme unique de son corps 	  	Adapt Air Light 25 % plus légère Adapt Air Xtra Light 40 % plus légère
➤ Tension dans l'épaule/le cou ➤ Poitrines généreuses ➤ Lymphœdème	CONTACT Adhère directement au corps 	  	Contact Contact Light 25 % plus légère
➤ Bouffées de chaleur dues à la ménopause ou à un médicament ➤ Transpiration intense due au climat ou à l'activité sportive	ENERGY Régulation optimale de la température pour un maximum de confort 	   	Energy Energy Cosmetic 20 % plus légère Energy Light 25 % plus légère
➤ Zone cicatrisée sensible	NATURA Le confort le plus naturel 	  	Natura Natura Cosmetic 20 % plus légère Natura Light 25 % plus légère Natura Xtra Light 40 % plus légère
➤ Simple équilibrage du poids et symétrie	ESSENTIAL Ajustement équilibré et sûr 		Essential Essential Light 25 % plus légère

* Le poids traditionnel correspond à environ 80 à 90 % du sein naturel, se rapprochant le plus du comportement naturel de la poitrine

**Réduction du poids entre 20 % et 40 % particulièrement adaptée pour : Lymphœdème, ostéoporose, tension dans les épaules/le cou, buste large, mobilité limitée des bras et activité sportive.

GAMME DE PROTHÈSES MAMMAIRES

Une gamme variée pour une application plus personnalisée.

			1 Affaissé	2 Moyen	
	Product Line	Poids	Symétrique 1S 1S ^N	Symétrique 2S 2S ^N	Asymétrique 2A
PREMIUM CARE 	ADAPT	Xtra Light 40 % plus légère	Adapt Air Xtra Light 1S^N 328 Tailles 1-14	Adapt Air Xtra Light 2S^N 326 Tailles 1-14	
		Light 25 % plus légère	Adapt Air Light 1S^N 329 Tailles 1-14	Adapt Air Light 2S^N 327 Tailles 1-14	
	CONTACT	Light 25 % plus légère		Contact Light 2S 380C Tailles 1-14	
		Standard	Contact 1S 384C Tailles 1-14	Contact 2S 381C Tailles 1-12	Contact 2A 383C Tailles 0-12 G/D
ADVANCED CARE 	ENERGY	Light 25 % plus légère		Energy Light 2S 342S Tailles 1-14 Foncé 1-14	
		Reduced 20 % plus légère		Energy Cosmetic 2S 310 Tailles 1-14	
		Standard	Energy 1S 349S Tailles 1-12		
	NATURA	Xtra Light 40 % plus légère	Natura Xtra Light 1S^N 401 Tailles 1-14	Natura Xtra Light 2S^N 400 Tailles 1-17 Foncé 1-17	
		Light 25 % plus légère	Natura Light 1S^N 402 Tailles 1-14 Natura Light 1S 664 Tailles 1-14	Natura Light 2S 390 Tailles 1-17 Foncé 3-15	Natura Light 2A 392 Tailles 0-14 G/D
		Reduced 20 % plus légère		Natura Cosmetic 2S^N 323 Tailles 1-14 Natura Cosmetic 2S 320 Tailles 1-14	
		Standard	Natura 1S 396 Tailles 1-14		
	ESSENTIAL	Light 25 % plus légère	Essential Light 1S^N 314 Tailles 1-14 Foncé 1-14	Essential Light 2S 442 Tailles 1-17 Foncé 3-17	Essential Light 2A 356 Tailles 0-14 G/D
		Standard	Essential 1S 630 Tailles 1-12		Essential 2A 353 Tailles 0-12 G/D

Comment trouver la bonne prothèse mammaire ?

Avant de sélectionner une prothèse, mesurez la cliente pour un soutien-gorge, ensuite optez pour la prothèse avec les caractéristiques appropriées qui répondront le mieux à ses besoins spécifiques. Prenez en considération son style de vie, son niveau d'activité et tout autre enjeu comme la sensibilité de la peau, cicatrisation des tissus ou la posture lorsque vous décidez de la prothèse à recommander. Pour déterminer le soutien-gorge et la taille de la prothèse adéquats, référez-vous au tableau des tailles de prothèses à l'endos de ce catalogue.

		 3 Fort		
Extra 2E	Universel 2U	Symétrique 3S	Asymétrique 3A	Extra 3E
			Adapt Light 3A 376 Tailles 4-12 G/D	
		Contact Light 3S 385C Tailles 0-10		
		Contact 3S 382C Tailles 0-10 Foncé 1-10		Contact 3E 386C Tailles 1-14 G/D
Energy Light 2U 341S Tailles 1-14				
	Energy Cosmetic 3S 311 Tailles 1-12			
Energy 2U 347S Tailles 1-14				
Natura Light 2U 399 Tailles 1-14	Natura Light 3S 391 Tailles 0-12	Natura Light 3A 373N Tailles 4-12 G/D Foncé 4-12 G/D		
			Natura Cosmetic 3E 322 Tailles 1-14 G/D	
Natura 2U 394 Tailles 1-14			Natura 3E 397 Tailles 1-14 G/D	
			Essential Light 3E 556 Tailles 1-14 G/D Foncé 4-14 G/D	
Essential 2E 474 Tailles 0-12 Foncé 3-12	Essential 3S 363 Tailles 0-12			


BONNETS

Afin de trouver la bonne prothèse mammaire, Amoena propose trois galbes de bonnet différents :


- 1 = Affaisé
- 2 = Moyen
- 3 = Fort

Un bonnet peu profond ne signifie pas automatiquement poitrine menue. De profil, le haut de la poitrine peut être assez plat, mais le volume du bonnet se trouve dans le tiers inférieur. Cela peut également se produire, par exemple, en avançant en âge.


1 Bonnet Affaisé

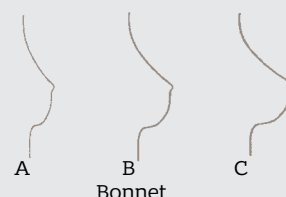

2 Bonnet Moyen

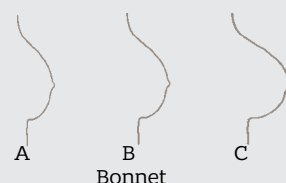

3 Bonnet Fort

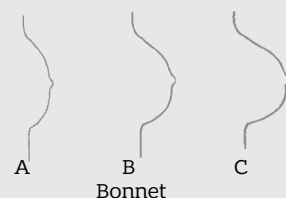


Les exemples sont donnés pour les bonnets A à C. Ils sont également disponibles pour les bonnets D à G.

Avis
d'une PRO

La meilleure façon d'évaluer le galbe du bonnet est de regarder le sein dans un soutien-gorge bien ajusté. Les femmes avec un petit tour de buste ont tendance à avoir un galbe plus profond alors que celles avec un tour de buste plus important ont tendance à avoir un galbe peu profond.

S'adapte à la forme unique de son corps

Prothèses mammaires Adapt Air à 3 épaisseurs

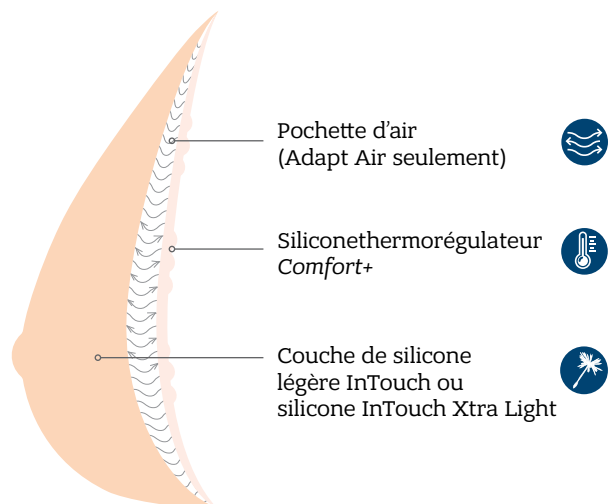

Avis
d'une PRO

Les prothèses mammaires Adapt Air réduisent le temps dans la cabine d'essayage et sont idéales lors d'essayage à distance et virtuel.

La technologie avec pochette d'air fait de cette prothèse, la prothèse en vente libre la plus polyvalente.

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES

- S'ajuste à chacune**
 La pochette d'air intégrée de l'Adapt Air permet un ajustement sur mesure, simplement en ajoutant ou en libérant de l'air avec la pompe incluse
- Ajustement personnalisé**
 Son volume est ajustable et personnalisable, ce qui fait que la prothèse Adapt Air épouse la forme du corps et du soutien-gorge – pour une silhouette symétrique 360 – en regardant vers le bas ou dans le miroir
- Ajustement près du corps**
 La prothèse épouse confortablement les contours de chaque poitrine pour un ajustement sur mesure, près du corps
- Confortable toute la journée**
 La technologie thermorégulatrice brevetée Comfort+ offre un confort qui dure toute la journée et maintient une température corporelle idéale
- Plus légère**
 La silicone légère InTouch et la pochette d'air rendent certaines prothèses jusqu'à 40 % plus légère*

Particulièrement adapté pour les femmes ayant :

- Zone avec cicatrices inégales
- Variations de poids
- Enflure dû à lymphoedème

Options plus légères

Porter des prothèses mammaires plus légères allège la pression sur les épaules. Particulièrement adaptées pour les femmes ayant de lymphoedème, ostéoporose, tension chronique aux niveaux des épaules et cou, poitrines fortes, et styles de vie actifs.

40 % plus légère / 25 % plus légère

Profil de Bonnets	1 Affaîsé	2 Moyen				3 Fort		
Forme	Symétrique 1S 1S ^N	Symétrique 2S 2S ^N	Asymétrique 2A	Extra Universel 2E 2U	Symétrique 3S	Asymétrique 3A	Extra 3E	
40 % plus légère	Adapt Air Xtra Light 1S ^N 328 Tailles 1-14	Adapt Air Xtra Light 2S ^N 326 Tailles 1-14						
25 % plus légère	Adapt Air Light 1S ^N 329 Tailles 1-14	Adapt Air Light 2S ^N 327 Tailles 1-14				Adapt Light 3A 376 Tailles 4-12 G/D		

* En comparant aux prothèses régulières en silicone de même taille et de même forme.

LA PROTHÈSE MAMMAIRE EN VENTE LIBRE LA PLUS POLYVALENTE

Adaptable à chaque morphologie et style de vie



LE PREMIER CHOIX DES AJUSTEUSES

« Un simple chose ayant une grande efficacité. Je peux offrir plus de choix de soutien-gorges à mes clientes et simplement peaufiner l'ajustement. »

Réaction au Sondage des Ajusteuses



HAUTEMENT APPRÉCIÉE DES UTILISATRICES

« La prothèse mammaire la plus confortable que j'ai portée. »

Susann, survivante du cancer du sein



reddot winner 2020

La gamme de produits Adapt Air a reçu le Red Dot Award 2020.

Le concept Adapt Air a obtenu un prix dans la catégorie Product Design.

Élaboré pour offrir le confort le plus élevé possible et une apparence naturelle, ce concept a été particulièrement remarqué.



Nos prothèses mammaires Adapt Air ont été récompensées par le German Design Award 2021, avec la distinction

« Or » pour l'excellence du design produit dans la catégorie « Médecine, rééducation et soins de santé ».

Le jury a affirmé que « les prothèses mammaires Adapt Air peuvent être parfaitement ajustées et apportent une apparence naturelle au sein féminin.

Une solution qui aide les femmes concernées à vivre une vie quotidienne normale, sans stigmatisation ».

GAMME AMOENA ADAPT



comfort+

Adapt Air Xtra Light 1SN 328*

Taille	1-14
Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	40 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Forme moderne 1SN avec empreinte ronde et plus de volume dans la partie inférieure, pour un drapage naturel
- Une plus petite taille et design plus mince permettent une transition en douceur entre la prothèse et la poitrine




comfort+

Adapt Air Xtra Light 2SN 326*

Taille	1-14
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	40 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Forme moderne 2SN avec empreinte ronde étroite qui s'ajuste plus confortablement dans la pochette du soutien-gorge et élimine le chevauchement avec le sein naturel

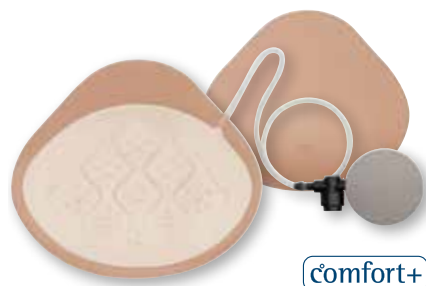

comfort+

Adapt Air Light 1SN 329*

Taille	1-14
Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Forme moderne 1SN avec empreinte ronde et plus de volume dans la partie inférieure, pour un drapage naturel
- Une plus petite taille et design plus mince permettent une transition en douceur entre la prothèse et la poitrine



comfort+

Adapt Air Light 2SN 327*

Taille	1-14
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Forme moderne 2SN avec empreinte ronde étroite qui s'ajuste plus confortablement dans la pochette du soutien-gorge et élimine le chevauchement avec le sein naturel



comfort+

Adapt Light 3A 376**

Tailles	4-12 G/D
Profil de Bonnets	Fort
Forme	Asymétrique
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Forme asymétrique qui compense pour le tissu manquant sous le bras (recommandé spécialement après une mastectomie radicale)
- Une couche arrière malléable s'adapte à la paroi inégale de la poitrine



Adapt Air Pump 070


Pompe de rechange

Note : Une pompe est incluse avec chaque prothèse mammaire Adapt Air.


* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire.

** Sans pochette d'air intégrée


COMMENT UTILISER ADAPT AIR

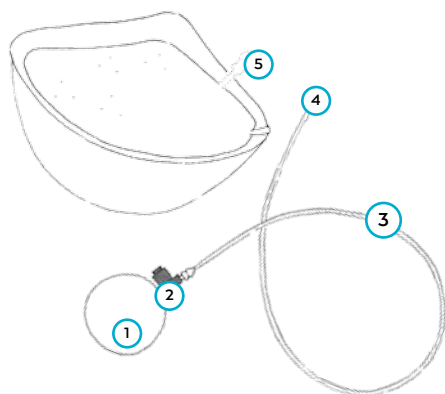

1. **Balle de la pompe**
2. **Valve de drainage**
3. **Tube**
4. **Canule**
5. **Orifice de la valve**

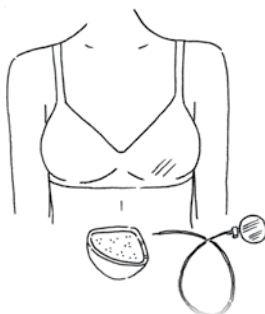


- 1 Placez la prothèse mammaire et la pompe séparément, devant vous.

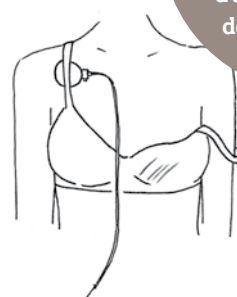


- 2 Placez la pompe sous la bretelle du soutien-gorge située du côté opposé, afin que vos deux mains demeurent libres. Faire glisser la bretelle du soutien-gorge située du côté de la prothèse.


Une fois le volume désiré, l'air reste enfermé dans la prothèse jusqu'à ce que vous décidiez d'ajouter ou retirer de l'air au besoin.

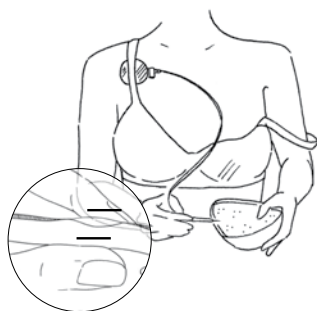


- 3 Connectez la pompe en insérant la canule (tube) dans la valve d'ouverture située sur le côté de la prothèse mammaire. Ouvrir la valve en la serrant légèrement entre le pouce et l'index. Assurez-vous que la canule est **bien insérée** dans la valve.

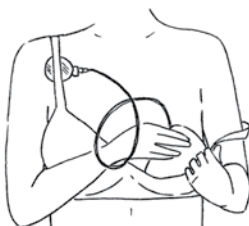


- 4 Une fois la canule solidement raccordée à la prothèse, insérez la prothèse mammaire dans le bonnet du soutien-gorge.

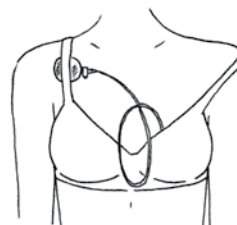

- 5 Repositionnez correctement la bretelle.

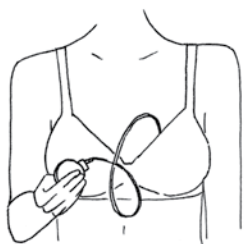

- 6 Ajustez le volume de la prothèse en pompant la poire de la pompe. Pour évacuer de l'air, appuyez sur le bouton noir du drain et appuyez doucement sur la prothèse mammaire; ajuster selon le besoin.

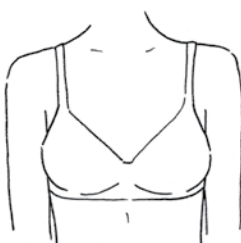

- 7 Une fois l'ajustement terminé, retirez soigneusement la canule de la valve. L'air restera dans la prothèse.




- 8 La prothèse est maintenant ajustée sur mesure. Sortez la prothèse du bonnet et insérez-la dans la pochette du soutien-gorge.

Prenez note :

Si vous désirez ajouter ou libérer de l'air, la canule doit être insérée complètement dans la valve.

Adhère directement au corps

Prothèses mammaires Contact à 3 épaisseurs

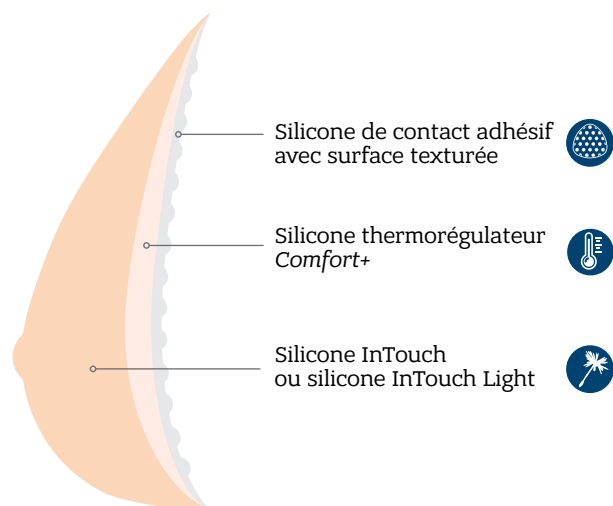

Avis d'une PRO

Chaque prothèse mammaire Contact est emballée avec un échantillon du Nettoyant Doux et une Brosse Souple Amoena (vendus séparément, voir page 53).

La durée du temps d'adhésion varie pour chaque femme et dépend de l'entretien de la prothèse. Un entretien minutieux et régulier est essentiel.

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES

- **Adhère directement à la peau**
La prothèse bouge avec le corps. Reste bien en place lors de chaque mouvement
- **Soulage la pression au niveau des épaules**
Lorsque l'on porte la prothèse mammaire fixée, cela soulage la pression au niveau des épaules et procure un sentiment de légèreté
- **Facile à porter et à entretenir**
Un simple entretien et nettoyage quotidien assure une meilleure adhésion; Contact permet une liberté de choix des vêtements comme ceux ayant un décolleté plus bas
- **La sensation de faire partie du corps**
Vu que la prothèse est fixée, la cliente peut ressentir qu'elle fait partie intégrante de son corps et se sentir plus confiante et sûre de son apparence

Particulièrement adapté pour les femmes ayant :*

- Tension chronique dans l'épaule/le cou
- Poitrines généreuses
- Lymphœdème

Options plus légères


Porter des prothèses mammaires plus légères allège la pression sur les épaules. Particulièrement adaptées pour les femmes ayant de lymphœdème, ostéoporose, tension chronique aux niveaux des épaules et cou, poitrines fortes, et styles de vie actifs.

25 % plus légère

Profil de Bonnets	1 Affaissé	2 Moyen			3 Fort		
Forme	Symétrique 1S 1S ^N	Symétrique 2S 2S ^N	Asymétrique 2A	Extra Universel	Symétrique 3S	Asymétrique 3A	Extra 3E
25 % plus légère		Contact Light 2S 380C Tailles 1-14			Contact Light 3S 385C Tailles 0-10		
Standard	Contact 1S 384C Tailles 1-14	Contact 2S 381C Tailles 1-12	Contact 2A 383C Tailles 0-12 G/D		Contact 3S 382C Tailles 0-10 Foncé 1-10		Contact 3E 386C Tailles 1-14 G/D

*Lorsque l'on porte la prothèse mammaire fixée, cela soulage la pression au niveau des épaules et procure un sentiment de légèreté

GAMME AMOENA CONTACT

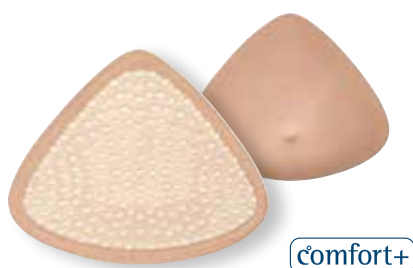

comfort+

Contact Light 2S 380C*

Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère



comfort+

Contact Light 3S 385C*


Tailles	0-10
Profil de Bonnets	Fort
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère



comfort+

Contact 1S 384C

Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	Standard

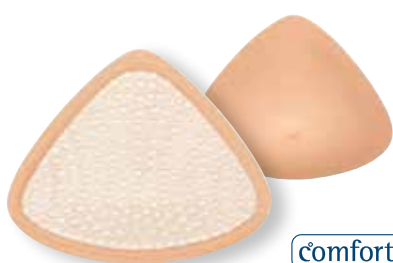

comfort+

Contact 2S 381C

Tailles	1-12
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	Standard

- Forme asymétrique qui compense pour le tissu manquant sous le bras (recommandé spécialement après une mastectomie radicale)



comfort+

Contact 2A 383C


Tailles	0-12 G/D
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Asymétrique
Couches	3 Couches
Poids	Standard



comfort+

Contact 3S 382C

Tailles	0-10
Foncé Tailles	1-10
Profil de Bonnets	Fort
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	Standard

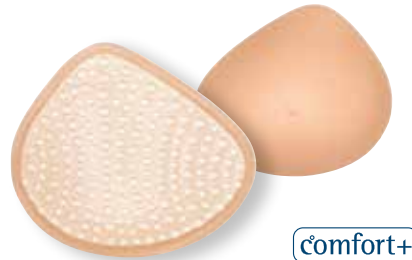

comfort+

Contact 3E 386C

Tailles	1-14 G/D
Profil de Bonnets	Fort
Forme	Extra
Couches	3 Couches
Poids	Standard

Caractéristiques spéciales :

- Forme asymétrique qui compense pour le tissu manquant sous le bras (recommandé spécialement après une mastectomie radicale)
- Recommandé pour les femmes larges sous la poitrine
- Taille 0 disponible pour les petits bustes

Caractéristiques spéciales :

- Taille 0 en Ivoire disponible pour les petits bustes

Caractéristiques spéciales :


- Prolongement vers le sternum qui fonctionne bien pour les décolletés plus profond
- Forme asymétrique idéale pour mastectomies bilatérales
- Recommandé pour les femmes menues sous la poitrine avec un bonnet fort

* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire. ● Disponible en Foncé

COMMENT UTILISER AMOENA CONTACT

APPLICATION

La paroi thoracique doit être parfaitement nettoyée. Ensuite, assurez-vous que la zone est parfaitement sèche. Plus la peau est propre et sèche, mieux la prothèse mammaire adhèrera. Veuillez ne pas toucher la surface adhésive de la prothèse, car cela pourrait nuire à son adhérence.

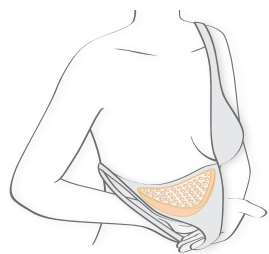


1 Faites glisser votre bretelle de soutien-gorge par-dessus votre épaule et passez-y votre bras. Penchez-vous vers l'avant

2 En utilisant votre main du côté non opéré, saisissez la bretelle et éloignez le bonnet de votre corps.

3 Prenez la prothèse de l'autre main et tout en étant penchée vers l'avant, placez-la dans le bonnet de votre soutien-gorge. Assurez-vous que la prothèse est parfaitement positionnée dans le bonnet.

4 Le côté le plus effilé de la prothèse doit être placé vers le haut du bonnet, où s'attache la bretelle.

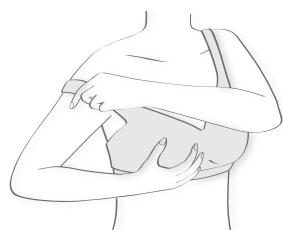


5 Placez votre main libre à l'extérieur du bonnet. Relevez-vous lentement en appuyant soigneusement la prothèse en place contre votre corps.

6 Tirez la bretelle du soutien-gorge par-dessus votre épaule et appuyez à nouveau sur la prothèse pour vous assurer qu'elle est solidement fixée.

7 Vérifiez l'ajustement. Si la position de la prothèse doit être ajustée, il suffit de la retirer et de la repositionner.

RETRAIT DE LA PROTHÈSE AMOENA CONTACT

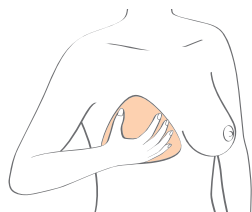

1 Saisissez la prothèse avec une main et penchez-vous vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez le poids de la prothèse dans votre main.


2 À partir du point le plus éloigné de la zone de la cicatrice, tirez délicatement sur la prothèse.

3 Si la surface adhésive de la prothèse Amoena Contact se colle accidentellement sur elle-même lors du retrait, elle peut être séparée en la tenant sous l'eau courante.



Note : Le bout des doigts doit être placé aussi près que possible du bord de la prothèse, et non directement sur la couche adhésive arrière. Veuillez faire preuve de prudence si vous avez de longs ongles. Ils peuvent endommager la pellicule externe.


NETTOYAGE DE LA PROTHÈSE AMOENA CONTACT

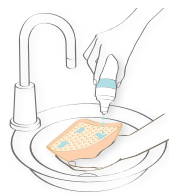


1 Déposez trois gouttes du nettoyant Soft Cleanser sur la surface adhésive sèche puis mouillez la brosse spéciale avec de l'eau tiède.



2 Frottez fermement la surface adhésive avec la brosse pendant environ trois minutes, en effectuant des mouvements circulaires.

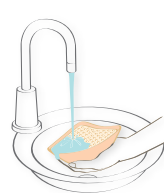


3 Rincez abondamment à l'eau tiède.

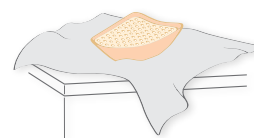


4 Laissez sécher à l'air.

Thermorégulation novatrice pour un maximum de confort

Prothèse mammaire Energy à 3 épaisseurs

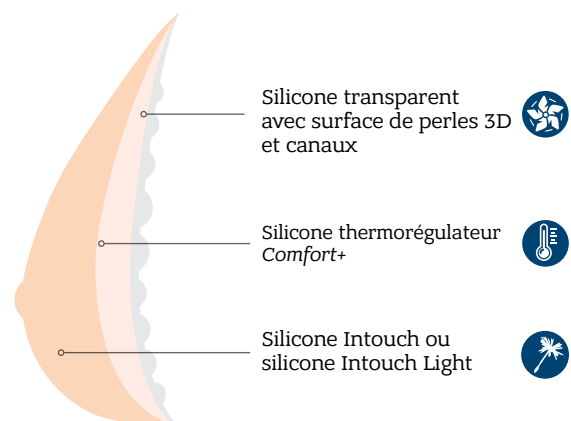

Prothèse mammaire Energy Cosmetic à 3 épaisseurs

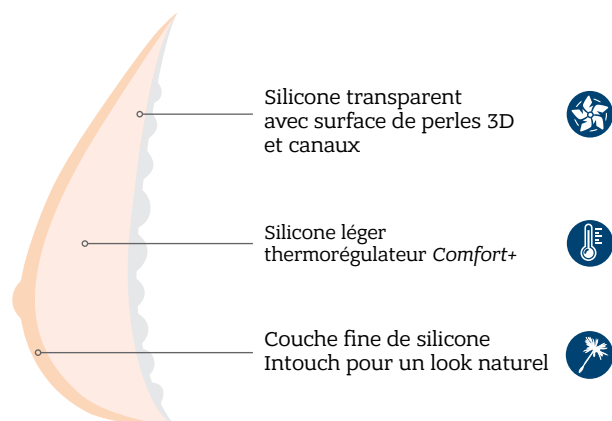

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES

- **Circulation d'air optimale**
La face interne à perles tridimensionnelles permet à l'air de circuler librement derrière la prothèse mammaire, augmentant la ventilation et l'évaporation d'humidité
- **Régulation maximale de la température**
Les 30 % de thermorégulation *Comfort+* en plus réduisent la transpiration pour un confort optimal toute la journée

Particulièrement adapté pour les femmes ayant :

- Transpiration intense liées aux bouffées de chaleur en raison de la ménopause ou d'un médicament
- Transpiration intense due au climat ou à l'activité sportive


Options plus légères

Porter des prothèses mammaires plus légères allège la pression sur les épaules. Particulièrement adaptées pour les femmes ayant de lymphoedème, ostéoporose, tension chronique aux niveaux des épaules et cou, poitrines fortes, et styles de vie actifs.

25 % plus légère / 20 % plus légère

Profil de Bonnets	1 Affaissé	2 Moyen				3 Fort	
Forme	Symétrique 1S 1S ^N	Symétrique 2S 2S ^N	Asymétrique 2A	Extra Universel 2E 2U	Symétrique 3S	Asymétrique 3A	Extra 3E
25 % plus légère		Energy Light 2S 342S Tailles 1-14 Foncé 1-14		Energy Light 2U 341S Tailles 1-14			
20 % plus légère		Energy Cosmetic 2S 310 Tailles 1-14			Energy Cosmetic 3S 311 Tailles 1-12		
Standard	Energy 1S 349S Tailles 1-12			Energy 2U 347S Tailles 1-14			

GAMME AMOENA ENERGY

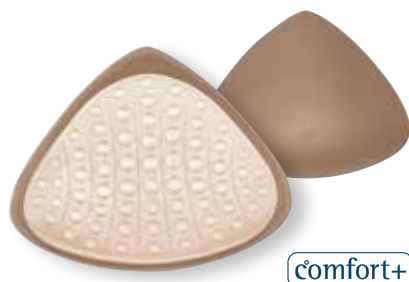

comfort+

Energy Light 2S 342S*

Tailles	1-14
Foncé Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère




comfort+

Energy Light 2U 341S*

Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Universel
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Une alternative au style asymétrique avec des options de port plus polyvalentes et un prolongement plus court vers l'axillaire. Offre la possibilité de compenser le tissu manquant même dans la partie supérieure du bonnet

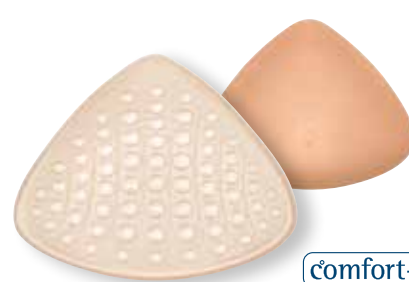


comfort+

Energy Cosmetic 2S 310

Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	20 % plus légère

Caractéristiques spéciales :


- La prothèse mammaire légère avec ventilation ayant l'apparence la plus naturelle – drapage doux et presque invisible dans le bonnet du soutien-gorge

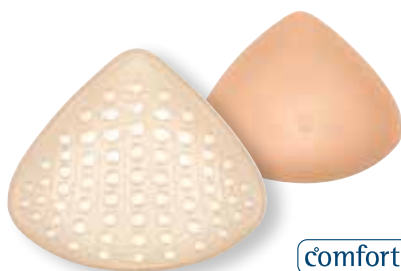

comfort+

Energy Cosmetic 3S 311


Profil de Bonnets	Fort
Forme	Symétrique
Poids	Reduced
Couches	3 Couches
Tailles	1-12

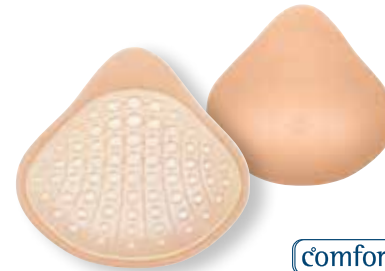

comfort+

Energy 1S 349S

Tailles	1-12
Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	Standard

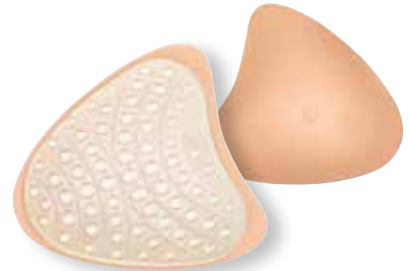


Energy 2U 347S

Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Universel
Couches	3 Couches
Poids	Standard

Available while stock lasts.

Caractéristiques spéciales :

- Une alternative au style asymétrique avec des options de port plus polyvalentes et un prolongement plus court vers l'axillaire. Offre la possibilité de compenser le tissu manquant même dans la partie supérieure du bonnet

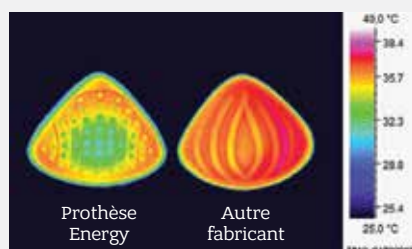


Après 30 minutes d'activité physique, Amoena Energy rééquilibre la température corporelle de manière optimale.

La caméra imagerie thermique démontre que les prothèses Amoena Energy demeurent plus fraîches dû au haut pourcentage de silicone Comfort+ et l'unique surface tridimensionnelle perlée. Il a été prouvé que la disposition spéciale des perles éloigne 25 fois plus de chaleur du corps que les autres prothèses mammaires.


* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire. ● Disponible en Foncé

L'apparence et la sensation les plus naturelles


Prothèse mammaire Natura à 2 épaisseurs

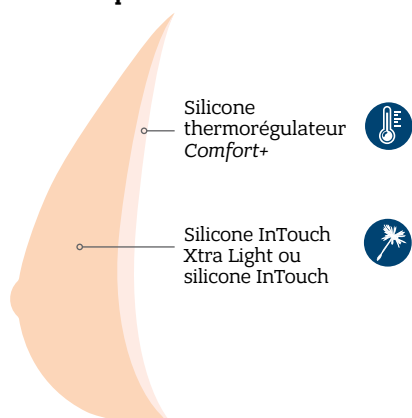

Prothèse mammaire Natura à 3 épaisseurs

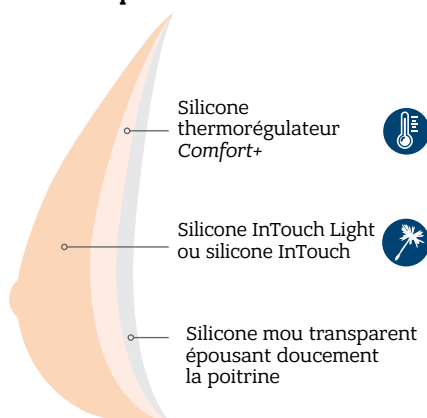

Prothèse mammaire Natura Cosmetic à 3 épaisseurs

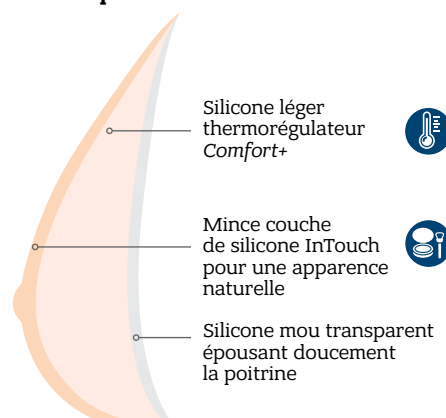

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES

- **Doux sur la poitrine sensible**
La plupart des modèles sont dotés d'une face interne soulageant la pression. Le gel en silicone transparent épouse le corps et est très doux pour les zones cicatricielles sensibles
- **Aspect et mouvement naturels**
Les modèles sélectionnés ont une face externe très souple pour que la prothèse mammaire ait le tombé d'un sein naturel, suive naturellement les mouvements du corps et s'aplatisse en position allongée
- **Confortable toute la journée**
La technologie thermorégulatrice brevetée *Comfort+* offre un confort tout au long de la journée et maintient la température corporelle idéale de la femme

Particulièrement adapté pour les femmes ayant :

- Zones de cicatrisation sensibles
- Tissu mammaire très souple


Options plus légères

Porter des prothèses mammaires plus légères allège la pression sur les épaules. Particulièrement adaptées pour les femmes ayant de lymphoedème, ostéoporose, tension chronique aux niveaux des épaules et cou, poitrines fortes, et styles de vie actifs.

40 % plus légère / 25 % plus légère / 20 % plus légère

Profil de Bonnets	1 Affaîssé	2 Moyen				3 Fort		
Forme	Symétrique 1S 1S ^N	Symétrique 2S 2S ^N	Asymétrique 2A	Extra Universel 2E 2U	Symétrique 3S	Asymétrique 3A	Extra 3E	
40 % plus légère	Natura Xtra Light 1S ^N 401 Tailles 1-14	Natura Xtra Light 2S ^N 400 Tailles 1-17 Foncé 1-17						
25 % plus légère	Natura Light 1S ^N 402 Tailles 1-14 Natura Light 1S 664 Tailles 1-14	Natura Light 2S 390 Tailles 1-17 Foncé 3-15	Natura Light 2A 392 Tailles 0-14 G/D	Natura Light 2U 399 Tailles 1-14	Natura Light 3S 391 Tailles 0-12	Natura Light 3A 373N Tailles 4-12 G/D Foncé 4-12 G/D		
20 % plus légère		Natura Cosmetic 2S ^N 323 Tailles 1-14 Natura Cosmetic 2S 320 Tailles 1-14					Natura Cosmetic 3E 322 Tailles 1-14 G/D	
Standard	Natura 1S 396 Tailles 1-14			Natura 2U 394 Tailles 1-14			Natura 3E 397 Tailles 1-14 G/D	

GAMME AMOENA NATURA

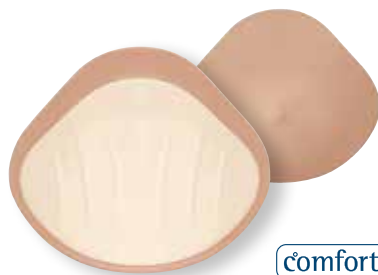

Natura Xtra Light 1SN 401*

Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Couches	2 Couches
Poids	40 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Forme moderne 1SN avec empreinte ronde et plus de volume dans la partie inférieure, pour un drapage naturel
- Une plus petite taille et design plus mince permettent une transition en douceur entre la prothèse et la paroi de la poitrine
- Design anatomique et canaux étroits à l'endos permettant à la prothèse d'épouser étroitement la poitrine



Natura Xtra Light 2SN 400*

Tailles	1-17
Foncé Tailles	1-17
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Couches	2 Couches
Poids	40 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Forme moderne 2SN avec empreinte ronde étroite qui s'ajuste plus confortablement dans la pochette du soutien-gorge et élimine le chevauchement avec le sein naturel
- Design anatomique et canaux étroits à l'endos permettant à la prothèse d'épouser étroitement la poitrine



Natura Light 1SN 402*

GEL
ARRIÈRE

Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Endos de silicone clair et doux épouse le corps et est extra doux pour les zones cicatrisées sensibles
- Forme moderne 1SN avec empreinte ronde et plus de volume dans la partie inférieure, pour un drapage naturel
- Une plus petite taille et design plus mince permettent une transition en douceur entre la prothèse et la paroi de la poitrine



Natura Light 1S 664*

GEL
ARRIÈRE

Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Endos de silicone clair et doux épouse le corps et est extra doux pour les zones cicatrisées sensibles



Natura Light 2S 390*

GEL
ARRIÈRE

Tailles	1-17
Foncé Tailles	3-15
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Endos de silicone clair et doux épouse le corps et est extra doux pour les zones cicatrisées sensibles



Natura Light 2A 392*

GEL
ARRIÈRE

Tailles	0-14 G/D
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Asymétrique
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Forme asymétrique qui compense pour le tissu manquant sous le bras (recommandé spécialement après une mastectomie radicale)
- Recommandé pour les femmes larges sous la poitrine
- Endos de silicone clair et doux épouse le corps et est extra doux pour les zones cicatrisées sensibles

* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire. ● Disponible en Foncé



comfort+

Natura Light 2U 399*GEL
ARRIÈRE

Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Universel
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère

Available while stock lasts.

Caractéristiques spéciales :

- Endos de silicone clair et doux épouse le corps et est extra doux pour les zones cicatrisées sensibles



comfort+

Natura Light 3S 391*GEL
ARRIÈRE

Tailles	0-12
Profil de Bonnets	Fort
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Endos de silicone clair et doux épouse le corps et est extra doux pour les zones cicatrisées sensibles



comfort+

Natura Light 3A 373N*GEL
ARRIÈRE

Tailles	4-12 G/D
Foncé Tailles	4-12 G/D
Profil de Bonnets	Fort
Forme	Asymétrique
Couches	3 Couches
Poids	25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Forme asymétrique qui compense pour le tissu manquant sous le bras (recommandé spécialement après une mastectomie radicale)
- Recommandé pour les femmes larges sous la poitrine
- Endos de silicone clair et doux épouse le corps et est extra doux pour les zones cicatrisées sensibles



comfort+

Natura Cosmetic 2SN 323GEL
ARRIÈRE

Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	20 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- La prothèse mammaire légère ayant l'apparence la plus naturelle – drapage doux et presque invisible dans le bonnet du soutien-gorge
- Forme moderne 2SN avec empreinte ronde étroite qui s'ajuste plus confortablement dans la pochette du soutien-gorge et élimine le chevauchement avec le sein naturel
- Endos de silicone clair et doux épouse le corps et est extra doux pour les zones cicatrisées sensibles




comfort+

Natura Cosmetic 2S 320GEL
ARRIÈRE

Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Couches	3 Couches
Poids	20 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- La prothèse mammaire légère ayant l'apparence la plus naturelle – drapage doux et presque invisible dans le bonnet du soutien-gorge
- Endos de silicone clair et doux épouse le corps et est extra doux pour les zones cicatrisées sensibles

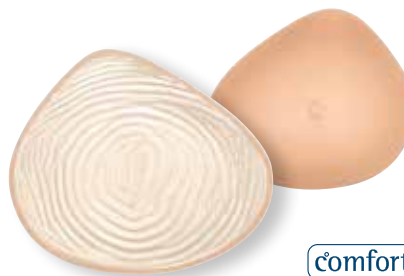

comfort+

Natura Cosmetic 3E 322GEL
ARRIÈRE

Tailles	1-14 G/D
Profil de Bonnets	Fort
Forme	Extra
Couches	3 Couches
Poids	20 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Prolongement vers le sternum qui fonctionne bien pour les décolletés plus profond
- Recommandé pour les femmes menues sous la poitrine avec un bonnet fort
- Endos de silicone clair et doux épouse le corps et est extra doux pour les zones cicatrisées sensibles

GAMME AMOENA NATURA



comfort+

Natura 1S 396

Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Couches	2 Couches
Poids	Standard

Caractéristiques spéciales :

- Forme ayant 2 épaisseurs avec une couche avant douce pour un drapage très naturel
- Particulièrement adapté pour les femmes unilatérales avec un tissu mammaire très tendre



comfort+

Natura 2U 394

GEL
ARRIÈRE

Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Universel
Couches	3 Couches
Poids	Standard

Jusqu'à épuisement des stocks.

Caractéristiques spéciales :

- Forme ayant 2 épaisseurs avec une couche avant douce pour un drapage très naturel
- Particulièrement adapté pour les femmes unilatérales avec un tissu mammaire très tendre



comfort+

Natura 3E 397


Tailles	1-14 G/D
Profil de Bonnets	Fort
Forme	Extra
Couches	2 Couches
Poids	Standard

Caractéristiques spéciales :

- Prolongement vers le sternum qui fonctionne bien pour les décolletés plus profond
- Recommandé pour les femmes menues sous la poitrine avec un bonnet fort
- Particulièrement adapté pour les femmes unilatérales avec un tissu mammaire très tendre

Ajustement équilibré et sûr

Prothèse mammaire Essential à 1 épaisseur

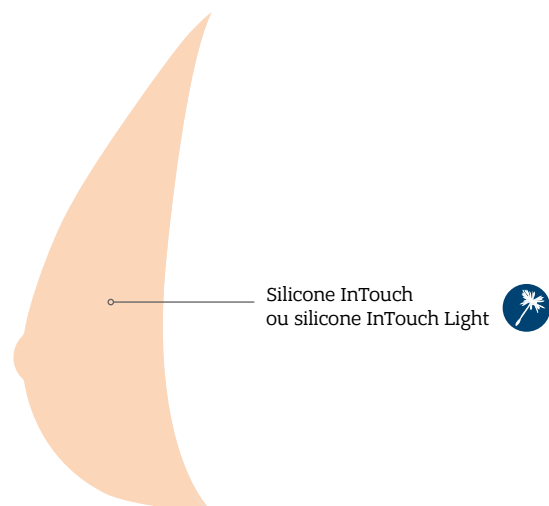

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES

- **Pour les besoins essentiels quotidiens**
Prothèse mammaire de haute qualité conçue pour répondre aux besoins essentiels quotidiens suivant une chirurgie mammaire
- **Apparence symétrique**
Fournit le confort nécessaire pour une apparence naturelle et équilibrée

Particulièrement adapté pour les femmes ayant :

- Un simple besoin de compensation et d'apparence équilibrée suivant une mastectomie

Options plus légères

Porter des prothèses mammaires plus légères allège la pression sur les épaules. Particulièrement adaptées pour les femmes ayant de lymphoedème, ostéoporose, tension chronique aux niveaux des épaules et cou, poitrines fortes, et styles de vie actifs.

25 % plus légère

Profil de Bonnets	1 Affaissé	2 Moyen				3 Fort	
Forme	Symétrique 1S 1S ^N	Symétrique 2S 2S ^N	Asymétrique 2A	Extra Universel 2E 2U	Symétrique 3S	Asymétrique 3A	Extra 3E
25 % plus légère	Essential Light 1S^N 314 Tailles 1-14 Foncé 1-14	Essential Light 2S 442 Tailles 1-17 Foncé 3-17	Essential Light 2A 356 Tailles 0-14 G/D				Essential Light 3E 556 Tailles 1-14 G/D Foncé 4-14 G/D
Standard	Essential 1S 630 Tailles 1-12		Essential 2A 353 Tailles 0-12 G/D	Essential 2E 474 Tailles 0-12 Foncé 3-12	Essential 3S 363 Tailles 0-12		

GAMME AMOENA ESSENTIAL



Essential Light 1S^N 314*

Tailles	1-14
Foncé Tailles	1-14
Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Couches	1 layer
Poids	25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Forme moderne 1S^N avec empreinte ronde et plus de volume dans la partie inférieure, pour un drapage naturel
- Une plus petite taille et design plus mince permettent une transition en douceur entre la prothèse et la paroi de la poitrine



Essential Light 2S 442*

Tailles	1-17
Foncé Tailles	3-17
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Couches	1 layer
Poids	25 % plus légère



Essential Light 2A 356*

Tailles	0-14 G/D
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Asymétrique
Couches	1 layer
Poids	25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Forme asymétrique qui compense pour le tissu manquant sous le bras (recommandé spécialement après une mastectomie radicale)
- Recommandé pour les femmes larges sous la poitrine
- Taille 0 disponible pour les petits bustes



Essential Light 3E 556*

Tailles	1-14 G/D
Foncé Tailles	4-14 G/D
Profil de Bonnets	Fort
Forme	Extra
Couches	1 layer
Poids	25 % plus légère

Caractéristiques spéciales :

- Prolongement vers le sternum qui fonctionne bien pour les décolletés plus profond
- Recommandé pour les femmes menues sous la poitrine avec un bonnet fort



Essential 1S 630

Tailles	1-12
Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Couches	1 layer
Poids	Standard



Essential 2A 353

Tailles	0-12 G/D
Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Asymétrique
Couches	1 layer
Poids	Standard

Caractéristiques spéciales :

- Forme asymétrique qui compense pour le tissu manquant sous le bras (recommandé spécialement après une mastectomie radicale)
- Recommandé pour les femmes larges sous la poitrine
- Taille 0 disponible pour les petits bustes

Essential 2E 474

Tailles	0-12
Foncé Tailles	3-12
Profil de Bonnets	Extra
Forme	Symétrique
Couches	1 layer
Poids	Standard

Caractéristiques spéciales :

- Peut être porté à gauche ou droite, avec un prolongement vers le sternum ou l'aisselle
- Taille 0 disponible pour les petits bustes

Essential 3S 363

Tailles	0-12
Profil de Bonnets	Fort
Forme	Symétrique
Couches	1 layer
Poids	Standard

● Disponible en Foncé

* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire.

AUTRES PROTHÈSES MAMMAIRES



PROTHÈSE DE Baignade Aqua Wave

Style 149
Tailles 1-14

- Prothèse en silicone transparente, à la forme unique, pour vos activités aquatiques
- Cette prothèse symétrique présente des ondulations à l'arrière pour permettre à l'air et à l'eau de circuler, afin de prévenir l'effet de succion
- Offre un profil de bonnet affaissé ou moyen
- Livrée dans un sac à cordon mode et étanche, assez grand pour contenir un maillot de bain humide

Sac de Baignade Aqua Wave aussi vendu séparément, style #049



PROTHÈSE DE LOISIR EN MOUSE CALBRÉE

Style 132N
Tailles 3-14

Composition

Mousse calbrée : 30 % Polyuréthane,
70 % Baryum Sulfate (7727-43-7)

Couverture : 82 % Nylon, 18 % Spandex

- La mousse de polyuréthane est légèrement lestée avec du sulfate de baryum (7727-43-7), un minéral naturel sous forme de poudre
- Le revêtement en tissu ultradoux amovible et lavable aide à maintenir un environnement propre
- Prothèse idéale pour dormir



Une forme postopératoire ne remplace pas une prothèse mammaire en silicone, qui elle, est conçue pour un usage quotidien à long terme et qui procure à votre corps l'équilibre approprié

ENTRETIEN DES PROTHÈSES

SANS
ALUMINIUM



AMOENA NETTOYANT DOUX ET BROsse SOUPLE

- Le nettoyant doux Amoena est spécialement formulé pour les produits Amoena avec la surface adhésive : Contact, Balance Contact, CuraScar Silicone, Mamelons adhésifs
- Ne contient aucune substance à base d'huile
- Pour une meilleure adhésion, utilisez le nettoyant doux Amoena quotidiennement, avec la Brosse Souple, si désiré
- Aussi approprié pour nettoyer les prothèses non-adhésives et compléments dans le cadre d'un nettoyage régulier

Style 08703
Taille 150 ml

La brosse est développée spécifiquement pour les prothèses Amoena Contact et elle présente des poils ronds et soyeux qui n'endommagent pas la surface adhésive.

Style 08903 / 1 pièce

COMPLÉMENTS MAMMAIRES — RÉTABLIR LA SYMÉTRIE

De nos jours, 70-80 % des cas de cancer sont traités avec une thérapie de conservation du sein. La tumeur est retirée de manière à préserver le plus de tissu mammaire possible.

Les femmes souffriront d'asymétrie mammaire après leur traitement et guérison. C'est désagréable – physiquement et émotionnellement. Un complément mammaire en silicone peut être une bonne solution pour rétablir la symétrie et rebâtir la confiance en soi.

Nos compléments mammaires en silicone de haute qualité sont disponibles en différentes formes et épaisseurs pour un ajustement parfait pour les besoins des femmes. Et nos nouveaux compléments Balance Adapt Air rendent maintenant l'ajustement encore plus facile pour vous – avec une pochette d'air intégrée pour ajuster le volume selon vos besoins. Découvrez en plus à la page 58.



**REDONNEZ
À VOS CLIENTES
LEURS SILHOUETTES**



* Sources : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4504664/>

COMPLÉMENTS MAMMAIRES

Les compléments mammaires Amoena sont la solution pour les femmes vivant une asymétrie mammaire suivant une tumorectomie, reconstruction, biopsies multiples ou celles ayant une asymétrie naturelle.

- Notre nouveau portfolio contient plus de formes, styles, options de poids et épaisseurs
- La plupart des styles proposent une couche à l'endos avec un matériel thermorégulateur intégré Comfort+ pour réduire l'accumulation de chaleur derrière la forme.
- Conçus avec des bords minces pour s'adapter aux formes du corps
- Les compléments mammaires remplissent le bonnet du soutien-gorge lorsqu'il y a un manque de tissu ou qu'il est inégal, afin de rétablir une silhouette équilibrée et fluide
- Une méthode d'ajustement spéciale (MCD) a été développée pour vous aider à trouver la bonne épaisseur pour les besoins de vos clientes. Vous la trouverez à la page 127.

MULTIPLES OPTIONS D'ÉPAISSEURS

Un vaste portfolio de compléments mammaires complets les offre en trois options d'épaisseurs

ENVELOPPE LE SEIN

Les compléments mammaires complets sont pourvus de rainures délicates permettant un parfait ajustement aux courbes naturelles du sein

SENSATION NATURELLE

Silicone de haute qualité qui fournit un ajustement et une sensation exceptionnellement naturels



TECHNOLOGIE COMFORT+

Notre technologie brevetée *Comfort+* absorbe, emmagasine et expulse la chaleur afin de réguler et balancer les écarts de température corporelle pour un meilleur confort tout au long de la journée

UNE FORME POUR CHAQUE SEIN

Une grande variété de formes permet à chaque femme d'avoir un ajustement parfait pour une belle symétrie

TRANSITION EN DOUCEUR

Bords minces qui assurent une douce transition à la poitrine pour un look naturel

GAMME DE COMPLÉMENTS MAMMAIRES BALANCE

La gamme ultime de compléments mammaires

	Épaisseur	Mince		Moyen	Volume	Spécial	
	Mesure MCB	< 1 cm		1 – 2 cm	≥ 2 cm		
	FORME	Oval	Delta	Delta	Delta	Ellipse	Varia
PREMIUM	BALANCE ADAPT AIR 			Balance Adapt Air MD 233 Tailles 2-12			Balance Adapt Air SV 234 Tailles S-XL
	BALANCE CONTACT 			Balance Contact MD 229 Tailles 2-12	Balance Contact VD 230 Tailles 3/4-9/10		Balance Contact SV 286 Tailles S-XL
ADVANCED	BALANCE NATURA 				Balance Natura Light VD 221 Tailles 3/4-11/12		
		Balance Natura TO 227 Tailles S-XL	Balance Natura TD 217 Tailles 1-10	Balance Natura MD 220 Tailles 2-12	Balance Natura VD 222 Tailles 3/4-9/10	Balance Natura SE 231 Tailles S-XL	Balance Natura SV 285 Tailles S-XL
BASIC	BALANCE ESSENTIAL				Balance Essential Light VD 224 Tailles 3/4-11/12 Foncé 5/6-11/12		
		Balance Essential TO 228 Tailles S-XL	Balance Essential TD 218 Tailles 1-10	Balance Essential MD 223 Tailles 3-12 Foncé 4-10	Balance Essential VD 225 Tailles 3/4-9/10	Balance Essential SE 232 Tailles S-XL	

4 STYLES POUR DIVERS BESOINS

• Balance Adapt Air

Permet d'ajuster la prothèse de façon personnalisée à la paroi de la poitrine

Possède la technologie thermorégulatrice *Comfort+*

Particulièrement adapté pour régions avec cicatrices inégales, variations de poids, enflure due à l'oedème tronculaire ou lymphoedème

• Balance Contact

Adhère directement à la peau et possède notre technologie thermorégulatrice *Comfort+*

Particulièrement adapté pour lymphoedème

• Balance Natura

Pour un confort des plus naturels, avec notre technologie thermorégulatrice *Comfort+*

Particulièrement adapté pour zone cicatrisée sensible

• Balance Essential

Manière simple de restaurer la symétrie.

Particulièrement adapté pour compenser du tissu mammaire manquant

QUATRE FORMES POUR VOUS AIDER À RÉPONDRE À TOUS LES DIFFÉRENTS DÉFIS D'AJUSTEMENTS


- **Delta et Oval**

Compléments complètes avec un design rond anatomique disponible en trois épaisseurs

- **Ellipse et Varia**

Compléments partiels conçues pour remplir une section du sein.

Un portfolio de choix pour vous aider à relever tous les défis d'ajustement

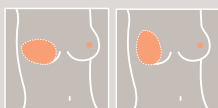DÉFI D'AJUSTEMENT			
Un sein est légèrement plus petit	Un sein est nettement plus petit	Tissu manquant sur la partie inférieure du sein	Tissu manquant ou inégal sur la partie supérieure ou le côté du sein
SOLUTION D'AJUSTEMENT			
OVAL	DELTA	ELLIPSE	VARIA
			
Utilisez Oval pour s'adapter à de petites différences en terme de volume du bonnet – une forme à double fonction qui peut être positionnée horizontalement ou verticalement.	Utilisez Delta comme forme de prédilection pour compenser pour le manque de volume sur l'ensemble du sein.	Utilisez Ellipse sur la partie inférieure du sein pour compenser le volume et pousser vers le haut le sein entier.	Utilisez Varia sur le dessus ou le côté du sein – une forme versatile qui peut être positionnée de différentes manières pour plus d'options d'ajustement.
Disponible en épaisseur mince – pour un ajustement délicat.	Disponible en trois épaisseurs (Mince, Moyenne, Volume) et quatre tailles (correspondant aux tailles de soutien-gorge) – pour remédier aux différences de bonnets.	Disponible en quatre tailles – pour le bon volume pour pousser vers le haut et remonter afin de créer une silhouette naturelle.	Disponible en quatre tailles – pour une silhouette naturelle sur l'ensemble du sein.



Notre Trousse d'ajustement Balance Premium Fit Kit (voir également à la page 60) avec 15 compléments de différentes tailles et épaisseurs – incluant le NOUVEAU Balance Adapt Air – rend la tâche plus facile pour trouver le bon complément et aider à réduire votre inventaire.

Avis
d'une PRO

Une méthode d'ajustement spéciale (MCD) a été développée afin de vous aider à trouver la bonne épaisseur pour répondre aux besoins de vos clientes. Vous la trouverez à la page 127.

NOUVEAUTÉ Innovation

AMOENA BALANCE ADAPT AIR


Ajustement individualisé avec de l'air

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES

- **Ajustement individualisé**
La technologie de pochette d'air de Balance Adapt Air permet un ajustement individualisé du volume simplement en ajoutant ou retirant l'air à n'importe quel moment
- **Ajustement près du corps**
Balance Adapt Air épouse confortablement les contours uniques de la paroi de la poitrine pour un ajustement près du corps et personnalisé
- **Ajustement personnalisé**
Volume ajustable pour s'adapter à sa forme unique ou au style de soutien-gorge pour une silhouette symétrique – en se regardant de haut ou dans un miroir
- **Confortable toute la journée**
La technologie thermorégulatrice brevetée *Comfort+* offre un confort tout au long de la journée et maintient la température corporelle idéale de la femme
- **Léger**
La technologie de pochette d'air offre la sensation de légèreté

Particulièrement adapté pour les femmes ayant :

- Zone avec cicatrices inégales
- Variations de poids
- Enflure dû à lymphoedème

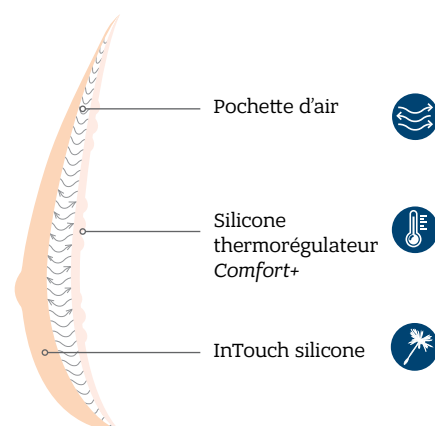

Balance Adapt Air MD 233

Tailles	2-12
Épaisseur	Moyen
Forme	Delta
Couches	3 Couches

Balance Adapt Air SV 234

Tailles	S-XL
Épaisseur	Spécial
Forme	Varia
Couches	3 Couches

Caractéristiques spéciales :

- Épaisseur de base (sans air) équivaut à un Moyen Delta (1-2 cm), mais la pochette d'air intégrée permet d'augmenter le volume pour être équivalent à un Volume Delta forme
- Solution provisoire durant la phase d'expansion de tissu pour reconstruction – le volume peut être facilement ajusté au besoin durant la transition

Caractéristiques spéciales :

- Conçu pour couvrir ou remplir une section du sein
- Peut être tourné pour compenser à l'endroit désiré le tissu mammaire manquant
- Le volume peut être ajusté au besoin



reddot winner 2020



GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2021

Pour plus d'information, voir p. 39

AMOENA BALANCE CONTACT ET BALANCE NATURA



comfort+

Balance Contact MD 229

Tailles 2-12
Épaisseur Moyen
Forme Delta
Couches 2 Couches



comfort+

Balance Contact VD 230

Tailles 3/4-9/10
Épaisseur Volume
Forme Delta
Couches 2 Couches



comfort+

Balance Contact SV 286

Tailles S-XL
Épaisseur Spécial
Forme Varia
Couches 2 Couches



comfort+

Balance Natura Light VD 221*

Tailles 3/4-11/12
Épaisseur Volume
Forme Delta
Couches 2 Couches



comfort+

Balance Natura TO 227

Tailles S-XL
Épaisseur Mince
Forme Oval
Couches 2 Couches



comfort+

Balance Natura TD 217

Tailles 1-10
Épaisseur Mince
Forme Delta
Couches 2 Couches



comfort+

Balance Natura MD 220

Tailles 2-12
Épaisseur Moyen
Forme Delta
Couches 2 Couches



comfort+

Balance Natura SE 231

Tailles S-XL
Épaisseur Spécial
Forme Ellipse
Couches 2 layer



comfort+

Balance Natura SV 285

Tailles S-XL
Épaisseur Spécial
Forme Varia
Couches 2 Couches



comfort+

Balance Natura VD 222

Tailles 3/4-9/10
Épaisseur Volume
Forme Delta
Couches 2 Couches

* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire.

AMOENA BALANCE ESSENTIAL



Balance Essential Light VD 224*

Tailles	3/4-11/12
Foncé Tailles	5/6-11/12
Épaisseur	Volume
Forme	Delta
Couches	1 layer



Balance Essential TO 228

Tailles	S-XL
Épaisseur	Mince
Forme	Oval
Couches	1 layer



Balance Essential TD 218

Tailles	1-10
Épaisseur	Mince
Forme	Delta
Couches	1 layer



Balance Essential MD 223

Tailles	3-12
Foncé Tailles	4-10
Épaisseur	Moyen
Forme	Delta
Couches	1 layer



Balance Essential VD 225

Tailles	3/4-9/10
Épaisseur	Volume
Forme	Delta
Couches	1 layer



Balance Essential SE 232

Tailles	S-XL
Épaisseur	Spécial
Forme	Ellipse
Couches	1 layer

* Les prothèses mammaires Light et Xtra Light ont une couleur plus claire. ● Disponible en Foncé



TROUSSE D'AJUSTEMENT PREMIUM KIT 245

Notre Trousse d'ajustement Premium Fit Kit avec 15 compléments de différentes tailles et épaisseurs rend la tâche plus facile pour trouver le bon complément et aider à réduire votre inventaire.

TROUSSE D'AJUSTEMENT PREMIUM KIT 245

15 compléments de différentes tailles et un tableau des tailles

Balance Natura TO 227	Taille: M, L,
Balance Natura TD 217	Taille: 3, 5
Balance Natura MD 220	Taille: 4, 8
Balance Natura SE 231	Taille: M, L
Balance Natura SV 285	Taille: S
Balance Natura Light VD 221	Taille: 5/6, 9/10
Balance Contact VD 230	Taille: 7/8
Balance Contact SV 286	Taille: L
Balance Adapt Air MD 233	Taille: 6
Balance Adapt Air SV 234	Taille: M

ACCESSOIRES POUR PROTHÈSES MAMMAIRES




MAMELONS ADHÉSIFS

- Adhèrent solidement à une prothèse ou à un complément mammaire, ou sur le sein naturel ou reconstruit, grâce à un adhésif en silicone
- Livrés avec une bouteille de 30 ml de nettoyant Amoena Soft Cleanser
- La trousse de démonstration présente un article de chaque couleur dans chaque taille, afin de déterminer la taille et la couleur appropriée (pour les détaillants seulement)

Style 136 Ivoire
137 Amande (illustré)
138 Bronze
139 Foncé
134 Trousse
de démonstration

Tailles Petit (1 3/8 po)
Moyen (1 9/16 po)
Grand (2 po)

Emballage 2 par boîte
Trousse : 1 de chaque couleur/taille

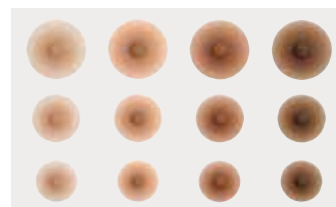

COUSSINETS PROTECTEURS ET PELLICULES POUR PROTHÈSES CONTACT

- Le coussinet protecteur permet de porter les prothèses adhésives façon traditionnelle, dans un soutien-gorge à pochettes
- Les pellicules protègent l'adhésif durant l'entreposage
- Disponible dans différentes tailles selon le style de la prothèse voir le schéma pour plus d'informations

Style Voir le schéma

Emballage 1 coussinet protecteur
2 pellicules par sac

GUIDE DES TAILLES DES COUSSINETS PROTECTEURS

PROTHÈSE	COUSSINET		TAILLE DE PROTHÈSE														
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
386C	171 G/D	TAILLE DU COUSSINET		1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	13	13
385C	168			3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11			
384C	167			1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	13	13
383C	170 G/D		1	1	1	3	3	5	5	7	7	10	10	12	12		
382C	168			3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	11		
381C	172			3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	11		
380C	172			3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	11	13	13



COUVRE-PROTHÈSES

- Le couvre-prothèse protège la prothèse mammaire
- Tissu doux sans couture sur le devant
- Ouverture à l'arrière
- Peut être lavé, lavage à la main à 85 ° F
- Style 156 convient pour une forme de prothèse 2A, style 160 pour 2S et 3S

Style 156
Couleur Ivoire
Tailles 1-14 G/D
Forme 392,393
Emballage 1 Couvre

Style 160
Couleur Ivoire
Tailles 1-17
Forme 442, 440, 391, 390, 385C, 382C, 381C, 380C, 363, 342N, 320, 310
Emballage 1 Couvre



ADAPT AIR PUMP

- Pompe de recharge pour Adapt Air et Balance Adapt Airr

Style 070

SANS
ALUMINIUM



AMOENA NETTOYANT DOUX ET BROSSE SOUPLE

- Le nettoyant doux Amoena est spécialement formulé pour les produits Amoena avec la surface adhésive : Contact, Balance Contact, CuraScar Silicone, Mamelons adhésifs
- Ne contient aucune substance à base d'huile
- Pour une meilleure adhésion, utilisez le nettoyant doux Amoena quotidiennement, avec la Brosse Souple, si désiré
- Aussi approprié pour nettoyer les prothèses non-adhésives et compléments dans le cadre d'un nettoyage régulier

Style 08703
Taille 150 ml

La brosse est développée spécifiquement pour les prothèses Amoena Contact et elle présente des poils ronds et soyeux qui n'endommagent pas la surface adhésive.

Style 08903 / 1 pièce

CONTACT MULTI

La prothèse Contact Multi d'Amoena est un coussinet de silicone avec le même système adhésif sécurisé qu'Amoena utilise pour ses prothèses mammaires Contact. Le coussinet adhère bien à toutes les prothèses symétriques d'Amoena 2S, 2S^N, 3S ou 3E, ce qui permet à la prothèse de se fixer à la poitrine. Puisque le coussinet est retiré chaque fois que la prothèse est enlevée – la prothèse devient plus polyvalente puisqu'on peut maintenant décider si on portera la prothèse fixée ou non.



Cette image illustre comment le coussinet Contact Multi s'adapte à une prothèse. (Prothèse non comprise)

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES

- Le coussinet Contact Multi est fait de silicone durable et douce avec un adhésif sur les deux côtés – le premier côté adhère à une prothèse Amoena Natura ou Essential; le deuxième adhère à la poitrine
- Le coussinet est facile à appliquer, porter et enlever – offrant ainsi aux femmes une nouvelle solution et une plus grande liberté de choix
- Porter une prothèse mammaire fixée permet aux femmes de ressentir moins de lourdeur et plus de flexibilité quand vient le temps de choisir quels vêtements porter
- Comme toutes prothèses mammaires Amoena, le coussinet Contact Multi requiert une poitrine propre et sèche pour une adhérence maximale. Un nettoyage quotidien avec le Nettoyant Doux Amoena et la Brosse Douce (inclus avec le coussinet) est nécessaire

Le coussinet est conçu pour être porté sur une prothèse mammaire Amoena et avec un soutien-gorge pour un support complet. Amoena n'est pas responsable des dommages causés par le fait de placer le coussinet Contact Multi sur une autre marque de prothèse mammaire

Style 037	Convient aux prothèses Amoena 2S*, tailles 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10
Style 038	Convient aux prothèses Amoena 3S*, tailles 0/1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10
Style 040	Convient aux prothèses 2S ^N *, tailles 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14
Style 041	Convient aux prothèses 3E*, tailles 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10
Côté	G/D
Emballage	Une lingette en microfibre, le Nettoyant Doux Amoena (30ml) et une Brosse Douce Le format de Nettoyant Doux de 150 ml est vendu séparément (p. 62)

* Usage recommandé avec les prothèses Amoena Natura et Essential seulement.



TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN

La lingerie, textiles et maillots avec pochette d'Amoena sont parfaitement conçus pour favoriser la confiance en soi des femmes après une chirurgie mammaire. Tous les styles possèdent une discrète petite pochette dans le bonnet pour bien maintenir une prothèse ou complément mammaire en place. Des matières et techniques de design innovateurs allient fonction et style pour un ajustement confortable et idéal pour mettre en valeur sa silhouette et agrémenter son style de vie.



LINGERIE

Page 70



ACTIVE

Page 94



WELLNESS

Page 97



MAILLOTS

Page 99



FILS ET MATIÈRES

Lors de la conception de notre collection de textiles, nous mettons beaucoup d'emphasis sur les fibres et matériaux naturels. Nos équipes de design tiennent compte quotidiennement des aspects comme la production organique de coton, la réduction de consommation d'eau et le recyclage des matières comme le nylon. La protection de l'environnement est un but qui ne dessert pas seulement notre planète mais qui résulte également en une collection de textiles élevée en praticité et standards de qualité.



COTON BIOLOGIQUE

Aucun produit comme des engrais artificiels, pesticides, herbicides ou fongicides ne sont utilisés dans la culture du coton biologique. De ce fait, les risques pour la santé des travailleurs agricoles sont également réduits.



Près de 50 % de toutes les fibres textiles pour les vêtements à travers le monde sont du coton



Coton biologique provenant de culture écologique



Une réduction de 91 % de consommation d'eau



Culture biologique contrôlée sans l'usage d'engrais chimiques ou synthétiques ou de produits de protection des cultures



TENCEL



Le lyocell est une fibre synthétique. Cependant, contrairement aux autres fibres fabriquées par l'homme (comme le polyester), le lyocell est une fibre de cellulose. Dérivé de cellulose végétale, les fibres sont dégagées des parois cellulaires par un procédé physique. Le lyocell provient principalement du bois d'eucalyptus et la compagnie Lenzign AG d'Autriche le commercialise sous le nom de TENCEL™ Lyocell.



Le TENCEL™ est produit de bois originaire de foresterie durable et contrôlée



Il est produit utilisant un procédé innovateur de boucle fermée



Les fibres du TENCEL™ sont surtout très douces



Les fibres du TENCEL™ fibres contribuent à la respirabilité du tissu



BAMBOU

Le bambou est une matière brute qui se renouvelle rapidement et, tout en étant une source de fibres, est utilisé dans la production de nourriture, matériaux de construction, biens de consommation et instruments de musique. Il est habituellement cultivé dans des plantations sans l'usage de pesticides. Les fibres du bambou proviennent de la tige de la plante. Dans la fabrication de textile, de fibres, le bambou est utilisé pour produire de la Rayonne, par exemple, tout comme le Tencel.



Le bambou est une matière brute qui se renouvelle rapidement car il pousse vite



Matériau respectueux de l'environnement en raison de sa faible consommation d'eau, renouvellement rapide et culture sans pesticides



Son renouvellement rapide et les multiples possibilités d'usages aident à protéger notre planète



Culture sans pesticides

FILS ET MATIÈRES NATURELLES



OEKOTEX



Standard 100 par Oeko-Tex est une des marques la plus connue mondialement pour les tests de substances nocives sur les textiles. L'institut de tests Oeko-Tex fournit une certification standardisée à l'échelle mondiale sur la sûreté des produits textiles au niveau de la santé humaine. Ceci implique non seulement de tester minutieusement les textiles mêmes, mais aussi les éléments et produits utilisés pour les obtenir. Les produits qui réussissent ce test sont autorisés à porter l'étiquette « Standard 100 par Oeko-Tex – Testé pour substances nocives ». Amoena utilise des matériaux certifiés par Oeko-Tex dans son procédé de production.

FILS ET MATIÈRES SYNTHÉTIQUES



ECONYL®



Nylon rregénéré

La fibre ECONYL® est une vraie innovation : des filets de pêche de l'industrie de pisciculture et des filets fantômes sont parmi les éléments recyclés dans sa production. Pendant son processus de régénération complète, ce résidu de nylon est retourné à son état d'origine. Il est identique au fil de nylon standard, mais peut être recyclé et reconfiguré à l'infini pour la production de nouveaux produits respectueux des ressources.



Il est produit utilisant un procédé innovateur de boucle fermée



Les résidus provenant de textiles, recouvrement de plancher et des océans du monde sont recyclés au cours de sa production



Matériau respectueux de l'environnement, puisque le nouveau fil est produit de résidus



ECONYL® peut être recyclé à l'infini



VITA



Tissu fait de Nylon ECONYL® et Spandex LYCRA® XTRA LIFE™

Vita par Carvico est un tissu technique durable, fait de nylon régénéré ECONYL®, qui transforme les déchets en mode. Vita est un matériau polyvalent, très résistant, souple, doux et respirant. En raison de sa fabrication innovante, il est doublement plus résistant au chlore, lotions et huiles que tout autre tissu similaire.



Le matériau Vita fournit une excellente protection contre les rayons UV, jusqu'à 50



Élastiques bidirectionnels pour un ajustement parfait et très doux au toucher



Produit avec le nylon régénéré ECONYL® qui peut être recyclé à l'infini



DARWIN

Matériau de polyester

Darwin

Darwin par Carvico est un tissu P.B.T. fait à 100 % de polyester, donc résistant au chlore, fournissant un ajustement parfait au fil du temps et doté d'une performance technique sans précédent. Il protège des rayons UV (UPF 50+), respirant et à séchage rapide. Darwin est idéal pour les maillots de compétition.



Le matériau fournit une excellente protection contre les rayons UV, jusqu'à 50



Élastiques bidirectionnels pour un ajustement parfait et très doux au toucher



Respirant pour une expérience plus confortable



Résistant au chlore pour une durabilité exceptionnelle



COOLMAX®

Polyester spécialisé

COOLMAX®

Les tissus faits de fibre COOLMAX® éloignent l'humidité loin du corps pour garder la personne qui les porte fraîche et sèche. Grâce à la zone croisée spéciale de la fibre, les avantages de la gestion de l'humidité et de perméabilité à l'air sont internes, et ne partiront pas au lavage. C'est un tissu facile d'entretien avec une excellente stabilité de couleur et résistance aux lavages. www.COOLMAX.com



Tissu respirant pour une expérience plus confortable



Technologie permanente de séchage rapide COOLMAX® qui éloigne l'humidité loin du corps



Tissu synthétique qui offre une haute performance au tissu



Bénéficie de caractéristiques permanentes



LYCRA® XTRA LIFE™

Fibre élastique

LYCRA®
xtra life™

Un des noms de marque pour les fibres élastiques est LYCRA®, marque de commerce enregistrée. Inventé en 1958, il a révolutionné l'industrie du vêtement avec ses caractéristiques qu'aucune fibre naturelle ne possède. Unique de par sa qualité, élasticité et reprise de forme exceptionnelle. De plus, la sous-marque LYCRA® XTRA LIFE™ est synonyme d'ajustement longue durée et aide le maillot à rester comme neuf plus longtemps. Il résiste à la détérioration causée par le chlore, la chaleur et les lotions solaires jusqu'à 10 fois plus longtemps que le Spandex non protégé. www.LYCRA.com



Résistant au chlore pour un matériau plus durable



Excellente résistance aux effets néfastes des lotions/huiles solaires et de la chaleur



Fibre synthétique légère qui offre une haute performance au tissu



Performance longue durée avec apparence neuve plus longtemps

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DES SOUTIENS-GORGE AMOENA

Nos soutiens-gorge spéciaux sont adaptés aux besoins individuels des femmes qui ont subi une chirurgie mammaire en combinant un look féminin avec un ajustement, praticité, et des standards de haute qualité. Tous les textiles sont conçus au siège social d'Amoena à Raubling, Allemagne. Nos soutiens-gorge post-mastectomie traversent un procédé spécial de fabrication et prennent une moyenne de huit à neuf minutes de plus à produire que des soutiens-gorge sans poche. Les soutiens-gorge Amoena sont conçus pour intégrer parfaitement les prothèses et compléments mammaires Amoena, offrant aux femmes un résultat visuel idéal avec un confort optimal après une chirurgie mammaire.



Bretelles ajustables, douces et confortables

- Soutiennent une prothèse mammaire et soulagent la pression sur les épaules et le cou
- Sont ajustables et augmentent en largeur en fonction des plus grandes tailles
- Certains modèles ont des bretelles élargies et coussinées pour plus de confort et support

Pochettes de bonnet invisibles

- Conçues pour maintenir bien en place les prothèses et compléments mammaires Amoena
- Matériaux de haute qualité, avec diverses fonctions, assurent un confort maximal

Bonnets ajustés parfaitement

- Conçus pour s'ajuster aux prothèses et compléments mammaires Amoena et aider à dissimuler un manque d'uniformité
- Bordure élastique au décolleté offrant une sécurité supplémentaire
- Couches de tissus supplémentaires offrant renfort pour un meilleur ajustement et support pour les tailles plus grandes

Bande sous poitrine soutenante, de forme profilée

- Offre stabilité et augmente le confort
- La plupart des styles ont une bande sous buste plus large pour garantir que les prothèses/compléments restent bien en place
- Doux et confortable pour porter toute la journée

Parois latérales plus hautes

- Garantit le maintien des prothèses et compléments mammaires Amoena
- Fini doux et assure une mobilité du bras optimale
- Couvre les cicatrices et le manque d'uniformité



Fermeture douce et ajustable

- Hauteurs variables selon la taille; au moins 2 agrafes
- Fermeture à agrafes légèrement rembourrée pour plus de confort
- Pour celles avec des problèmes de mobilité, nous offrons des modèles avec fermeture à l'avant permettant un habillage et déshabillage plus facile

AMOENA SOUTIENS-GORGE DENTELLE

Pour bonnets
jusqu'à G

AMANDA BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ ⊖ 2,4

Style	44536	Blanc
Bonnets	Moyen/Fort	
Tailles	34-48 A, B, C, D, DD, DDD; 36-46 G	
Agrafes	2 rangées : 34-38 A, 34-36 B, 34 C	
	3 rangées : 40-48 A, 38-48 B, 36-48 C,	
	34-44 D, 34-42 DD,	
	34-40 DDD, 36-38 G	
	4 rangées : 48 C, 46-48 D, 44-48 DD,	
	42-48 DDD, 40-46 G	
Composition	Bonnets A, B, C : 73 % Nylon, 17 % Spandex, 5 % Polyester, 5 % Polyuréthane Bonnets D, DD, DDD, G : 73 % Nylon, 19 % Spandex, 4 % Polyester, 4 % Polyuréthane	



- Présente un support en demi-lune sur les côtés des bonnets conçu spécialement pour supporter les plus grandes tailles
- Pochettes en tissu microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles confortables, élastiques et ajustables

AMANDA CULOTTE

Style	44539	Blanc
Tailles	6-24	
Composition	75 % Nylon, 11 % Spandex, 8 % Coton, 6 % Polyester	



- Élégant tissu Jacquard combiné à des empiècements de dentelle
- Finition invisible à la jambe pour un confort sans élastique

CARACTÉRISTIQUES

▲
Pochettes
bilatérales

◡
À armature

◡
Bonnets
souples

⊕
Bonnets
coupés et
cousus

◐
Bonnets en
mousse coupés
et cousus

⊙
Bonnets
moulés

●
Bonnets en
mousse moulé

()
Bretelles
confort

▮
Renforts
latéraux

♻️
Haute teneur
en coton

AMOENA SOUTIENS-GORGE DENTELLE



AMANDA BUSTIER À BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ | 2,7

Style	44537	☐ Blanc
Bonnets	Affaissé/Moyen	
Tailles	34-42 A, B, C, D	
Agrafes	2 rangées : 34-38 A, 34-36 B, 34 C 3 rangées : 40-42 A, 38-42 B, 36-42 C, 34-42 D	
Composition	Bonnets A, B, C : 78 % Nylon, 19 % Spandex, 3 % Polyester Bonnets D : 78 % Nylon, 20 % Spandex, 2 % Polyester	



- Design moderne pour un décolleté plongeant, conçu spécifiquement pour les femmes qui portent un complément mammaire
- Tissu Jacquard élégant avec panneaux de dentelle
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables
- Pochettes faites de tissu en microfibre respirant et équilibrant la température
- Fermeture à agrafes coussinée au dos



AMANDA À ARMATURE

▲ ◡ ⊕ | 2,4

Style	44538	☐ Blanc
Bonnets	Moyen/Fort	
Tailles	34-48 A, B, C, D, DD, DDD; 36-46 G	
Agrafes	2 rangées : 34-38 A, 34-36 B, 34 C 3 rangées : 40-48 A, 38-48 B, 36-48 C, 34-44 D, 34-42 DD, 34-40 DDD, 36-38 G 4 rangées : 48 C, 46-48 D, 44-48 DD, 42-48 DDD, 40-46 G	
Composition	Bonnets A, B, C : 73 % Nylon, 20 % Spandex, 7 % Polyester Bonnets D, DD, DDD, G : 74 % Nylon, 22 % Spandex, 4 % Polyester	



- Présente un support en demi-lune sur les côtés des bonnets conçu spécialement pour supporter les plus grandes tailles
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles confortables, coussinées, élastiques et ajustables

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1	2	3	4	5	6	7
Moulé	Coupé et cousu	Tulle	Microfibre	Coton	COOLMAX®	Autre

AMOENA SOUTIENS-GORGE DENTELLE



AURELIE BONNETS SOUPLES



Style	44153	Blanc Cassé
Bonnets	Moyen	
Tailles	32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD	
Agrafes	2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D 3 rangées : 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C; 34-44 D; 32-44 DD; 34-42 DDD	
Composition	Bonnets A, B, C : 67 % Nylon, 25 % Spandex, 8 % Polyester Bonnets D, DD, DDD : 68 % Nylon, 26 % Spandex, 6 % Polyester	



- Dentelle luxueuse et tissu Jacquard avec pierre de cristal et dorure
- Renforts latéraux offrant plus de support sur les côtés
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



AURELIE À ARMATURE



Style	44154	Blanc Cassé
Bonnets	Moyen	
Tailles	32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD	
Agrafes	2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D 3 rangées : 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C; 34-44 D; 32-44 DD; 34-42 DDD	
Composition	Bonnets A, B, C : 67 % Nylon, 24 % Spandex, 9 % Polyester Bonnets D, DD, DDD : 67 % Nylon, 25 % Spandex, 8 % Polyester	



- Dentelle luxueuse et tissu Jacquard avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



AURELIE CULOTTE

Style	44156	Blanc Cassé
Tailles	6-20	
Composition	55 % Nylon, 26 % Spandex, 11 % Coton, 8 % Polyester	



- Inserts de dentelle à l'avant et au dos pour refléter la dentelle des soutiens-gorge Aurelie
- Tissu Jacquard offre un fini perlé pour un effet luxueux
- Breloque en cristal sur la boucle du centre, avec bordure dorée pour plus d'élégance

CARACTÉRISTIQUES

Pochettes bilatérales	À armature	Bonnets souples	Bonnets coupés et cousus	Bonnets en mousse coupés et cousus	Bonnets moulés	Bonnets en mousse moulé	Bretelles confort	Renforts latéraux	Haute teneur en coton

AMOENA SOUTIENS-GORGE DENTELLE

AURELIE BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

▲ ● 1,4

Style	44155	Blanc Cassé
Bonnets	Moyen	
Tailles	32-44 AA, A, B, C, D, DD	
Agrafes	2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D 3 rangées : 42-44 AA; 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C; 34-44 D; 32-44 DD	



Composition 46 % Nylon, 37 % Polyester, 17 % Spandex

- Dentelle luxueuse et tissu Jacquard avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



LINGERIE

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1	2	3	4	5	6	7
Moulé	Coupé et cousu	Tulle	Microfibre	Coton	COOLMAX®	Autre

AMOENA SOUTIENS-GORGE
DENTELLE

LINGERIE



CARACTÉRISTIQUES

-  Pochettes bilatérales
-  À armature
-  Bonnets souples
-  Bonnets coupés et cousus
-  Bonnets en mousse coupés et cousus
-  Bonnets moulés
-  Bonnets en mousse moulé
-  Bretelles confort
-  Renforts latéraux
-  Haute teneur en coton

AMOENA SOUTIENS-GORGE DENTELLE



CELINE BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ | 2,4

Style 44509  Rose Nu/Gris
 Bonnets Moyen
 Tailles 34-42 A, B, C, D
 Agrafes 2 rangées : 34-42 A; 34-40 B; 34-38 C;
 34-36 D
 3 rangées : 42 B; 40-42 C; 38-42 D



Composition : 80 % Nylon, 14 % Spandex, 6 % Polyester

- Soutien-gorge à haut effet couvrant avec devant ajustable, offrant ainsi deux options différentes : plus grande couverture pour camoufler des cicatrices ou marques de radiothérapie ou tombant plus bas pour un décolleté plus plongeant
- Dentelle discrète avec un effet subtil double-ton
- Pochettes faites de tissu en microfibre respirant et équilibrant la température
- Bretelles élastiques ajustables
- Fermeture au dos douce et coussinée
- Renforts latéraux offrant plus de support sur les côtés

LINGERIE



CELINE CULOTTE

Style 44512  Rose Nu/Gris
 Tailles 6-16
 Composition 65 % Nylon, 24 % Spandex, 11 % Coton



- S'agence avec le soutien-gorge Celine
- Dentelle discrète avec un effet subtil double-ton

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

- | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Moulé | Coupé et cousu | Tulle | Microfibre | Coton | COOLMAX® | Autre |

KAROLINA BONNETS SOUPLES

▲ ◐ ⊕ 2,4

Style 44505  Blanc/
Nu Claire

Bonnets Moyen

Sizes 32-42 A, B, C, D, DD

Agrafes 2 rangées : 32-38 A; 32-36 B;
32-34 C; 32 D

3 rangées : 40-42 A; 38-42 B; 36-42 C;
34-42 D; 32-42 DD

Composition Bonnets A, B, C : 75 % Nylon,
20 % Spandex, 5 % Rayonne
Bonnets D, DD : 75 % Nylon,
22 % Spandex, 3 % Rayonne

- Dentelle luxueuse en éventail au haut du bonnet, combiné tissu lustré avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



CARACTÉRISTIQUES

▲
Pochettes
bilatérales

◐
À armature

◐
Bonnets
souples

⊕
Bonnets
coupés et
cousus

◐
Bonnets en
mousse coupés
et cousus

⊙
Bonnets
moulés

●
Bonnets en
mousse moulé

()
Bretelles
confort

|
Renforts
latéraux

☁
Haute teneur
en coton

AMOENA SOUTIENS-GORGE DENTELLE



KAROLINA BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

▲ ◡ ⊕ 2,4

Style	44506	Blanc/Nu Claire
Tailles	32-42 AA, A, B, C, D, DD	
Bonnets	Moyen	
Agrafes	2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D 3 rangées : 42 AA; 40-42 A; 38-42 B; 36-42 C; 34-42 D; 32-42 DD	



Composition 55 % Nylon, 27 % Polyester, 14 % Spandex, 4 % Rayonne

- Dentelle luxueuse en éventail au haut du bonnet, combiné tissu lustré avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



KAROLINA À ARMATURE

▲ ◡ ⊕ 2,4

Style	44507	Blanc/Nu Claire
Bonnets	Moyen	
Tailles	32-42 A, B, C, D, DD	
Agrafes	2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32D 3 rangées : 40-42 A; 38-42 B; 36-42 C; 34-42 D; 32-42 DD	



Composition Bonnets A, B, C : 77 % Nylon, 20 % Spandex, 3 % Rayonne
Bonnets D, DD : 77 % Nylon, 21 % Spandex, 2 % Rayonne

- Dentelle luxueuse en éventail au haut du bonnet, combiné tissu lustré avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



KAROLINA CULOTTE

Style	44508	Blanc/Nu Claire
Tailles	6-16	
Composition	70 % Nylon, 18 % Spandex, 10 % Coton, 2 % Rayonne	



- La culotte complète le look séducteur de l'ensemble Karolina
- Dentelle luxueuse en éventail combinée au tissu lustré
- Pendentif au centre rappelle les soutiens-gorge Karolina


STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1	2	3	4	5	6	7
Moulé	Coupé et cousu	Tulle	Microfibre	Coton	COOLMAX®	Autre

AMOENA SOUTIENS-GORGE CLASSIQUE



AVA BONNETS SOUPLES

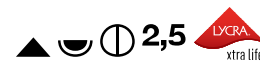

Style	2115	Blanc	Beige Perle
Bonnets	Fort		
Tailles	34-52 B, C; 36-46 D, DD		
Agrafes	3 rangées : 34-46 B; 34-46 C; 36-38 D 4 rangées : 48-52 B,C; 40-46 D; 36-46 DD		
Composition	38 % Coton, 27 % Polyester, 26 % Nylon, 7 % LYCRA®, 2 % Spandex		



- Soutien-gorge en M qui procure un excellent soutien, spécialement pour un profil de poitrine fort
- Pochettes en coton aux bonnets
- Bonnets rembourrés en fibres Fibrefill
- Bretelles ajustables et rigides



NOUVELLE
couleur

Haute teneur
en coton



Bleu/Blanc détail

FRANCES BONNETS SOUPLES



Style	2128	Blanc	Bleu/Blanc
		Noir	Gris/Blanc
		Nu	Rose/Taupe
		Light Bleu/Aqua (NOUVEAU)	
Bonnets	Affaissé/Moyen		
Tailles	XS (28/30); S (32/34); M (36/38); L (40/42); XL (44/46); 2XL (48/50)		
Bonnets	A/B; C/D; DD/DDD		
Agrafes	4 rangées : XS (A/B, C/D); S (A/B); M (A/B) 5 rangées : XS (DD/DDD); S (C/D, DD/DDD); M (C/D, DD/DDD); L (A/B, C/D); XL (A/B, C/D); 2XL (A/B, C/D) 6 rangées : L (DD/DDD); XL (DD/DDD) 7 rangées : 2XL (DD/DDD)		
Composition	90 % Coton, 10 % Spandex		



- Soutien-gorge de loisirs à fermeture avant
- Tissu en coton ultra doux offrant un confort apaisant à la peau sensible
- Pour un meilleur support, nous vous recommandons de porter une prothèse Amoena Loisir avec ce soutien-gorge (voir p. 53)

CARACTÉRISTIQUES

Pochettes
bilatérales

À armature

Bonnets
souples

Bonnets
coupés et
cousus

Bonnets en
mousse coupés
et cousus

Bonnets
moulés

Bonnets en
mousse moulé

Bretelles
confort

Renforts
latéraux

Haute teneur
en coton

AMOENA SOUTIENS-GORGE CLASSIQUE

NOUVELLE
couleur

Bretelles
ajustables



FLEUR BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ ⊖ 2,5

Style	44672		Blanc	44671		Nu
	44695		Gris Mélange (NOUVEAU)			
Bonnets	Affaissé/Moyen					
Tailles	XS (28/30); S (32/34); M (36/38); L (40/42); XL (44/46); 2XL (48/50)					
Bonnets	A/B, C/D, DD/DDD					
Agrafes	4 rangées : XS(A/B, C/D); S(A/B); M(A/B) 5 rangées : XS(DD/DDD); S(C/D, DD/DDD); M(C/D, DD/DDD); L(A/B, C/D); XL(A/B, C/D); 2XL(A/B, C/D) 6 rangées : L(DD/DDD); XL(DD/DDD) 7 rangées : 2XL(DD/DDD)					
Composition	90 % Coton, 10 % Spandex					



- Nouveau soutien-gorge qui se rapproche du soutien-gorge Frances, mais avec des bretelles ajustables rembourrées
- Pour un support optimal, nous recommandons de porter une prothèse postopératoire avec ce soutien-gorge (Voir p. 53)

Pour bonnets
jusqu'à G



ISADORA BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ ⊖ 2,5,7

Style	0947		Blanc			
	0948		Nu			
	44114		Noir			
Bonnets	Moyen/Fort					
Tailles	34-50 A; 32-48 B, C, D; 32-44 DD, DDD, G					
Agrafes	2 rangées : 34-40 A; 32-40 B, C; 32-38 D 3 rangées : 42-50 A; 42-48 B; 42-46 C; 40-44 D; 32-42 DD; 32-40 DDD; 32-38 G 4 rangées : 48 C; 46-48 D; 44 DD; 42-44 DDD; 40-44 G					
Composition	44 % Nylon, 29 % Polyester, 14 % Spandex, 13 % Coton					



- Broderie décorative et tissu mesh sur les bonnets pour un look léger
- Pochettes en coton
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles larges, rembourrées et ajustables : Rigide, 44C; 36-44 D; 38-44 DD

JASMIN BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ ⊖ 2,5,7

Style	0900N		Blanc			
	44233		Noir			
Bonnets	Affaissé/Moyen					
Tailles	32-40 AA, A, B; 34-40 C					
Agrafes	2 rangées : 32-40 AA, A, B; 34-40 C					
Composition	68 % Coton, 18 % Nylon, 7 % Spandex, 7 % Polyester					



- Tissu dentelle stretch pour un soutien-gorge léger et confortable
- Haut du bonnet élastique pour assurer un ajustement près du corps
- Pochettes en coton
- Grandes bretelles, décoratives et ajustables

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1	2	3	4	5	6	7
Moulé	Coupé et cousu	Tulle	Microfibre	Coton	COOLMAX®	Autre

AMOENA SOUTIENS-GORGE CLASSIQUE

LINGERIE

NOUVEAU
Fermetures
avant et
arrière

Pour bonnets
jusqu'à G

NANCY BONNETS SOUPLES FERMETURE AVANT

▲ ◡ ⊕ 2,6

Style 44739  Nu Claire
44740  Gris Foncé

Bonnets Moyen/Fort

Tailles 32-44 B; 34-52 C, D;
34-50 DD, DDD, G

Agrafes Avant :

4 rangées : 32-36 B; 34 C

5 rangées : 38-44 B; 36-42 C;

34-40 D; 34 DD

6 rangées : 44-50 C; 42-48 D; 36-42 DD;

34-36 DDD; 34 G

7 rangées : 52 C; 50-52 D; 44-50 DD;

38-44 DDD; 36-42 G

8 rangées : 46-50 DDD; 44-50 G

Arrière :

2 rangées : 32-36 B; 34 C

3 rangées : 38-42 B; 36-40 C; 34-38 D;

34-36 DD; 34 DDD

4 rangées : 44 B; 42-52 C; 40-52 D;

38-50 DD; 36-50 DDD; 34-50 G

Composition 38 % Polyester, 31 % Nylon, 22 % Polyester
(COOLMAX®), 9 % Spandex



COOLMAX

- Une refonte d'un bestseller; Nancy offre des fermetures à l'avant et à l'arrière
- Soutien-gorge facile à ajuster avec dentelle le long de l'encolure
- Pochettes respirantes en tissu COOLMAX®
- Fermeture à agrafes coussinées à l'arrière
- Bretelles élastiques et ajustables

CARACTÉRISTIQUES



Pochettes
bilatérales



À armature



Bonnets
souples



Bonnets
coupés et
cousus



Bonnets en
mousse coupés
et cousus



Bonnets
moulés



Bonnets en
mousse moulé



Bretelles
confort



Renforts
latéraux



Haute teneur
en coton

AMOENA SOUTIENS-GORGE CLASSIQUE

Pour bonnets jusqu'à G



NANCY BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ 2,6

Style	44480	Blanc
	1151	Nu Claire
	44024	Gris Foncé
	44417	Bleu Minuit
Bonnets	Moyen/Fort	
Tailles	32-44 B; 34-52 C, D; 34-50 DD, DDD, G	
Agrafes	2 rangées : 32-36 B; 34 C	
	3 rangées : 38-42 B; 36-40 C; 34-38 D; 34-36 DD; 34 DDD	
	4 rangées : 44 B; 42-52 C; 40-52 D; 38-50 DD; 36-46 DDD; 34-50 G	
Composition	38 % Polyester, 31 % Nylon, 22 % Polyester (COOLMAX®), 9 % Spandex	



- Facile à ajuster, ce soutien-gorge présente une dentelle florale à l'encolure
- Pochettes respirantes en tissu COOLMAX® aident à repousser l'humidité
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques et ajustables



RITA BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ 2,6

Style	2004	Nu
Bonnets	Moyen	
Tailles	34-44 A, B, C; 34-46 D; 36-46 DD	
Agrafes	2 rangées : 34-44 A; 34-38 B; 34-36 C	
	3 rangées : 40-44 B; 38-44 C; 34-38 D; 36-38 DD	
	4 rangées : 40-46 D, DD	
Composition	77 % Polyester, 19 % Nylon, 4 % Spandex	



- Le tissu est légèrement brillant et l'encolure en dentelle extensible épouse le corps
- Pochettes en tissu respirant COOLMAX® aux bonnets aident à rester au frais et sec
- Bretelles élastiques et ajustables

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1	2	3	4	5	6	7
Moulé	Coupé et cousu	Tulle	Microfibre	Coton	COOLMAX®	Autre

AMOENA SOUTIENS-GORGE SANS COUTURE



AMY BONNETS SOUPLES SANS COUTURE

▲ ◡ ● 1,4

Style	44310	Rose Nu
	44311	Noir*
Bonnets	Moyen	
Tailles	S (32-36 A; 32-34 B; 32 C) M (38-40 A; 36-38 B; 34-36 C; 32-34 D) L (42-44 A; 40-42 B; 38-40 C; 36-38 D; 34-36 DD)	
Composition	72 % Nylon, 28 % Spandex	



- Matériau tissé sans couture ni fermeture inconfortables
- Soutien-gorge idéal pour dormir
- Pochettes en tissu microfibre
- Bretelles et sous-bande extra larges

*Tailles 42D, 42DD jusqu'à épuisement des stocks



Options de bretelles

BARBARA REMBOURRÉ À ARMATURE

▲ ◡ ● 1,3

Style	0457	Nu
Bonnets	Moyen	
Tailles	32-40 A, B, C; 32-38 D	
Agrafes	3 rangées : 32-40 A, B, C; 32-38 D	
Composition	72 % Nylon, 14 % Spandex, 14 % Polyester	



- Conçu dans un tissu à effet lisse pour un look impeccable
- Bonnets en mousse moulée; tulle pockets
- Renforts latéraux offrant plus de support sur les côtés
- Plusieurs options pour les bretelles : strapless, droites, croisées ou en licou
- Emballé avec des bretelles transparentes supplémentaires pour une option de bretelles invisibles



Droites



Croisées



En licou



Transparente

CARACTÉRISTIQUES

▲
Pochettes bilatérales

◡
À armature

◡
Bonnets souples

⊖
Bonnets coupés et cousus

◐
Bonnets en mousse coupés et cousus

●
Bonnets moulés

●
Bonnets en mousse moulée

()
Bretelles confort

|
Renforts latéraux

☁
Haute teneur en coton

AMOENA SOUTIENS-GORGE SANS COUTURE

CLARA BONNETS SOUPLES

FERMETURE AVANT



Style 44743  Rose Nu

Bonnets Moyen

Tailles S (32-36 A; 32-34 B; 32 C)
M (38-40 A; 36-38 B; 34-36 C; 32-34 D)
L (42-44 A; 40-42 B; 38-40 C; 36-38 D; 34-36 DD)
XL (44-46 B; 42-44 C; 40-42 D; 38-40 DD)



Composition 78 % Bamboo, 17 % Nylon, 5 % Spandex

- Fait de tissu de bambou qui est apaisant pour la peau sensible, naturellement antibactérien, respirant et évacuant l'humidité
- Technologie sans couture et tissée pour un confort ultime; idéal pour dormir
- Couche ultra-douce à l'intérieur
- Tissu extensible et flexible lorsque le poids fluctue en raison des traitements, de lymphoedème ou pour toute autre raison.
- Large sous-bande sous la poitrine et hautement couvrant sur les côtés et au dos
- Bonnets en mousse rembourrés amovibles
- Les pochettes moulées
- Bretelles larges et rembourrées



LINGERIE

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1	2	3	4	5	6	7
Moulé	Coupé et cousu	Tulle	Microfibre	Coton	COOLMAX®	Autre

AMOENA SOUTIENS-GORGE SANS COUTURE

LINGERIE

NOUVEAU



Haute teneur
en coton

KITTY TOP

▲ ◡ ● ☁ 1,5

Style 44736 Rose Nu

Bonnets Moyen

Tailles S (32-38 A, 32-36 B, 32-34 C)
M (38-42 A, 36-40 B, 34-48 C, 32-36 D)
L (42-44 A, 40-44 B, 38-42 C, 36-40 D, 34-38 DD)
XL (44-46 B, 42-46 C, 40-44 D, 38-42 DD)
2XL (46 C, 44-46 D, 42-46 DD)



Composition 69 % Coton, 25 % Nylon, 6 % Spandex

- Camisole ultra confortable avec soutien-gorge Kitty intégré
- Technologie tissée sans couture et sans fermeture pour un confort ultime, conçu spécialement quand les effets secondaires des traitements ne permettent pas le port d'un soutien gorge régulier
- À porter sous les vêtements, idéal comme haut pour dormir
- Rembourrage léger peut se retirer au besoin
- Pochettes moulées en coton pouvant maintenir une prothèse régulière ou un complément mammaire
- Bretelles élastiques et ajustables

CARACTÉRISTIQUES



Pochettes
bilatérales



À armature



Bonnets
souples



Bonnets
coupés et
cousus



Bonnets en
mousse coupés
et cousus



Bonnets
moulés



Bonnets en
mousse moulé



Bretelles
confort



Renforts
latéraux



Haute teneur
en coton

AMOENA SOUTIENS-GORGE SANS COUTURE

Haute teneur
en coton



KITTY BONNETS SOUPLES SANS COUTURE

▲ ◡ ● ◡ 1,5

Style	44607	Rose Nu
	44674	Magenta
Bonnets	Moyen	
Tailles	S (32-38 A, 32-36 B, 32-34 C)	
	M (38-42 A, 36-40 B, 34-48 C, 32-36 D)	
	L (42-44 A, 40-44 B, 38-42 C, 36-40 D, 34-38 DD)	
	XL (44-46 B, 42-46 C, 40-44 D, 38-42 DD)	
	2XL (46 C, 44-46 D, 42-46 DD)	



Composition 69 % Coton, 25 % Nylon, 6 % Spandex

- Soutien-gorge confort, sans couture, ajusteurs de bretelles, ni fermeture. Idéal pour dormir
- Bonnets moulés à pochettes
- La légère rembourrure aux bonnets peut se retirer si désiré

COTON
BIOLOGIQUE



LARA COTON

BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

▲ ◡ ● ◡ 1,5

Style	44673	Nu
Bonnets	Moyen	
Tailles	34-40 AA, 32-44 A, B, C, D, DD	
Agrafes	2 rangées : 34-40 AA, 32-44 A, B, C, D, DD	
Composition	91 % Coton Biologique, 9 % Spandex	



- Soutien-gorge légèrement rembourré, recouvert de doux coton biologique respirant
- Pochettes en coton biologique
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques et ajustables

LARA BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

▲ ◡ ● ◡ 1,4

Style	0752	Blanc Cassé
	0674	Nu
	0675	Noir
Bonnets	Moyen	
Tailles	34-40 AA; 32-44 A, B, C, D, DD	
Agrafes	2 rangées : 34-40 AA; 32-44 A, B, C, D, DD	
Composition	84 % Nylon, 16 % Spandex	



- Soutien-gorge T-shirt légèrement rembourré avec bonnets moulés sans couture pour un look lisse
- Renforts latéraux offrant plus de support sur les côtés
- Pochettes respirantes en tulle
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1	2	3	4	5	6	7
Moulé	Coupé et cousu	Tulle	Microfibre	Coton	COOLMAX®	Autre

AMOENA SOUTIENS-GORGE SANS COUTURE



LARA SATIN BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

▲ ◡ ● | 1,4

Style 44214 Nu
44212 Noir

Bonnets Moyen

Tailles 32-44 AA, A, B, C, D, DD

Agrafes 2 rangées : 32-44 AA, A, B, C, D, DD

Composition 74 % Nylon, 15 % Spandex, 11 % Polyester



- Élégance confortable avec bordure en satin et pierre en strass au centre
- Renforts latéraux offrant plus de support sur les côtés
- Bonnets moulés, sans couture avec pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables



Aplanit le dos

MAGDALENA BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ● | 1,4

Style 0463 Nu

Bonnets Moyen/Fort

Tailles 34-48 B, C, D, DD, DDD

Agrafes 4 rangées : 34-42 B; 34-40 C; 34-38 D; 34-36 DD; 34 DDD
5 rangées : 44-48 B; 42-48 C; 40-48 D; 38-48 DD; 36-48 DDD

Composition 54 % Nylon, 24 % Spandex, 22 % Polyester



- Soutien-gorge à effet dos lisse, dans un tissu non-tissé, ultra confortable
- Panneau arrière plus haut pour un look uniforme sur les côtés et au dos
- Bonnets moulés sans couture avec pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles ajustables et rigides



Aplanit le dos

MAGDALENA BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

▲ ◡ ● | 1,7

Style 44533 Nu

Bonnets Moyen

Tailles 32-42 AA, A, B, C, D

Agrafes 4 rangées : 32-42 AA, A, B; 32-40 C; 32-38 D
5 rangées : 42 C; 40-42 D

Composition 41 % Polyester, 36 % Nylon, 23 % Spandex



- Soutien-gorge à effet dos lisse, dans un tissu non-tissé, ultra confortable, idéal sous un T-shirt
- Bonnets moulés sans couture avec pochettes en microfibre
- Tissu frais, en microfibre pour un lustre élégant
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques et ajustables

CARACTÉRISTIQUES

▲
Pochettes bilatérales

◡
À armature

◡
Bonnets souples

⊙
Bonnets coupés et cousus

◐
Bonnets en mousse coupés et cousus

⦿
Bonnets moulés

●
Bonnets en mousse moulé

()
Bretelles confort

|
Renforts latéraux

☁
Haute teneur en coton

AMOENA SOUTIENS-GORGE SANS COUTURE

LINGERIE

LEE BONNETS SOUPLES 1,5

Style	44540	 Blanc
Bonnets	Moyen	
Tailles	34-42 A, B, C, D; 34-40 DD	
Agrafes	2 rangées : 34-40 A; 34-38 B; 34-36 C; 34 D 3 rangées : 42 A; 40-42 B; 38-42 C; 36-42 D; 34-40 DD	
Composition	90 % Coton, 7 % Spandex, 2 % Polyuréthane, 1 % Nylon	



- Pour notre 45^e anniversaire
- Soutien-gorge léger en coton à 90 %
- Bonnets moulés avec pochettes en coton
- Ruban Rose symbolique au centre
- Bretelles larges pour un ajustement confortable

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1	2	3	4	5	6	7
Moulé	Coupé et cousu	Tulle	Microfibre	Coton	COOLMAX®	Autre

AMOENA SOUTIENS-GORGE SANS COUTURE

LINGERIE

NOUVEAU
Fermetures
avant et
arrière

MARA BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS FRONT CLOSURE

▲ ◐ ● 1,6

Style	44741	Nu Claire
	44742	Gris Foncé

Bonnets	Moyen/Fort
Tailles	32-44 AA, A, B, C, D, DD
Agrafes	Avant :
	3 rangées : 32-34 AA; 32 A
	4 rangées : 36-40 AA; 34-38 A;
	32-36 B;
	32-34 C; 32 D
	5 rangées : 42-44 AA; 40-44 A; 38-44 B;
	36-42 C; 34-40 D; 32-38 DD
	6 rangées : 44 C; 42-44 D; 40-44 DD
	Arrière :
	2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A; 32-36 B;
	32-34 C; 32 D
	3 rangées : 42-44 AA; 40-44 A; 38-44 B;
	36-44 C; 34-44 D; 32-44 DD

Composition 83 % Nylon, 11 % Spandex, 6 % Polyester
(COOLMAX®)

- Un bestseller repensé dans un nouveau style avec des fermetures avant et arrière,
- Bonnets moulés rembourrés, afin de camoufler les inégalités
- Pochettes respirantes en tissu COOLMAX®
- Fermeture à agrafes coussinée
- Bretelles élastiques et ajustables



CARACTÉRISTIQUES

▲
Pochettes
bilatérales

◐
À armature

◐
Bonnets
souples

⊖
Bonnets
coupés et
cousus

◐
Bonnets en
mousse coupés
et cousus

⊙
Bonnets
moulés

●
Bonnets en
mousse moulé

()
Bretelles
confort

|
Renforts
latéraux

☁
Haute teneur
en coton

AMOENA SOUTIENS-GORGE SANS COUTURE



MARA BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

▲ ◐ ● 1,6

Style	44534	Blanc Cassé
	1150	Nu Claire
	44416	Bleu Minuit
	44023	Gris Foncé



COOLMAX®

Bonnets Moyen/Fort

Tailles 32-44 AA, A, B, C, D, DD

Agrafes 2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D
3 rangées : 42-44 AA; 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C; 34-44 D;
32-44 DD

Composition 83 % Nylon, 11 % Spandex, 6 % Polyester (COOLMAX®)

- Soutien-gorge de style T-shirt, avec pochettes en tissu COOLMAX® pour rester au frais et bien sec
- Bonnets en mousse moulée sans couture
- Pochettes respirantes en tissu COOLMAX®
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques et ajustables

Dispose
d'un fini
NATUREXX®



MARLENA BONNETS SOUPLES

▲ ◐ ● 2,4

Style 2167N Nu

Bonnets Moyen

Tailles 34-42 A, B, C; 32-42 D, DD

Agrafes 2 rangées : 34-38 A, B, C; 32-38 D
3 rangées : 40-42 A, B, C, D; 32-42 DD

Composition 82 % Nylon, 18 % Spandex



- Arcade sur la sous-bande pour aider à soulever le buste avec un support sans armature
- Tissu NATUREXX® qui repousse l'humidité
- Bonnets moulés sans couture avec pochettes en microfibres
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1	2	3	4	5	6	7
Moulé	Coupé et cousu	Tulle	Microfibre	Coton	COOLMAX®	Autre

AMOENA SOUTIENS-GORGE SANS COUTURE



MIRA BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ● () 1,4

Style 44610  Taupe Clair
 Bonnets Moyen
 Tailles 32-42 AA, A, B; 34-40 C, D; 34-38 DD
 Agrafes 2 rangées : 32-40 AA, A, 32-38 B;
 34-40 C, D, DD
 3 rangées : 42 AA, A; 40-42 B;
 38-40 C, D; 38 DD
 Composition 79 % Nylon, 21 % Spandex



- Nouveau soutien-gorge confort avec bonnets sans couture et un tissu en microfibre texturé
- Bonnets moulés avec pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables



MONA BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ● () 1,4

Style 0606  Blanc
 0568  Champagne
 0614  Cognac
 0591  Noir
 Bonnets Moyen
 Tailles 32-42 AA, A, B; 34-40 C, D; 34-38 DD
 Agrafes 2 rangées : 32-40 AA, A; 32-38 B; 34-36 C, D, DD
 3 rangées : 38 AA, A; 40-42 B; 38-40 C, D; 38 DD
 Composition 79 % Nylon, 21 % Spandex



- Un ajustement, confort et support de haut niveau avec bonnets sans couture et tissu en microfibre texturé
- Bonnets moulés et pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

CARACTÉRISTIQUES

▲
Pochettes
bilatérales

◡
À armature

◡
Bonnets
souples

⊕
Bonnets
coupés et
cousus

◐
Bonnets en
mousse coupés
et cousus

●
Bonnets
moulés

●
Bonnets en
mousse moulé

()
Bretelles
confort

▮
Renforts
latéraux

☁
Haute teneur
en coton

AMOENA SOUTIENS-GORGE SANS COUTURE



Haute teneur
en coton

TANYA BONNETS SOUPLES 1,4

Style	44678		Nu
	44679		Noir
Bonnets	Moyen		
Tailles	32-42 A, B, C, D		
Agrafes	2 rangées : 32-40 A; 32-38 B; 32-36 C; 32-34 D 3 rangées : 42 A; 40-42 B; 38-42 C; 36-42 D		



Composition 69 % Coton, 18 % Nylon, 13 % Spandex

- Bonnets moulés; effet lisse sous les vêtements
- Pochettes en microfibre
- Bretelles larges pour plus de confort
- Bretelles élastiques et ajustables

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1	2	3	4	5	6	7
Moulé	Coupé et cousu	Tulle	Microfibre	Coton	COOLMAX®	Autre

AMOENA SOUTIENS-GORGE EFFET COUVRANT



AMBER BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

▲ ◡ ◉ 1,4

Style 44259 Noir
Bonnets Moyen/Fort
Tailles 32-42 AA, A, B, C, D, DD
Agrafes 2 rangées : 32-42 AA, A; 32-40 B;
32-38 C; 32-36 D; 32-34 DD
3 rangées : 42 B; 40-42 C; 38-42 D;
36-42 DD



Composition 79 % Nylon, 21 % Spandex

- Bonnet en mousse douce avec une délicate superposition de dentelle pour un effet camisole
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



HAUT AMBER

Style 44268 Blanc
44261 Noir
Tailles 34-42 A/B, C/D, DD/DDD
Composition 76 % Nylon, 24 % Spandex
Emballage 1 par boîte



- Transformez n'importe quel soutien-gorge en camisole avec cet accessoire en dentelle
- S'accroche facilement et solidement aux bretelles avec les attaches
- Offre une solution pratique pour les encolures plongeantes pour camoufler des cicatrices ou marques de radiothérapie
- Voir aussi le soutien-gorge Amber à la p. 92



DANA BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ◉ ◉ 1,4

Style 0862 Blanc
0750 Noir
Bonnets Moyen
Tailles 32-40 AA; 32-44 A, B, C; 34-42 D, DD
Agrafes 2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A;
32-36 B, C; 34 D
3 rangées : 40-44 A; 38-44 B, C; 36-42 D; 34-42 DD



Composition 87 % Nylon, 13 % Spandex

- Soutien-gorge camisole en micro tissu Jacquard
- Bonnets moulés en microfibre avec pochettes
- Bretelles décoratives, élastiques et ajustables

CARACTÉRISTIQUES

▲
Pochettes
bilatérales

◡
À armature

◡
Bonnets
souples

◉
Bonnets
coupés et
cousus

◉
Bonnets en
mousse coupés
et cousus

◉
Bonnets
moulés

●
Bonnets en
mousse moulé

()
Bretelles
confort

|
Renforts
latéraux

☁
Haute teneur
en coton

AMOENA SOUTIENS-GORGE EFFET COUVRANT

ISABEL

BONNETS SOUPLES



Style 2118 Blanc Noir

Lueur de bougie

Bonnets Moyen

Tailles 36-38 AA; 34-42 A; 34-44 B, C; 34-42 D, DD

Agrafes 2 rangées : 36-38 AA; 34-44 A
3 rangées : 34-44 B, C; 34-40 D; 34-38 DD
4 rangées : 42 D; 38-42 DD

Composition 40 % Nylon, 32 % Coton, 18 % Polyester, 6 % Spandex, 4 % LYCRA®

- Soutien-gorge camisole avec un délicat panneau de dentelle
- Pochettes en coton
- Bretelles minces, élastiques et ajustables



STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1

Moulé

2

Coupé
et cousu

3

Tulle

4

Microfibre

5

Coton

6

COOLMAX®

7

Autre

AMOENA CAMIS SPORT


ACTIVE



CAMI SPORT ZIP

▲ ◡ ⊕ 2,4

Style	44070	■ Noir
Bonnets	Moyen	
Tailles	S (32-38 A, 32-34 B, 32 C); M (38-40 A, 36-40 B, 34-38 C, 34 D); L (42-44 A, 40-44 B, 38-42 C, 36-40 D, 36-38 DD); XL (44-46 B, 42-46 C, 40-44 D, 38-42 DD)	
Composition	82 % Micro Nylon, 18 % Spandex	

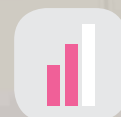

SUPPORT MOYEN

- Cami Sport à dos nageur et fermeture zip à l'avant pour plus de facilité
- Agrafes discrètes sous la fermeture zip procurent encore plus de sécurité
- Pochettes de microfibre frais

CARACTÉRISTIQUES

▲
Pochettes bilatérales

◡
À armature

◡
Bonnets souples

⊕
Bonnets coupés et cousus

◐
Bonnets en mousse coupés et cousus

⊙
Bonnets moulés

●
Bonnets en mousse moulé

()
Bretelles confort

|
Renforts latéraux

☁
Haute teneur en coton

AMOENA CAMIS SPORT



ESTER BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ● 1,4

Style 42576 Blanc
42577 Noir/Gris

Bonnets Moyen/Fort

Tailles 34-44 A, B, C, D; 36-42 DD

Agrafes 7 rangées : 34-38 A; 34-36 B; 34 C
8 rangées : 40-44 A; 38-42 B; 36-40 C;
34-38 D; 36 DD
9 rangées : 44 B; 42-44 C; 40-44 D; 38-42 DD

Composition 82 % Nylon, 18 % Spandex



**SUPPORT
MOYEN**

- Tissus synthétiques laissant circuler l'air; mailles sur le côté et au dos aide à l'évacuation de l'humidité
- Fermeture à agrafes à l'avant
- Bonnets moulés avec pochettes de microfibre frais
- Bretelles larges, rembourrées et ajustables



PERFORMANCE CAMI SPORT

▲ ◡ ● 1,4


Style 0654 Blanc
0658 Noir

Bonnets Moyen

Tailles 32-42 AA, A, B, C, D, DD

Agrafes 3 rangées : 32-42 AA, A, B, C, D, DD

Composition 85 % Nylon, 15 % Spandex

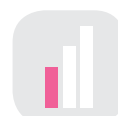

**SUPPORT
LÉGER**

- Côtés et panneau avant en tissu mesh pour permettre à l'humidité de s'échapper
- Bonnets moulés et sans couture avec pochettes en microfibre
- Fermeture standard de soutien-gorge à l'arrière
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables



POWER CAMI SPORT

▲ ◡ ● 1,6

Style 1152 Noir/Gris

Bonnets Moyen/Fort

Tailles 32-42 AA, A, B, C, D, DD

Agrafes 3 rangées : 32-42 AA, A, B, C, D, DD

Composition 84 % Nylon, 16 % Spandex



COOLMAX®



**SUPPORT
MOYEN**

- Tissu mesh détaillé à l'avant pour un look sport; le tissu mesh assure une ventilation
- Bonnets moulés sans couture avec pochettes
- Pochettes en tissu respirant COOLMAX®
- Fermeture standard de soutien-gorge à l'arrière
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1 Moulé **2** Coupé et cousu **3** Tulle **4** Microfibre

5 Coton **6** COOLMAX® **7** Autre



NOUVEAU



VALLETTA LONG

Style 71512 ☐ Blanc
71426 ☒ Noir

Tailles 6-24

Composition 90 % Modal, 10 % Spandex

- Basé sur notre haut meilleur vendeur Valletta
- Tissu Modal (Tencel) doux pour un confort ultime de jour comme de nuit
- Soutien-gorge intégré à pochettes avec bonnets doux et rembourrés pouvant maintenir une prothèse mammaire ou un complément bien en place
- Valletta Long dispose de la couture ondulée Amoena afin d'assurer un ajustement optimal des prothèses régulières et des compléments mammaires (voir p. 100)
- Pochettes bilatérales
- Valletta Long présente des fentes latérales à l'ourlet du bas
- Idéal pour les femmes qui n'aiment pas porter un soutien-gorge en raison des effets du traitement
- Encolure ronde avant et arrière
- Bretelles spaghetti doubles ajustables



Valletta Long descend 3 po plus bas le haut Valletta régulier

HAUT VALLETTA

Style 70230 ☐ Blanc
44075 ☒ Nu
44076 ☐ Charcoal Mélange
70229 ☐ Noir

Tailles 6-24

Composition 90 % Modal, 10 % Spandex

- Tissu Modal (Tencel) doux pour un confort ultime de jour comme de nuit (comme tenue de nuit, il est parfait !)
- Soutien-gorge intégré à pochettes avec bonnets doux et rembourrés pouvant maintenir une prothèse mammaire bien en place
- Idéal pour les femmes qui n'aiment pas porter un soutien-gorge en raison des effets du traitement
- Encolure ronde avant et arrière
- Bretelles spaghetti double et ajustables



La production future des hauts Valletta possèdera la Couture Ondulée Amoena (voir p.100)

ACCESSOIRES DE LINGERIE



HAUT AMBER

Style 44268 ☐ Blanc
44261 ☒ Noir
Tailles 34-42 A/B, C/D, DD/DDD
Composition 76 % Nylon, 24 % Spandex
Emballage 1 par boîte

- Un accessoire dentelle idéal pour transformer presque n'importe quel soutien-gorge en cami sport
- S'accroche facilement et solidement aux bretelles avec les attaches
- Offre une solution pratique pour les encolures plongeantes lors de présence de cicatrices ou de marques de radiothérapie
- Voir aussi le soutien-gorge Amber à la p. 92



COUSSINETS POUR ÉPAULES EN SILICONE

Style 050
052 Présentoir (pour la vente au détail seulement)
Tailles Unique
Emballage 2 par boîte

- Solution confortable pour les bretelles qui ont tendance à s'enfoncer dans l'épaule
- Les coussinets en silicone souples et transparents se glissent facilement par-dessus des bretelles de taille standard
- Peuvent contribuer à répartir le poids chez certaines femmes atteintes de certains problèmes de santé
- Le présentoir contient 12 ensembles de coussinets



RALLONGES POUR SOUTIEN-GORGE*

Style 193 ☐ Blanc
☐ Lueur de bougie
☐ Beige Perle
☒ Noir

Emballage Rouleau de 36 po

- 4 Agrafes

*Disponible en mai



POCHETES POUR SOUTIEN-GORGE

Style 191 ☐ Blanc
☐ Lueur de bougie
☐ Beige Perle
☒ Noir

Tailles S(32-36); M(38-42); L(44-46)
Composition 86 % Nylon/14 % Spandex
Emballage 2 par sac

- Ajoutez des pochettes à n'importe quel soutien-gorge
- Instructions de couture comprises



CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DES MAILLOTS AMOENA

Les maillots spéciaux Amoena combinent des styles colorés et flatteurs pour chaque silhouette avec des touches d'été et de soleil. Tous les styles sont spécialement développés pour les besoins individuels des femmes après une chirurgie mammaire – une prothèse mammaire qui est maintenu bien en place dans la pochette du bonnet, pour qu'elle puisse nager et se prélasser au soleil en toute confiance. La collection est créée à notre siège social d'Amoena à Raubling, Allemagne. Nos maillots sont confectionnés minutieusement avec des matériaux de haute qualité. Finition spéciale – la nouvelle Couture Ondulée Amoena – sur la bande sous le bonnet assure un ajustement optimal de la prothèse de baignade Amoena Aqua Wave (recommandée pour la natation), ainsi que pour nos autres prothèses et compléments mammaires.



Bretelles douces et confortables

- Soutiennent une prothèse mammaire ou de natation et soulagent la pression sur les épaules et le cou
- Plusieurs modèles ont des bretelles ajustables
- Augmentent en largeur en fonction des plus grandes tailles
- Certains modèles ont des bretelles multi-fonctionnelles : détachables, licou, croisées ou traditionnelles

Encolures différentes

- Options d'encolures ajustables pour un style individuel
- Encolures plus hautes pour couvrir cicatrices et brûlures

Pochettes de bonnets invisibles


- Accessible par le côté pour une insertion facile; une petite ouverture sur le dessus de la pochette vous permet d'ajuster la prothèse de natation pour un parfait ajustement
- L'ouverture sur le côté du bonnet aide à garder la prothèse de natation en place

Structure intégrée spéciale

- Garde les prothèses, compléments mammaires ou la prothèse de baignade Amoena Aqua Wave près du corps
- Bonnets légèrement rembourrés intégrés camouflent le manque d'uniformité
- **NOUVEAU** : La Couture Ondulée Amoena est une couture intérieure sous le buste qui fournit un support additionnel pour les prothèses mammaires additional breast form support


Nouveau ! Couture Ondulée Amoena

- La couture ondulée latérale sur la bande sous le buste fournit un support additionnel

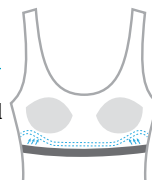

Ligne de jambe

- Formes modestes et flatteuses appropriées pour tous les groupes d'âges et toutes les silhouettes

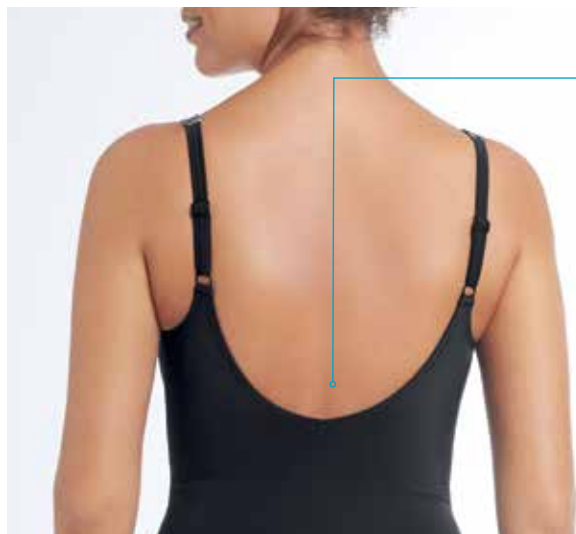

Coupe arrière

- Variété de coupes arrière de hautes à basses
- Bretelles ajustables, détachables ou horizontales fournissent un support additionnel pour les coupes arrière basses
- Les hauts de bikini possèdent une fermeture ajustable pour un meilleur ajustement

Matériaux fonctionnels de haute qualité

- **NOUVEAU** : Doublure élastique confortable offrant une protection opaque
- Matériaux recyclés pour durabilité
- Matériaux perfectionnés comme le XTRA LIFE™ LYCRA®, sans latex, résistant au chlore et protégeant les rayons UV

MAILLOTS AMOENA – STYLE



ROME UNE PIÈCE

Style 71379  Marine/Turquoise
 Tailles 6-16 B, 8-16 C
 Composition 78 % Nylon,
 22 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

- Style élégant et classique à imprimé dynamique
- Matériau recyclé VITA possédant une excellente protection contre les rayons UV, résistant au chlore, à l'accumulation et aux lotions et huiles solaires
- LYCRA® XTRA LIFE™ pour une conservation de la forme du maillot et des bonnets, ayant une forte résistance au chlore
- Soutien-gorge intégré supportant avec pochettes et bonnets doux et rembourrés
- Couture Ondulée Amoena intégrée innovante sur la bande sous le buste fournit un support supplémentaire pour les prothèses mammaires
- Bretelles ajustables au dos



ALABAMA TANKINI

Style 71513  Marine/Rouille
 Tailles 8-20 B, C
 Composition 80 % Nylon,
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

- Coupe en A pour avantager la silhouette
- Xtra Life LYCRA® pour une conservation de la forme du maillot et des bonnets, ayant une forte résistance au chlore
- Soutien-gorge intégré supportant avec pochettes et bonnets doux et rembourrés
- Couture Ondulée Amoena intégrée innovante sur la bande sous le buste fournit un support supplémentaire pour les prothèses mammaires
- Bretelles élastiques et ajustables



ALABAMA CULOTTE TAILLE HAUTE

Style 71332  Marine/Rouille
 Tailles 8-20
 Composition 80 % Nylon,
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

- Se porte comme culotte taille haute ou comme culotte normale lorsque la bande à la taille est retournée vers le bas
- Xtra Life LYCRA® pour une conservation de la forme du maillot, ayant une forte résistance au chlore





ALABAMA MI-CORSAGE

Style 71514  Marine/Rouille
 Tailles 8-24 B, C; 10-24 D, DD
 Composition 80 % Nylon,
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

- Devant ajustable qui offre deux options différentes de le porter : porter haut pour camoufler les marques de radiothérapie ou cicatrices ou plus bas pour un décolleté plus plongeant
- Doublure en mesh pour un effet moulant moyen
- Bretelles élastiques et ajustables
- Soutien-gorge intégré supportant avec pochettes et bonnets doux et rembourrés
- Couture Ondulée Amoena intégrée innovante sur la bande sous le buste fournit un support supplémentaire pour les prothèses mammaires



ALABAMA MI-CORSAGE ENCOLURE HAUTE

Style 71326  Marine/Rouille
 Tailles 8-24 B,C; 8-22 D
 Composition 80 % Nylon,
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

- Encolure haute avec insertion mesh pour camoufler cicatrices ou marques de radiothérapie
- Doublure en mesh à l'avant pour un effet moulant moyen
- Bretelles élastiques et ajustables
- Soutien-gorge intégré supportant avec pochettes et bonnets doux et rembourrés
- Couture Ondulée Amoena intégrée innovante sur la bande sous le buste fournit un support supplémentaire pour les prothèses mammaires



CARACTÉRISTIQUES



MAILLOTS AMOENA – CLASSIC



AYON SARONG

Style 71113  Noir/Blanc
 Tailles 10-26 B, C
 Composition 80 % Nylon,
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

- Imprimé géométrique noir et blanc sur l'ensemble du maillot
- Jupe courte avec effet plissé pour avantager la silhouette
- Doublure en mesh à l'avant pour un effet moulant moyen
- Culotte noire sous la jupe pour un effet plus couvrant
- Xtra Life LYCRA® pour une conservation de la forme du maillot et des bonnets, ayant une forte résistance au chlore
- Soutien-gorge intégré supportant avec pochettes et bonnets doux et rembourrés
- Couture Ondulée Amoena intégrée innovante sur la bande sous le buste fournit un support supplémentaire pour les prothèses mammaires
- Bretelles élastiques et ajustables



AYON HAUT BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

Style 71117  Noir/Blanc
 Tailles 6-16 B, C, D
 Composition 80 % Nylon,
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

- Imprimé géométrique noir et blanc sur l'ensemble du maillot
- 2 options pour les bretelles : droites ou en licou
- Xtra Life LYCRA® pour une conservation de la forme du maillot et des bonnets, ayant une forte résistance au chlore
- Bretelles élastiques et ajustables



AYON CULOTTE TAILLE HAUTE

Style 71118  Noir/Blanc
 Tailles 6-16
 Composition 80 % Nylon,
 20 % Spandex (LYCRA® XTRA LIFE™)

- Se porte comme culotte taille haute ou comme culotte normale lorsque la bande à la taille est retournée vers le bas
- Xtra Life LYCRA® pour une conservation de la forme du maillot, ayant une forte résistance au chlore



* Doublure fonctionnelle élastique à l'avant et arrière fournit un support additionnel et contrôle élevé de la silhouette
 ** Doublure fonctionnelle élastique à l'avant fournit un support additionnel et contrôle moyen de la silhouette

FLORIDA PLEIN CORSAGE

Style 71343  Noir/Blanc

Tailles 8-26 B, C, 10-24 D, DD

Composition 80 % Nylon,
20 % Spandex
(LYCRA® XTRA LIFE™)

- Élégant imprimé de feuille de palmier avec légères touches argentées
- Xtra Life LYCRA® pour une conservation de la forme du maillot et des bonnets, ayant une forte résistance au chlore
- Soutien-gorge intégré supportant avec pochettes et bonnets doux et rembourrés
- Couture Ondulée Amoena intégrée innovante sur la bande sous le buste fournit un support supplémentaire pour les prothèses mammaires
- Grandes bretelles élastiques et ajustables



CARACTÉRISTIQUES



Pochettes
bilatérales



À armature



Bonnets en
mousse moulé



Mi-corsage*



Plein
corsage**



Bonnets
ultra doux



Doublure opaque
à l'avant



Doublure opaque
à l'avant et à l'arrière



RHODES UNE PIÈCE

Style 70842  Bleu Minuit

Tailles 6-22 B, C

Composition 100 % Polyester

- Maillot une pièce de sport fait de tissu résistant au chlore à 100 %
- Bonnets plus serrés, athlétiques pour un support additionnel pour les sports aquatiques
- Tissu DARWIN® résistant au chlore avec une parfaite conservation de la forme
- Soutien-gorge intégré supportant avec pochettes et bonnets doux et rembourrés
- Couture Ondulée Amoena intégrée innovante sur la bande sous le buste fournit un support supplémentaire pour les prothèses mammaires



Darwin



TORONTO UNE PIÈCE ENCOLURE HAUTE

Style 71390  Noir/Purple/Mint

Tailles 6-18 B, 8-18 C

Composition 100 % Polyester

- Style et design sportifs, avec encolure haute et larges bretelles croisées à l'arrière
- Tissu DARWIN® résistant au chlore avec une parfaite conservation de la forme
- Soutien-gorge intégré à pochettes avec bonnets doux et rembourrés
- Couture Ondulée Amoena intégrée innovante sur la bande sous le buste fournit un support supplémentaire pour les prothèses mammaires



Darwin

* Doublure fonctionnelle élastique à l'avant et arrière fournit un support additionnel et contrôle élevé de la silhouette

** Doublure fonctionnelle élastique à l'avant fournit un support additionnel et contrôle moyen de la silhouette

ACCESSOIRES MAILLOTS



PROTHÈSE DE BAIGNADE AQUA WAVE

Style 149
Tailles 1-14

- S'harmonise parfaitement avec la NOUVELLE Couture Ondulée Amoena présente dans les maillots Amoena
- Prothèse en silicone transparente, à la forme unique, pour vos activités aquatiques
- Cette prothèse symétrique présente des ondulations à l'arrière pour permettre à l'air et à l'eau de circuler, afin de prévenir l'effet de succion
- Livrée dans un sac à cordon mode et étanche, assez grand pour contenir un maillot de bain humide

Sac pour prothèse de baignade Aqua Wave est vendu séparément, style #049



STYLES BIENTÔT DISCONTINUÉS

Les styles suivants seront bientôt discontinués. Veuillez vérifier avec votre représentante les styles et les tailles qui sont toujours disponibles. Les prix spéciaux pour ces styles sont sur notre liste de prix la plus récente.



JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



PURFIT

Style 333
Tailles 4, 6, 8, 10, 12

- Spécialement conçue pour retrouver une symétrie pendant le processus d'expansion tissulaire lors d'une reconstruction
- Alors que le processus d'expansion tissulaire a lieu, le volume de la prothèse peut s'ajuster au volume de l'autre sein ou au volume désiré en ajoutant ou en retirant des fibres
- Le revêtement amovible se lave facilement pour maintenir un environnement hygiénique
- Ultraléger pour un confort optimal au quotidien
- Insert en silicone qui se porte aussi comme complément



Avec
COOLMAX®
pochettes

ANNABELL BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ 2,6

Style 2126 Blanc Beige Perle Noir
Bonnets Moyen
Tailles 34-38 AA; 34-40 A, B, C, D
Agrafes 2 rangées : 34-38 AA; 34-38 A, B; 34-36 C
3 rangées : 40 A, B; 38-40 C; 34-40 D
Composition 65 % Polyester, 24 % Nylon, 6 % Spandex, 5 % Rayonne




- Bordure en dentelle, design texturé aux bonnets
- Pochettes en tissu respirant COOLMAX® aux bonnets
- Bretelles Ajustables. Élastique, 34-38 AA; 34-38 A, B; 34-36 C; Rigide, 40 B; 38-40 C, 34-40 D



ANNETTE À ARMATURE

▲ ◡ ⊕ ⊙ () | 1,4

Style 44028 Blanc Cassé
1087 Noir/Nu
Bonnets Moyen
Tailles 34-48 B, C, D; 34-46 DD;
34-44 DDD; 34-42 G
Agrafes 2 rangées : 34-38 B; 34-36 C; 34 D
3 rangées : 40-48 B; 38-48 C; 36-48 D;
34-46 DD; 34-44 DDD; 34-42 G
Composition 80 % Nylon, 20 % Spandex

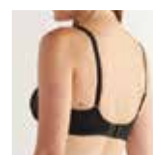

- Superposition de dentelle sur tissu uni en microfibre aux bonnets
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles larges, coussinées, élastiques et ajustables

ANNETTE CULOTTE

Style 44029 Blanc Cassé
Tailles 8-20
Composition 73 % Nylon, 20 % Spandex, 7 % Coton



CARACTÉRISTIQUES

▲
Pochettes
bilatérales

◡
À armature

◡
Bonnets
souples

⊕
Bonnets
coupés et
cousus

⊕
Bonnets en
mousse coupés
et cousus

⊙
Bonnets
moulés

●
Bonnets en
mousse moulé

()
Bretelles
confort

|
Renforts
latéraux

☁
Haute teneur
en coton



AURELIE BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ 2,4

Style 44277 ■ Noir

Bonnets Moyen

Tailles 32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD

Agrafes 2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D

3 rangées : 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C;
34-44 D; 32-44 DD; 34-42 DDD

Composition Bonnets A, B, C : 67 % Nylon, 25 % Spandex, 8 % Polyester
Bonnets D, DD, DDD : 68 % Nylon, 26 % Spandex,
6 % Polyester

- Dentelle luxueuse et tissu Jacquard avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes, coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



AURELIE À ARMATURE

▲ ◡ ⊕ 2,4

Style 44278 ■ Noir

Bonnets Moyen

Tailles 32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD

Agrafes 2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D

3 rangées : 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C;
34-44 D; 32-44 DD; 34-42 DDD

Composition Bonnets A, B, C : 67 % Nylon, 24 % Spandex, 9 % Polyester
Bonnets D, DD, DDD : 67 % Nylon, 25 % Spandex,
8 % Polyester

- Dentelle luxueuse et tissu Jacquard avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



AURELIE BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

▲ ◡ ● 1,4

Style 44279 ■ Noir

Bonnets Moyen

Tailles 32-44 AA, A, B, C, D, DD

Agrafes 2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A;
32-36 B; 32-34 C; 32 D

3 rangées : 42-44 AA; 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C;
34-44 D; 32-44 DD

Composition 46 % Nylon, 37 % Polyester, 17 % Spandex

- Dentelle luxueuse et tissu Jacquard avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

- | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Moulé | Coupé
et cousu | Tulle | Microfibre | Coton | COOLMAX® | Autre |

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée.



AURELIE CULOTTE

Style 44280  Noir
Tailles 6-20
Composition 55 % Nylon, 26 % Spandex,
11 % Coton, 8 % Polyester



- Inserts de dentelle à l'avant et au dos pour refléter la dentelle des soutiens-gorge Aurelie
- Tissu Jacquard offre un fini perlé pour un effet luxueux
- Breloque en cristal sur la boucle du centre, avec bordure dorée pour plus d'élégance




COTON/
BIOLOGIQUE

BECKY BONNETS SOUPLES SANS COUTURE

    1,5

Style 44418  Nu
Bonnets Moyen
Tailles S (32-36 A; 32-34 B; 32 C)
M (38-40 A; 36-38 B; 34-36 C; 32-34 D)
L (42-44 A; 40-42 B; 38-40 C; 36-38 D; 34-36 DD)
XL (44-46 B; 42-44 C; 40-42 D; 38-40 DD)
2XL (46 C; 44-46 D; 42-46 DD)
Composition 60 % Coton Biologique, 32 % Nylon, 8 % Spandex



- Tissu tissé sans aucune couture ni fermeture inconfortables
- Bonnets moulés à pochettes
- Bretelles et sous-bande larges; effet drapé au centre pour une meilleure séparation
- Soutien-gorge idéal pour dormir



BELLA BONNETS SOUPLES

   2,5 

Style 2114  Beige Perle
Bonnets Affaissé/Moyen
Tailles 34-42 A; 34-44 B; 34-46 C; 36-46 D
Agrafes 2 rangées : 34-38 A, B; 34 C
3 rangées : 40-42 A; 40-44 B; 36-38 C
4 rangées : 40-46 C; 36 D
5 rangées : 40-46 D
Composition 58 % Nylon, 30 % Coton, 6 % Spandex, 6 % LYCRA®



- Tissu Jacquard et bonnets rembourrés en fibres Fiberfill
- Pochettes en coton
- Bretelles élastiques et ajustables

CARACTÉRISTIQUES

-  Pochettes bilatérales
-  À armature
-  Bonnets souples
-  Bonnets coupés et cousus
-  Bonnets en mousse coupés et cousus
-  Bonnets moulés
-  Bonnets en mousse moulé
-  Bretelles confort
-  Renforts latéraux
-  Haute teneur en coton

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



BIANCA BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

▲ ◐ ● | 1,4

Style 44216 ☐ Blanc
Bonnets Moyen
Tailles 32-42 AA, A, B, C, D
Agrafes 2 rangées : 32-42 AA; 32-40 A; 32-38 B;
32-36 C; 32 D
3 rangées : 42 A; 40-42 B; 38-42 C; 34-42 D
Composition 77 % Nylon, 23 % Spandex

- Option dos nageur



DIANNA BONNETS SOUPLES

▲ ◐ ● () 1,4

Style 44112 ☐ Blanc
44107 ☒ Noir
44116 ☐ Rose Nu
Bonnets Moyen
Tailles 32-44 AA, A, B, C, D
Agrafes 2 rangées : 32-42 AA; 32-40 A; 32-36 B;
32-34 C; 32 D
3 rangées : 44 AA; 42-44 A; 38-44 B; 36-44 C; 34-44 D
Composition 78 % Nylon, 19 % Spandex, 3 % Coton

- Tissu Jacquard texturé pour créer de l'élégance
- Bonnets moulés en microfibre MicroSense avec pochettes
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables



ELLA BONNETS SOUPLES

▲ ◐ () 2,3

Style 2133 ☐ Blanc ☐ Beige Perle
Bonnets Fort
Tailles 34-42 B; 34-46 C, D, DD; 36-42 DDD
Agrafes 3 rangées : 34-42 B, C; 34-40 D, DD
4 rangées : 44-46 C; 42-46 D, DD; 36-42 DDD
Composition 60 % Polyester, 31 % Nylon, 9 % Spandex

- Tissu floral Jacquard avec bonnets rembourrés en fibres Fibrefill
- Pochettes respirantes en tulle
- Dos en tissu Powernet pour procurer support et confort au quotidien



STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

- 1 Moulé 2 Coupé et cousu 3 Tulle 4 Microfibre

- 5 Coton 6 COOLMAX® 7 Autre

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée.

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



ELLEN BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ 2,4

Style	44419	Rose Nu
	44245	Noir/Nu
Bonnets	Moyen/Fort	
Tailles	32-44 A, B, C, D, DD	
Agrafes, avant	5 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D 6 rangées : 40-44 A; 38-44 B; 36-42 C; 34-40 D; 32-38 DD 7 rangées : 44 C; 42-44 D; 40-44 DD	
Agrafes, arrière	2 rangées : 32-42 A; 32-40 B; 32-38 C; 32-36 D; 32-34 DD 3 rangées : 44 A; 42-44 B; 40-44 C; 38-44 D; 36-42 DD 4 rangées : 44 DD	
Composition	78 % Nylon, 22 % Spandex	



- Fermetures avant et arrière; un soutien-gorge idéal pour celles qui ont une amplitude de mouvements limitée
- Bonnets légèrement rembourrés en fibrefill
- Bretelles décoratives, élastiques et ajustables



Haute teneur en coton

FRANCES BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ ⊙ 2,5

Style	2128	Rose
Bonnets	Affaissé/Moyen	
Tailles	XS (28/30); S (32/34); M (36/38); L (40/42); XL (44/46); 2XL (48/50)	
Bonnets	A/B; C/D; DD/DDD	
Agrafes	4 rangées : XS (A/B, C/D); S (A/B); M (A/B) 5 rangées : XS (DD/DDD); S (C/D, DD/DDD); M (C/D, DD/DDD); L (A/B, C/D); XL (A/B, C/D); 2XL (A/B, C/D) 6 rangées : L (DD/DDD); XL (DD/DDD) 7 rangées : 2XL (DD/DDD)	
Composition	90 % Coton, 10 % Spandex	



- Soutien-gorge de loisirs à fermeture avant
- Tissu en coton ultra doux offrant un confort apaisant à la peau sensible
- Pour un meilleur support, nous vous recommandons de porter une prothèse Amoena Loisir avec ce soutien-gorge (voir p. 53)



Avec tissu COOLMAX®

KELLY BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ ⊙ 2,6

Style	2153	Nu
Bonnets	Fort	
Tailles	34-46 B,C,D,DD; 36-44 DDD	
Agrafes	3 rangées : 34-42 B, C; 34-40 D; 34-40 DD 4 rangées : 44-46 B, C; 42-46 D, DD; 36-44 DDD	
Composition	37 % Polyester (COOLMAX®), 28 % Polyester, 14 % Coton, 11 % Spandex, 10 % Nylon	



- Pourvu d'une arcade sur la sous-bande pour aider à soulever le buste avec un support sans armature
- Pochettes respirantes en tissu COOLMAX®
- Dentelle décorative sur les bretelles offrant une touche féminine
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

CARACTÉRISTIQUES

▲
Pochettes bilatérales

◡
À armature

◡
Bonnets souples

⊕
Bonnets coupés et cousus

⊕
Bonnets en mousse coupés et cousus

⊙
Bonnets moulés

●
Bonnets en mousse moulé

()
Bretelles confort

▮
Renforts latéraux

⊙
Haute teneur en coton

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Dispose
d'un fini
NATUREXX®



MARLENA BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ● 2,4

Style 2167N  Noir
Bonnets Moyen
Tailles 34-42 A, B, C; 32-42 D, DD
Agrafes 2 rangées : 34-38 A, B, C; 32-38 D
3 rangées : 40-42 A, B, C, D; 32-42 DD
Composition 82 % Nylon, 18 % Spandex



- Arcade sur la sous-bande pour aider à soulever le buste avec un support sans armature
- Tissu NATUREXX® qui repousse l'humidité
- Bonnets moulés sans couture avec pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables



RITA BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ 2,6

Style 44234  Bleu Minuit
Bonnet Moyen
Tailles 34-44 A, B, C; 34-46 D; 36-46 DD
Agrafes 2 rangées : 34-44 A; 34-38 B; 34-36 C
3 rangées : 40-44 B; 38-44 C; 34-38 D;
36-38 DD
4 rangées : 40-46 D, DD
Composition 77 % Polyester, 19 % Nylon, 4 % Spandex



- Le tissu est légèrement brillant et l'encolure en dentelle extensible épouse le corps
- Pochettes en tissu respirant COOLMAX® aux bonnets aident à rester au frais et sec
- Bretelles élastiques et ajustables



PERFORMANCE SPORTS BRA

▲ ◡ ● 1,4

Style 0794  Nu
Bonnet Moyen
Tailles 34-42 A, B, C, D, DD
Agrafes 3 rangées : 32-42 AA, A, B, C, D, DD
Composition 85 % Nylon, 15 % Spandex



- Côtés et panneau avant en tissu mesh pour permettre à l'humidité de s'échapper
- Bonnets moulés et sans couture avec pochettes en microfibre
- Fermeture standard de soutien-gorge à l'arrière
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables



**SUPPORT
MOYEN**

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

- 1** Moulé **2** Coupé et cousu **3** Tulle **4** Microfibre

- 5** Coton **6** COOLMAX® **7** Autre

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée.



AYON TANKINI

Style 71116  Noir/Blanc
Tailles 8-20 B, C
Composition 80 % Nylon,
20 % LYCRA® XTRA LIFE™

- Coupe en A pour avantager chaque silhouette
- Bretelles élastiques, larges et ajustables



AYON UNE PIÈCE

Style 71112  Noir/Blanc
Tailles 8-26 B, C, D
Composition 80 % Nylon,
20 % LYCRA® XTRA LIFE™

- Imprimé géométrique en noir et blanc, à encolure haute et insertion mesh pour camoufler cicatrices ou marques
- Effet plissé à l'avant sur les côtés pour créer une silhouette plus svelte
- Bretelles élastiques et ajustable



CARACTÉRISTIQUES

 Pochettes bilatérales

 À armature

 Bonnets en mousse moulé

 Mi-corsage*

 Plein corsage**

 Bonnets ultra doux

 Doublure opaque à l'avant

 Doublure opaque à l'avant et à l'arrière



COCOS UNE PIÈCE



Style 71122  Noir/Blanc
 Tailles 6-18 B, C, D
 Composition 80 % Nylon,
 20 % LYCRA® XTRA LIFE™

- Ligne coupée au laser en noir et blanc sous le buste
- Bretelles élastiques et ajustables



MAILLOTS BIENTÔT DISCONTINUÉS



HAUT COCOS



Style 71123  Noir
 Tailles 6-16 B, C
 Composition 80 % Nylon,
 20 % LYCRA® XTRA LIFE™

- Ouverture avant avec un zip décoratif
- Fronces à l'avant pour avantager la poitrine
- Bretelles élastiques, larges et ajustables



COCOS CULOTTE TAILLE MOYENNE



Style 71124  Noir
 Tailles 6-20
 Composition 80 % Nylon,
 20 % LYCRA® XTRA LIFE™

- Hauteur des coutures latérales est de 6 po dans une taille 8
- Plissé sur les côtés avantage la silhouette



* Doublure fonctionnelle élastique à l'avant et arrière fournit un support additionnel et contrôle élevé de la silhouette
 ** Doublure fonctionnelle élastique à l'avant fournit un support additionnel et contrôle moyen de la silhouette



KEY WEST UNE PIÈCE



Style 71299  Marine Foncé

71298  Noir

Tailles 6-22 B, 8-20 C, D

Composition 100 % Polyester

- Maillot Sport Une Pièce avec zip au centre, qui s'ouvre complètement pour un accès facile
- Panneau cousu à l'avant amincissant et confortable
- Coutures argentées et apparentes sur le panneau avant
- Dos nageur qui favorise les mouvements
- Doublure en tissu powermesh au haut du maillot pour plus de support
- Bonnets très doux
- Le tissu Darwin résiste 100 % au chlore



RHODES UNE PIÈCE



Style 70654  Noir

Tailles 6-22 B, C

Composition 100 % Polyester

- Maillot Sport essentiel, une pièce et fait 100 % de tissu résistant au chlore. Idéal pour toute activité aquatique
- Doubles coutures à l'avant pour un effet amincissant
- Ajustement plus serré pour une tenue optimale et une silhouette incroyable



CARACTÉRISTIQUES



FOULARDS BIENTÔT DISCONTINUÉS

Les styles suivants seront bientôt discontinués. Veuillez vérifier avec votre représentante les styles et les tailles qui sont toujours disponibles. Les prix spéciaux pour ces styles sont sur notre liste de prix la plus récente.



JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS




MOONFLOWER

Style 44711S  Marine
Composition 95 % Viscose de Bambou,
5 % Spandex



MARIGOLD

Style 43813  Baie Rouge
43812  Noir
Composition 95 % Viscose de Bambou,
5 % Spandex

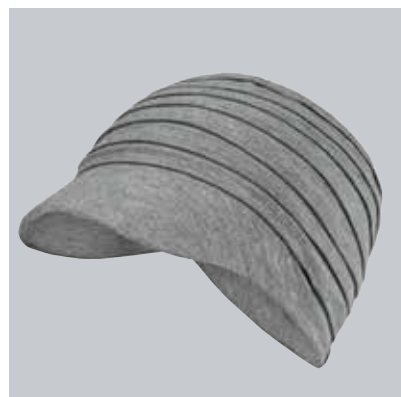

TIGERLILY

Style 43482  Ivoire
43484  Gris Mélange
Composition 95 % Viscose de Bambou,
5 % Spandex



WILLOW

Style 44712S  Bleu Mélange
Composition 95 % Viscose de Bambou,
5 % Spandex



CLOVER

Style 43532  Ivoire
43533  Noir
43534  Prune Intense
Composition 95 %  TENCEL
5 % Spandex



DAYLILY

Style 44710S  Rubis
43486  Gris Mélange
43485  Sable
43811  Bleu Nuit
43810  Noir
Composition 95 % Viscose de Bambou,
5 % Spandex



BONNET DE NUIT

Style 43525  Ivoire
43526  Noir
Composition 95 % Viscose de Bambou,
5 % Spandex



BONNET DE BAINADE

Style 70874  Marine
70873  Noir
Composition 80 % Nylon,
20 % Spandex



Fabriqué avec Tencel®, une fibre naturelle et écoresponsable par Lenzing ; extrait de la fibre de bois, ce tissu est plus doux que la soie, plus absorbant que le coton et demeure encore plus frais que le lin.

RESSOURCES

Avoir les bons outils, à portée de main, améliore et facilite votre expertise. Nous avons mis ici des chartes de tailles et de mesures pour les prothèses mammaires, la lingerie, et un condensé pratique des caractéristiques des prothèses mammaires pour une ressource en un coup d'œil.






4 TRUCS POUR AUGMENTER VOS VENTES

Par notre experte en vente au détail **Alexandra Ferreira**

Le merchandising est la présentation d'un produit afin de susciter la curiosité et de motiver le consommateur à acheter. Tout dépend de la façon dont nous présentons nos produits, et quand le tout est fait de la bonne façon, ce n'est pas long que nous voyons les articles se vendre comme des petits pains chauds. Ces techniques sont appuyées par la recherche et sont utilisées à travers le monde entier par les leaders de l'industrie. Il est essentiel de mettre en place un bon placement de produits; absolument tout dans votre boutique lance un message au consommateur et influence leur décision lorsqu'ils achètent.

1 PLANIFIER

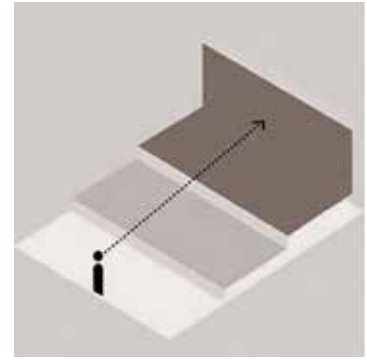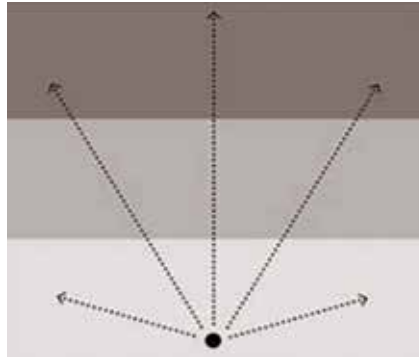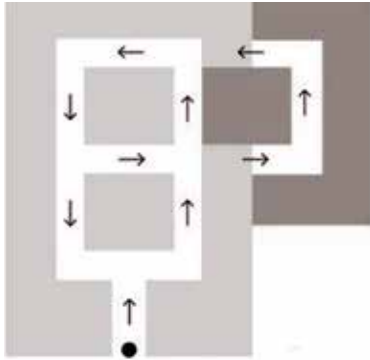

Commencez par votre Plan de Boutique

Guidez votre clientèle alors qu'ils sont en boutique.

Les gens magasinent en général dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et ont tendance à se diriger vers la droite en entrant dans une boutique. Essayez d'identifier la meilleure façon de se déplacer en magasin et assurez-vous d'allouer suffisamment d'espace afin de permettre aux clientes de se déplacer confortablement. Les produits doivent toujours être accessibles.

Planifier son Placement de Produits

Pensez où placer vos produits plus récents et vos produits plus vieux; planifiez votre espace afin de toujours faire de la place à la nouveauté. Les nouveautés devraient occuper l'avant de la boutique et vos plus vieux produits juste après. Toujours garder les lignes de vue libres.

Créer des Zones de Collections

Choisissez une zone dans votre boutique qui sera dédiée à vos essentiels. (Vitrine, Murale ou Présentoir à l'avant) Votre plus récente collection se retrouve donc à l'avant, et votre marchandise plus ancienne sera plus vers l'arrière. Une présentation de produits de gauche à droite suivra naturellement le regard de votre cliente.

Créer une Ambiance Invitante et Accueillante

Offrir un coin salon lorsque c'est possible. Les clientes passeront plus de temps dans votre boutique.



2 GROUPER VOS PRODUITS



Grouper par COULEUR

Pour attirer le regard et encourager les achats multiples, regroupez vos produits par couleur. La couleur déclenche les zones associées au plaisir de notre cerveau. Les clientes touchent et explorent plus lorsqu'elles voient des groupes de couleurs. Vous pouvez faire un bloc de couleur sur un mur, une table basse ou une barre à vêtements.

Grouper par THÈME

Grouper par thème est souvent profitable puisque cela influence le processus de décision de la cliente. Regrouper visuellement vos produits par thème suggère à la cliente des items qu'elles n'avaient pas l'intention d'acheter sinon. Utilisez des accessoires et des affiches en rapport avec votre thème.

Grouper par PRODUITS

Cela consiste à regrouper des styles et des produits semblables. Pratique lorsque vous avez beaucoup d'un groupe de produits, comme des Vallettas, des prothèses mammaires ou des soutiens-gorge posHautérateires. Ce type de groupement attire le regard sur un produit afin de faire mousser les ventes et faire bouger l'inventaire.

Grouper avec la RÈGLE DE TROIS

Le regard de vos clientes reste plus longtemps sur un présentoir ou sur un étalage qui est équilibré. Les clientes ont ainsi plus de chances de découvrir des items, et ceci peut stimuler les achats. Cette règle s'applique aux mannequins, étalages, produits, accessoires, etc. Essayez d'éviter les espaces négatifs. Un espace négatif ne créera pas l'équilibre que le regard de la cliente recherche.



3 MODIFIEZ !



Changer la mise en place d'un présentoir ou le placer dans un nouvel emplacement peut augmenter les ventes en moyenne de 25 %. Actualisez votre vitrine toutes les 3-4 semaines et deux fois par saison pour la marchandise en magasin. Primordial, surtout si vous n'avez pas de nouveautés. Cela transforme un produit existant en NOUVEAU produit dans le regard d'une cliente.

4 MAINTENIR SON ESPACE




Entretenez les vêtements — c'est le moyen le plus simple de rendre votre espace plus attrayant et primordial pour le visuel de votre espace.

- Utiliser les bons cintres
- Classer par grandeurs
- Camoufler les étiquettes

Toujours garder votre espace impeccablement propre pour maximiser l'expérience client.

ASSISTANCE EN-LIGNE AMOENA.

Notre collaboration avec vous s'étend jusque sur le web. Utilisez quotidiennement notre site internet B2B comme outil d'affaires. Vous pouvez y placer des commandes 24/7, lire nos dernières nouvelles, obtenir du matériel de commercialisation, et plus. Découvrez-en davantage au www.amoena.ca

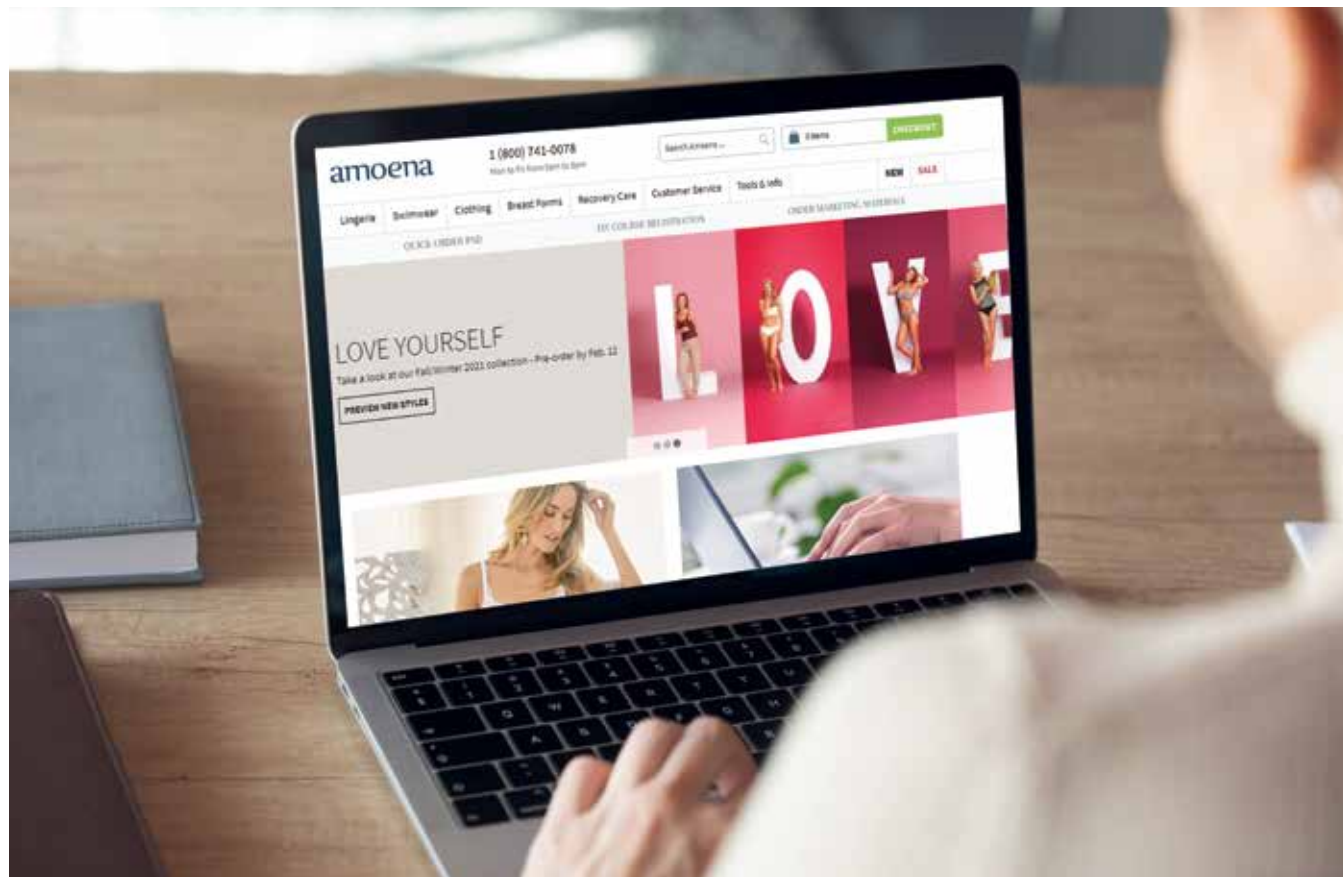

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA AMOENA

Une ressource détaillée où vous pouvez télécharger des photos de produits, obtenir du soutien publicitaire, chercher des idées de mise en marché, et plus.

www.amoenalibrary.com



MÉDIAS SOCIAUX

Jetez un coup d'œil à nos réseaux sociaux sur LinkedIn, Facebook, Instagram, et YouTube pour trouver plus d'information sur nos produits et notre compagnie. Vous pouvez également les utiliser comme source d'inspiration pour vos propres réseaux sociaux.

APERÇU DES FONCTIONS – PROTHÈSES MAMMAIRES

				Standard	Réduit (-20 %)	Léger (-25 %)	Xtra Léger (-40 %)	Ivoire	Ivoire pâle	Foncé	Légèrement foncé	Volume ajustable	Autocollant	Thermorégulateur	Ventilation	Doux côté arrière
Gamme	Produit	Style	Tailles	Poids				Couleur				Avantages				
ADAPT 	Adapt Air Xtra Light 1S ^N	328	1-14				✓		✓			✓		✓		
	Adapt Air Xtra Light 2S ^N	326	1-14				✓		✓			✓		✓		
	Adapt Air Light 1S ^N	329	1-14			✓			✓			✓		✓		
	Adapt Air Light 2S ^N	327	1-14			✓			✓			✓		✓		
	Adapt Light 3A	376	4-12 L/R			✓			✓					✓		
CONTACT 	Contact Light 2S	380C	1-14			✓			✓				✓	✓		
	Contact Light 3S	385C	0-10			✓			✓				✓	✓		
	Contact 1S	384C	1-14	✓				✓					✓	✓		
	Contact 2S	381C	1-12	✓				✓					✓	✓		
	Contact 2A	383C	0-12 L/R	✓				✓					✓	✓		
	Contact 3S	382C	0-10	✓				✓					✓	✓		
	Contact 3S TW	382T	1-10	✓						✓			✓	✓		
	Contact 3E	386C	1-14 L/R	✓				✓					✓	✓		
ENERGY 	Energy Light 2S	342S	1-14			✓			✓					✓	✓	
	Energy Light 2S TW	342T	1-14			✓					✓			✓	✓	
	Energy Light 2U	341S	1-14			✓			✓					✓	✓	
	Energy Cosmetic 2S	310	1-14		✓			✓						✓	✓	
	Energy Cosmetic 3S	311	1-12		✓			✓						✓	✓	
	Energy 1S	349S	1-12	✓				✓						✓	✓	
	Energy 2U	347S	1-14	✓				✓						✓	✓	
NATURA 	Natura Xtra Light 1S ^N	401	1-14				✓		✓					✓		
	Natura Xtra Light 2S ^N	400	1-17				✓		✓					✓		
	Natura Xtra Light 2S ^N TW	400T	1-17				✓				✓			✓		
	Natura Light 1S ^N	402	1-14			✓			✓					✓		✓
	Natura Light 1S	664	1-14			✓			✓					✓		✓
	Natura Light 2S	390	1-17			✓			✓					✓		✓
	Natura Light 2S TW	390T	3-15			✓					✓			✓		✓
	Natura Light 2A	392	0-14 L/R			✓			✓					✓		✓
	Natura Light 2U	399	1-14			✓			✓					✓		✓
	Natura Light 3S	391	0-12			✓			✓					✓		✓
	Natura Light 3A	373N	4-12 L/R			✓			✓					✓		✓
	Natura Light 3A TW	373T	4-12 L/R			✓					✓			✓		✓
	Natura Cosmetic 2S	320	1-14		✓			✓						✓		✓
	Natura Cosmetic 2S ^N	323	1-14		✓			✓						✓		✓
	Natura Cosmetic 3E	322	1-14 L/R		✓			✓						✓		✓
	Natura 1S	396	1-14	✓				✓						✓		
	Natura 2U	394	1-14	✓				✓						✓		✓
	Natura 3E	397	1-14 L/R	✓				✓						✓		
ESSENTIAL	Essential Light 1S ^N	314	1-14			✓			✓							
	Essential Light 1S ^N TW	314T	1-14			✓					✓					
	Essential Light 2S	442	1-17			✓			✓							
	Essential Light 2S TW	442T	1-17			✓					✓					
	Essential Light 2A	356	0-14 L/R			✓			✓							
	Essential Light 3E	556	1-14 L/R			✓			✓							
	Essential Light 3E TW	556T	4-14 L/R			✓					✓					
	Essential 1S	630	1-12	✓				✓								
	Essential 2A	353	0-12 L/R	✓				✓								
	Essential 2E	474	0-12	✓				✓								
	Essential 2E TW	474T	3-12	✓						✓						
	Essential 3S	363	0-12	✓				✓								

APERÇU DES FONCTIONS – COMPLÉMENTS MAMMAIRES

				Standard	Réduit (-20 %)	Léger (-25 %)	Xtra Léger (-40 %)	Ivoire	Ivoire pâle	Foncé	Légèrement foncé	Volume ajustable	Autocollant	Thermorégulateur	Ventilation	Doux côté arrière
Gamme	Produit	Style	Tailles	Poids				Couleur				Avantages				
BALANCE ADAPT AIR 	Balance Adapt Air MD	233	2-12			✓		✓				✓		✓		
	Balance Adapt Air SV	234	S-XL			✓		✓				✓		✓		
BALANCE CONTACT 	Balance Contact MD	229	2-12	✓				✓					✓	✓		
	Balance Contact VD	230	3/4-9/10	✓				✓					✓	✓		
	Balance Contact SV	286	S-XL	✓				✓					✓	✓		
BALANCE NATURA 	Balance Natura Light VD	221	3/4-11/12			✓			✓					✓		
	Balance Natura TO	227	S-XL	✓				✓						✓		
	Balance Natura TD	217	1-10	✓				✓						✓		
	Balance Natura MD	220	2-12	✓				✓						✓		
	Balance Natura VD	222	3/4-9/10	✓				✓						✓		
	Balance Natura SE	231	S-XL	✓				✓						✓		
	Balance Natura SV	285	S-XL	✓				✓						✓		
BALANCE ESSENTIAL	Balance Essential Light VD	224	3/4-11/12			✓			✓							
	Balance Essential Light VD TW	224T	5/6-11/12			✓					✓					
	Balance Essential TO	228	S-XL	✓				✓								
	Balance Essential TD	218	1-10	✓				✓								
	Balance Essential MD	223	2-12	✓				✓								
	Balance Essential MD TW	223T	4-10	✓						✓						
	Balance Essential VD	225	3/4-9/10	✓				✓								
	Balance Essential SE	232	S-XL	✓				✓								

TABLEAU DES TAILLES POUR AMOCURA – SOINS POSTOPÉRATOIRES

CURASUPPORT

Leyla ZIP-ST-LOW, Sina HE-ST-Medium, Pamela ZIP-ST-HIGH et Emilia ZIP-ST-LOW

La mesure sous le buste correspond à une couleur et un symbole qui concordent avec une taille de soutien-gorge clairement identifiée. La couleur et le symbole peuvent être trouvés sur l'étiquette de l'emballage.

Mesure Sous-Buste						
cm / po	68-77 / 27-30	78-87 / 31-34	88-97 / 35-38	98-107 / 39-42	108-117 / 43-46	118-127 / 47-56
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Bonnet Universel – Taille Unique						
Taille	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54
Symbole	○	■	△	●	□	●



CURASCAR

Belly Bandage 3-VE / Bandage ventral

Tour de taille (cT)

Mesurez la partie la plus étroite de la taille.

Taille	cm / po
	cT
S/M	63-76 cm / 24.75-30 inch
L/XL	77-94 cm / 30.5-37 inch
2XL/3XL	95-112 cm / 37.25-44 inch
Height compression belly bandage: 24 cm / 9.25 po	

Culotte 2-ZIP-BO

Tour de taille (cT)

Mesurez la partie la plus étroite de la taille.

Tour des hanches (cH)

Se tenir debout les pieds ensemble et mesurez la partie la plus large des hanches.

Taille	cm / po	
	cT	cH
XS	61-66 / 24-26	86-91 / 34-36
S	66-71 / 26-28	91-97 / 36-38
M	71-76 / 28-30	97-102 / 38-40
L	76-81 / 30-32	102-107 / 40-42
XL	81-89 / 32-35	107-114 / 42-45
2XL	89-99 / 35-39	114-124 / 45-49

Capri 2-ZIP-BO

Tour de taille (cT)

Mesurez la partie la plus étroite de la taille..

Tour des hanches (cH)

Se tenir debout les pieds ensemble et mesurez la partie la plus large des hanches.

Tour des cuisses (cF)

Mesurez la taille à la mi-cuisse.

Tour des mollets (cC)

Mesurez la zone la plus large du mollet.

Taille	cm / po			
	cT	cH	cF	cC
XS	61-66 / 24-26	86-91 / 34-36	48-51 / 18.75-20	26-29 / 10.25-11.5
S	66-71 / 26-28	91-97 / 36-38	51-54 / 20-21.25	29-32 / 11.5-12.75
M	71-76 / 28-30	97-102 / 38-40	54-57 / 21.25-22.5	32-35 / 12.75-13.75
L	76-81 / 30-32	102-107 / 40-42	57-60 / 22.5-23.75	35-38 / 13.75-15
XL	81-89 / 32-35	107-114 / 42-45	60-65 / 23.75-25	38-41 / 15-16.25
2XL	89-99 / 35-39	114-124 / 45-49	65-70 / 25.5-27.75	41-44 / 16.25-17.5

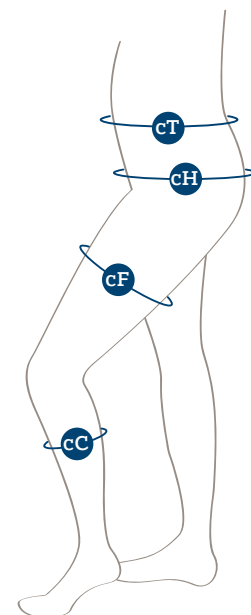


TABLEAU DES TAILLES – PROTHÈSES MAMMAIRES

Tout d'abord, mesurez le tour de poitrine et la taille de bonnet correspondante, comme indiqué à la page 128. Ensuite, trouvez la taille de bonnet et le tour de poitrine dans le tableau du haut et suivez la colonne vers le bas pour déterminer la bonne forme de sein Amoena.

Ce tableau des tailles se veut un guide pour vous lors de l'ajustement d'une prothèse mammaire. Votre expertise et votre coup d'œil sont aussi de bons outils afin de pouvoir trouver la meilleure prothèse pour elle.

Bonnet	Tour de buste																	
AA	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52						
A		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52					
B			30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52				
C				30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52			
D					30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
DD						30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
DDD							30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
G										34	36	38	40	42	44	46	48	50

Prothèses mammaires Amoena

Adapt Contact Energy Natura Essential

Taille de la prothèse mammaire

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15*	16*	17*
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

*Disponible dans certains styles Natura et Essential uniquement

Prothèses mammaires additionnelles

Priform et PurFit et Prothèse de loisir


Taille de la prothèse mammaire

		1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14		
--	--	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	--	--

Les instructions complètes pour mesurer et trouver la taille appropriée pour les compléments Balance sont disponibles à la page suivante.

TABLEAU DES TAILLES – COMPLÉMENTS MAMMAIRES BALANCE

MESURE CROISÉE DU BONNET (MCB) POUR LES COMPLÉMENTS BALANCE

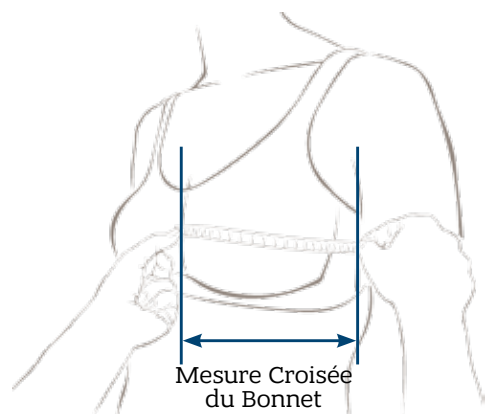

Si votre cliente a besoin d'un complément OVAL ou DELTA, utilisez la méthode de Mesure Croisée du Bonnet (MCB) pour trouver l'épaisseur requise.

La MCB est la mesure en partant du centre avant d'un soutien-gorge bien ajusté (au niveau du sternum) jusqu'au et la couture latérale.

1. Avec son soutien-gorge et ses bras baissés, mesurez le bonnet croisé du côté non opéré.
2. Ensuite, mesurez le bonnet croisé du côté opéré.
3. Soustrayez la mesure de l'étape 2 de la mesure de l'étape 1. Ce nombre final est la différence du bonnet croisé (MCB).
4. Trouvez ensuite la mesure sur le tableau ci-dessous pour savoir quelle épaisseur de complément lui proposer en premier pour l'ajustement.

TRUC : Utilisez le côté métrique de votre ruban et mesurez en centimètres (cm). Ce sera toujours la mesure la plus précise.

MESURE MCB	ESSAYER
Moins de 1 cm ou 3/8 po	Complément MINCE
1 à 2 cm ou 3/8 à 3/4 po	Complément MOYEN
Moins que ou égal à 2 cm ou 3/4 po	Complément VOLUME

Mesure Croisée du Bonnet (MCB)		Taille des compléments mammaires											
< 1 cm ou 3/8 po MINCE	OVAL			S		M		L		XL			
	DELTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1 à 2 cm ou 3/8 à 3/4 po MOYEN	DELTA		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DELTA												
> 2 cm ou 3/4 po VOLUME	DELTA			3/4		5/6		7/8		9/10		11/12	
	DELTA												

Utilisez le tableau des tailles ci-dessous pour trouver la bonne taille dans tous les styles de compléments pour commencer votre ajustement.

Trouvez la taille du bonnet et le tour de poitrine, puis suivez la colonne jusqu'à la ligne inférieure pour trouver la taille du complément.

Taille de bonnet				Tour de buste								
AA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
A	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
B	30		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
C			30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
D			30		32	34	36	38	40	42	44	46
DD					30	32	34	36	38	40	42	44
DDD					30		32	34	36	38	40	42
G									34	36	38	40
TAILLE DE COMPLÉMENT MAMMAIRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			S		M		L		XL			
			3/4		5/6		7/8		9/10		11/12	

TABLEAU DES TAILLES — LINGERIE ET MAILLOTS

Mesures basées sur une personne de 5' 5" à 5' 8"

Mesure Sous-Buste	24¾-26¼	24¾-26¼	28¾-30¼	30¾-32¼	32¾-34¼	34¾-36¼	36¾-38¼	38½-40¼	40½-42	42½-44	44½-46	46½-48
Taille de bande	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52

Mesures du torse en pouces correspondent à ces tailles de bonnets

AA	29½-30¼	31½-32¼	33½-34¼	35½-36¼	37½-38¼	39¼-40¼	41¼-42	43¼-44	45¼-46	47¼-48	49¼-50	51¼-52
A	30¼-31	32¼-33	34¼-35	36¼-37	38¼-39	40¼-41	42-43	44-45	46-47	48-48¾	50-50¾	52-52¾
B	31-32	33-33¾	35-35¾	37-37¾	39-39¾	41-41¾	43-43¾	45-45¾	47-47¾	48¾-49½	50¾-51½	52¾-53½
C	32-32¾	33¾-34½	35¾-36½	37¾-38½	39¾-40½	41¾-42½	43¾-44½	45¾-46½	47¾-48½	49½-50½	51½-52¼	53½-54¼
D	32¾-33½	34¾-35½	36¾-37½	38½-39¼	40½-41¼	42½-43¼	44½-45¼	46½-47¼	48½-49¼	50½-51¼	52¼-53	54¼-55
DD	33½-34¼	35½-36¼	37½-38¼	39½-40¼	41¼-42	43¼-44	45¼-46	47¼-48	49¼-50	51¼-52	53-54	55-56
DDD	34¼-35	36¼-37	38¼-39	40¼-41	42-43	44-45	46-47	48-48¾	50-50¾	52-52¾	54-54¾	56-56¾
G	35-35¾	37-37¾	39-39¾	41-41¾	43-43¾	45-45¾	47-47¾	48¾-49½	50¾-51½	52¾-53½	54¾-55½	56¾-57½
Culotte, Maillots (Une Pièce et Deux Pièces)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28
Mesures de la taille	22¾-24½	25-26¾	26¾-28¼	28¾-30	30¾-32¼	32¾-34¼	34¾-36¼	36¾-38¼	38½-40¼	40½-42	42½-44	44½-46
Mesure des hanches	34¾-36¼	36¼-37¾	37¾-39¼	39¼-41	41-42½	42½-44	44-45¾	45¾-47¼	47¼-48¾	48¾-50½	50½-52	52-53½
Taille	XS	S		M		L		XL		2XL		3XL

Tailles selon les tailles de bonnets correspondantes

A			S	S	M	M	L	L	XL	XL	2XL	2XL
B	XS	S	S	M	M	L	L	XL	XL	2XL	2XL	3XL
C	XS	S	S	M	M	L	L	XL	XL	2XL	2XL	3XL
D	S	S	M	M	L	L	XL	XL	2XL	2XL	3XL	3XL

GUIDE POUR OBTENIR UNE TAILLE DE SOUTIEN-GORGE



MESURER LA **TAILLE DE BANDE** pour bilatérale et unilatérale

1. Alors qu'elle porte un soutien-gorge, mesurer autour de son corps, en partant du dos, au niveau de la bretelle, parallèle au sol, et faire passer le ruban à mesurer en avant, vers le haut de la poitrine (juste sous le bras)
2. Le ruban à mesurer doit être assez ajusté
3. S'assurer de partir le ruban à **0**
4. Cette mesure est le tour de bande – inscrire cette mesure
5. Si la mesure est impaire, arrondir vers le haut au prochain numéro pair :
Ex : mesure 37 po de tour – arrondir à 38 po
6. Il est recommandé de fixer la bande aux agrafes à la position la plus large. Ainsi, avec le temps et l'étirement, il peut être resserré en passant aux agrafes suivantes pour une durée de vie plus longue



MESURER LA **TAILLE DE BONNET** pour les femmes qui ont 2 seins

1. Alors qu'elle porte un soutien-gorge, mesurer en partant du dos, au niveau du milieu du sein, et faire passer le ruban à mesurer en avant en le positionnant au niveau du mamelon, en s'assurant que tout autour, le ruban est à ce niveau
2. S'assurer de partir le ruban à **0**
3. Mesurer un peu plus lâche de façon à ne pas comprimer les seins
4. Inscrire cette mesure



MESURER LA **TAILLE DE BONNET** pour les femmes qui ont un sein (mastectomie)

1. Alors qu'elle porte un soutien-gorge, mesurer en partant du centre du thorax, au niveau du mamelon, mesurer le sein en passant par-dessus, jusqu'au milieu du dos, vers l'attache du soutien-gorge
2. S'assurer de partir le ruban à **0**
3. Mesurer un peu plus lâche de façon à ne pas comprimer le sein
4. Inscrire cette mesure – multiplier par 2 ensuite
Ex : Si un côté, au niveau du mamelon mesure 20 po, Si on le double, nous obtenons 40 po

Mesure	Taille du Bonnet	Mesure	Taille du Bonnet
Moins de 1 po	AA	5 po	DD
1 po	A	6 po	DDD
2 po	B	7 po	G
3 po	C	8 po	H
4 po	D	9 po	I

POUR CONFIRMER LA **TAILLE DU BONNET**

1. Si la bande mesure 38 po et le bonnet mesure 40 po, la différence est alors de 2 po
2. Elle porterait donc un Bonnet B, bande 38 = 38B
3. Chaque pouce est une taille de bonnet

NOTEZ : cette technique n'est qu'un guide

Il sert de point de départ pour vous aider à trouver la bonne taille de soutien-gorge pour votre cliente. La majorité du support proviendra de la bande du soutien-gorge. Si la bande monte trop haut dans le dos, ou si en levant ses bras, le soutien-gorge glisse vers le haut, la bande est trop grande. Si vous tirez légèrement sur la bande du soutien-gorge au dos, il devrait y avoir un jeu de 1 po maximum. Plus que ça, la bande est trop grande.

80 % des femmes portent la mauvaise taille de soutien-gorge parce que :

- Elles aiment un soutien-gorge ample dès le début; loin d'être idéal si une femme a besoin d'une prothèse mammaire :
 - La prothèse bougera et elle sentira son poids et le confort s'en trouvera diminué
- Elles portent leurs soutiens-gorge bien au-delà de leur durée de vie. Nous avons tendance à garder nos meilleurs soutiens-gorge (nos préférés) pendant des années, ce qui cause évidemment usure et relâchement
- Elles ne lavent pas assez souvent leur soutien-gorge :
 - Les huiles naturelles du corps compromettent l'usure de l'élastique et du tissu
- Elles jettent le soutien-gorge dans la laveuse et dans la sècheuse sans utiliser une pochette pour la lingerie :
 - La laveuse peut étirer le tissu pendant le lavage; il peut s'accrocher à d'autres vêtements et endommager l'élastique, les crochets, etc.
 - La sècheuse peut endommager l'élastique et / ou rétrécir le tissu en plus de raccourcir la durée de vie du soutien-gorge

Un soutien-gorge bien ajusté devrait vous faire sentir comme si vous n'en portiez pas. Support et confort sont directement reliés à un bon ajustement.

AMOCURA / INDEX DE SOINS DE CONVALESCENCE – CURASUPPORT

					Besoins médicaux / Caractéristiques													
Nom du produit	Photo	Gamme de produit	Basic/ Advanced/ Premium	Couleur/ Style	Facilité d'utilisation pour ceux ayant mouvement limité	Fixation et soutien	Œdème post-opératoire	Fermeture à l'avant	Bretelles larges pour soulager les épaules	Technologie de tricot sans coutures	Préparé pour être utilisé directement en clinique	Technologie de collage/coutures plates	Aide à la guérison des cicatrices	Sans pochettes	Pochettes bilatérales	Haute teneur en coton pour la peau sensible	Taille	Page
Bande de Compression		CuraSupport Compression	Premium	 0776N  0789N		✓		✓					✓				30-54	20
Sac de Drainage		CuraSupport Comfort	Basic	 2107												✓	Taille unique	24
Emilia ZIP-ST-LOW		CuraSupport Comfort	Basic	 45013  45012  45014	✓	✓		✓	✓	✓					✓		32/34; 36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54 Bonnets : universel	22
Ester Bonnets souples		CuraSupport Comfort	Basic	 42576  42577	✓	✓		✓							✓		34-44 A, B, C, D; 36-42 DD	23
Frances Bonnets souples		CuraSupport Comfort	Basic	 2128  2128	✓			✓	✓						✓	✓	XS, S, M, L, XL, 2XL Bonnets : A/B; C/D; DD/DDD	23
Hannah Bonnets souples		CuraSupport Comfort	Basic	 2160	✓			✓							✓	✓	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Bonnets : A/B, C/D	22
Leyla ZIP-ST-LOW		CuraSupport Compression	Advanced	 44605  44604  44606	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		32/34; 36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54 Bonnets : universel	18
Michelle Camisole		CuraSupport Comfort	Basic	 2105  2105  2105	✓				✓						✓	✓	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	23
Hannah Camisole		CuraSupport Comfort	Basic	 2860	✓										✓	✓	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Bonnets : A/B, C/D	22
Pamela ZIP-ST-HIGH		CuraSupport Compression	Premium	 45010  45009  45011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		32/34; 36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54 Bonnets : universel	19
Sarah HE-MEDIUM		CuraSupport Compression	Premium	 0778  0779	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	34-46 A, B, C, D, DD	20
Sina HE-ST-MEDIUM		CuraSupport Compression	Advanced	 45007  45006  45008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		32/34; 36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54 Bonnets : universel	19
Theraport Bonnets souples		CuraSupport Comfort	Basic	 2161	✓			✓	✓	✓					✓	✓	XS, S, M, L, XL, 2XL	24

AMOCURA / INDEX DE SOINS DE CONVALESCENCE – CURASCAR

					Besoins médicaux / Caractéristiques													
Nom du produit	Photo	Gamme de produit	Basic/ Advanced/ Premium	Couleur/ Style	Facilité d'utilisation pour ceux ayant mouvement limité	Fixation et soutien	Œdème post-opératoire	Fermeture à l'avant	Bretelles larges pour soulager les épaules	Technologie de tricot sans coutures	Préparé pour être utilisé directement en clinique	Technologie de collage/coutures plates	Aide à la guérison des cicatrices	Sans pochettes	Pochettes bilatérales	Haute teneur en coton pour la peau sensible	Taille	Page
Belly Bandage 3-VE / Ceinture ventrale		CuraScar Garments	Advanced	45004 45005	✓	✓	✓	✓				✓	✓				S/M, L/XL, 2XL/3XL	28
Capri 2-ZIP-BO		CuraScar Garments	Advanced	45002 45003		✓	✓	✓				✓	✓				XS, S, M, L, XL, 2XL	27
Culotte 2-ZIP BO		CuraScar Garments	Advanced	45000 45001		✓	✓	✓				✓	✓				XS, S, M, L, XL, 2XL	27
Anchors / Ancres		CuraScar Silicones	Advanced	013									✓				230 x 145 mm 9 x 5.7 po	31
Mammilla Circles / Curonnes		CuraScar Silicones	Advanced	012									✓				Ø extérieur 75 mm Ø intérieur 20 mm Ø extérieur 3 po Ø iintérieur 0.8 po	31
Squares / Bandes étroites		CuraScar Silicones	Advanced	011									✓				260 x 100 mm 10.25 x 4 po	30
Strips / Bandes larges		CuraScar Silicones	Advanced	010									✓				260 x 35 mm 10.25 x 1.4 po	30

INDEX TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN / LINGERIE

Nom du produit	Photo	Gamme de produit	Basic/ Advanced/ Premium	Couleur/Style	Besoins médicaux / Caractéristiques								Taille	Page
					Bonnets rembourrés pour camoufler les cicatrices inégales	Encolure haute pour camoufler cicatrices ou marques de radiothérapie	Bretelles larges pour soulager les épaules	Tissu respirant pour une circulation d'air optimale	Pochettes en tissu respirant	Haute teneur en coton pour la peau sensible	Tissu extensible pour fluctuations de volume	Fermeture à l'avant		
Amanda Bonnets souples		Dentelle	Premium	 44536					✓				34-48 A, B, C, D, DD, DDD; 36-46 G	70
Amanda Bustier bonnets souples		Dentelle	Premium	 44537					✓				34-42 A, B, C, D	71
Amanda À armature		Dentelle	Premium	 44538					✓				34-48 A, B, C, D, DD, DDD; 36-46 G	71
Amanda Culotte		Dentelle	Premium	 44539									6-24	70
Amber Bonnets souples rembourrés		Effet Couvrant	Premium	 44259	✓	✓			✓				32-42 AA, A, B, C, D, DD	92
Amber Haut		Effet Couvrant	Basic	 44268  44261		✓							34-42 A/B, C/D, DD/ DDD	92 98
Amy Bonnets souples		Sans Couture	Basic	 44310  44311		✓	✓	✓	✓		✓		S, M, L	82
Aurelie Bonnets souples		Dentelle	Premium	 44153					✓				32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD	72
Aurelie À armature		Dentelle	Premium	 44154					✓				32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD	72
Aurelie Bonnets souples rembourrés		Dentelle	Premium	 44155	✓				✓				32-44 AA, A, B, C, D, DD	73
Aurelie Culotte		Dentelle	Premium	 44156									6-20	72
Ava Bonnets souples		Classique	Basic	  2115		✓		✓	✓				34-52 B, C; 36-46 D, DD	78
Barbara À armature rembourrés		Sans Couture	Advanced	 0457	✓				✓				32-40 A, B, C; 32-38 D	82
Celine Bonnets souples		Dentelle	Premium	 44509		✓			✓				34-42 A, B, C, D	75
Celine Culotte		Dentelle	Premium	 44512									6-16	75

INDEX TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN / LINGERIE

Nom du produit	Photo	Gamme de produit	Basic/ Advanced/ Premium	Couleur/Style	Besoins médicaux / Caractéristiques								Taille	Page
					Bonnets rembourrés pour camoufler les cicatrices inégales	Encolure haute pour camoufler cicatrices ou marques de radiothérapie	Bretelles larges pour soulager les épaules	Tissu respirant pour une circulation d'air optimale	Pochettes en tissu respirant	Haute teneur en coton pour la peau sensible	Tissu extensible pour fluctuations de volume	Fermeture à l'avant		
Clara Bonnets souples fermeture avant		Sans Couture	Basic	 44743			✓	✓			✓	✓	S, M, L, XL	83
Dana Bonnets souples		Effet Couvrant	Advanced	 0862 0750		✓	✓		✓				32-40 AA; 32-44 A, B, C; 34-42 D, DD	92
Ester Cami sport		Active	Premium	 42576 42577		✓	✓	✓	✓			✓	34-44 A, B, C, D; 36-42 DD	95
Fleur Bonnets souples		Classique	Advanced	 44672 44671 44695			✓	✓	✓	✓		✓	XS, S, M, L, XL, 2XL Cups: A/B, C/D, DD/ DDD	79
Frances Bonnets souples		Classique	Basic	 2128			✓	✓	✓	✓		✓	XS, S, M, L, XL, 2XL Cups: A/B; C/D; DD/ DDD	78
Isabel Bonnets souples		Effet Couvrant	Basic	 2118		✓			✓				36-38 AA; 34-42 A; 34-44 B, C; 34-42 D, DD	93
Isadora Bonnets souples		Classique	Advanced	 0947 0948 44114		✓	✓		✓				34-50 A; 32-48 B, C, D; 32-44 DD, DDD, G	79
Jasmin Bonnets souples		Classique	Premium	 0900N 44233			✓		✓	✓			32-40 AA, A, B; 34-40 C	79
Karolina Bonnets souples		Dentelle	Premium	 44505					✓				32-42 A, B, C, D, DD	76
Karolina Bonnets souples rembourrés		Dentelle	Premium	 44506	✓				✓				32-42 AA, A, B, C, D, DD	77
Karolina À armature		Dentelle	Premium	 44507					✓				32-42 A, B, C, D, DD	77
Karolina Culotte		Dentelle	Premium	 44508									6-16	77
Kitty Bonnets souples		Sans Couture	Basic	 44607 44674	✓	✓	✓			✓	✓		S, M, L, XL, 2XL	85

INDEX TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN / LINGERIE

Nom du produit	Photo	Gamme de produit	Basic/ Advanced/ Premium	Couleur/Style	Besoins médicaux / Caractéristiques								Taille	Page
					Bonnets rembourrés pour camoufler les cicatrices inégales	Encolure haute pour camoufler cicatrices ou marques de radiothérapie	Bretelles larges pour soulager les épaules	Tissu respirant pour une circulation d'air optimale	Pochettes en tissu respirant	Haute teneur en coton pour la peau sensible	Tissu extensible pour fluctuations de volume	Fermeture à l'avant		
Kitty Haut		Sans Couture	Advanced	44736		✓				✓	✓		S, M, L, XL,2XL	84
Lara Bonnets souples rembourrés		Sans Couture	Advanced	0752 0674 0675	✓				✓				34-40 AA; 32-44 A, B, C, D, DD	85
Lara Cotton Bonnets souples rembourrés		Sans Couture	Advanced	44673	✓			✓	✓	✓			34-40 AA; 32-44 A, B, C, D, DD	85
Lara Satin Bonnets souples rembourrés		Sans Couture	Advanced	44212 44214	✓				✓				32-44 AA, A, B, C, D, DD	86
Lee Bonnets souples		Sans Couture	Advanced	44540			✓	✓	✓	✓			34-42 A, B, C, D; 34-40 DD	87
Magdalena Bonnets souples		Sans Couture	Advanced	0463					✓				34-48 B, C, D, DD, DDD	86
Magdalena Bonnets souples rembourrés		Sans Couture	Premium	44533	✓				✓				32-42 AA, A, B, C, D	86
Mara Bonnets souples rembourrés		Sans Couture	Basic	44534 44023 1150 44416	✓				✓				32-44 AA, A, B, C, D, DD	89
Mara Bonnets souples rembourrés fermeture avant		Sans Couture	Advanced	44741 44742	✓				✓			✓	32-44 AA, A, B, C, D, DD	88
Marlena Bonnets souples		Sans Couture	Premium	2167N			✓		✓				34-42 A, B, C; 32-42 D, DD	89
Mira Bonnets souples		Sans Couture	Premium	44610			✓		✓				32-42 AA, A, B; 34-40 C, D; 34-38 DD	90
Mona Bonnets souples		Sans Couture	Premium	0606 0614 0568 0591			✓		✓				32-42 AA, A, B; 34-40 C, D; 34-38 DD	90

INDEX TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN / LINGERIE

Nom du produit	Photo	Gamme de produit	Basic/ Advanced/ Premium	Couleur/Style	Besoins médicaux / Caractéristiques								Taille	Page
					Bonnets rembourrés pour camoufler les cicatrices inégales	Encolure haute pour camoufler cicatrices ou marques de radiothérapie	Bretelles larges pour soulager les épaules	Tissu respirant pour une circulation d'air optimale	Pochettes en tissu respirant	Haute teneur en coton pour la peau sensible	Tissu extensible pour fluctuations de volume	Fermeture à l'avant		
Nancy Bonnets souples		Classique	Basic	44480 44024 1151 44417					✓				32-44 B; 34-52 C, D; 34-50 DD, DDD, G	81
Nancy Bonnets souples fermeture avant		Classique	Advanced	44739 44740					✓			✓	32-44 B; 34-52 C, D; 34-50 DD, DDD, G	80
Performance Cami sport		Active	Advanced	0654 0658		✓	✓		✓		✓		32-42 A, B, C, D, DD	95
Power Cami sport		Active	Advanced	1152		✓	✓		✓				32-42 AA, A, B, C, D, DD	95
Rita Bonnets souples		Classique	Basic	2004					✓				34-44 A, B, C; 34-46 D; 36-46 DD	81
Tanya Bonnets souples		Sans Couture	Basic	44678 44679		✓	✓	✓	✓	✓			32-42 A, B, C, D	91
Valletta Long		Wellness	Advanced	70230 44075 44076 70229	✓	✓		✓					6-24	97
Valletta Tall		Wellness	Advanced	71512 71426	✓	✓		✓					6-24	97
Zipper Cami sport		Active	Advanced	44070		✓	✓		✓			✓	S, M, L, XL	94

INDEX TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN / MAILLOTS


Nom du produit	Photo	Gamme de produit	Basic/ Advanced/ Premium	Couleur/Style	Besoins médicaux / Caractéristiques								Taille	Page
					Bonnets rembourrés pour camoufler les cicatrices inégales	Encolure haute pour camoufler cicatrices ou marques de radiothérapie	Bretelles larges pour soulager les épaules	Tissu respirant pour une circulation d'air optimale	Pochettes en tissu respirant	Haute teneur en coton pour la peau sensible	Tissu extensible pour fluctuations de volume	Fermeture à l'avant		
Alabama Mi-corsage encolure haute		Style	Advanced	 71326	✓	✓	✓						8-24 B,C; 8-22 D	102
Alabama Mi-corsage		Style	Advanced	 71514	✓	✓							8-24 B, C; 10-24 D, DD	102
Alabama Tankini		Style	Advanced	 71513	✓								8-20 B, C	101
Alabama Culotte taille haut		Style	Advanced	 71322									8-20	101
Ayon Sarong		Classique	Premium	 71113	✓	✓	✓						10-26 B, C	103
Ayon Haut Bonnets souples rembourrés		Classique	Basic	 71117	✓								6-16 B, C, D	103
Ayon Culotte taille haute		Classique	Basic	 71118									6-16	103
Florida Fort bodice		Classique	Advanced	 71343	✓	✓	✓						8-26 B, C, 10-24 D, DD	104
Rhodes Une Pièce		Active	Advanced	 70842	✓	✓	✓						6-22 B, C	105
Rome Une Pièce		Style	Advanced	 71379	✓								6-16 B, 8-16 C	101
Toronto Encolure haute		Active	Advanced	 71390	✓	✓	✓						6-18 B, 8-18 C	105

INDEX TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN / STYLES BIENTÔT DISCONTINUÉS

Nom du produit	Photo	Gamme de produit	Basic/Advanced/Premium	Couleur/Style	Besoins médicaux / Caractéristiques								Taille	Page
					Bonnets rembourrés pour camoufler les cicatrices inégales	Encolure haute pour camoufler cicatrices ou marques de radiothérapie	Bretelles larges pour soulager les épaules	Tissu respirant pour une circulation d'air optimale	Pochettes en tissu respirant	Haute teneur en coton pour la peau sensible	Tissu extensible pour fluctuations de volume	Fermeture à l'avant		
Annabell Bonnets souples		Classique	Advanced	  2126			✓	✓	✓				34-38 AA; 34-40 A, B, C, D	108
Annette À armature		Classique	Premium	 44028  1087				✓	✓		✓		34-48 B, C, D; 34-46 DD; 34-44 DDD; 34-42G	108
Annette Culotte		Classique	Premium	 44029									8-20	108
Aurelie Bonnets souples		Dentelle	Premium	 44277				✓	✓				32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD	109
Aurelie À armature		Dentelle	Premium	 44278				✓	✓				32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD	109
Aurelie Bonnets souples rembourrés		Dentelle	Premium	 44279	✓			✓	✓				32-44 AA, A, B, C, D, DD	109
Aurelie Culotte		Dentelle	Premium	 44280									6-20	110
Becky Bonnets souples		Sans Couture	Basic	 44677			✓	✓	✓		✓		S, M, L, XL, 2XL	110
Bella Bonnets souples		Classique	Basic	 2114		✓		✓	✓				32-42 A; 34-44 B; 34-46 C; 36-46 D	110
Bianca Bonnets souples rembourrés		Sans Couture	Premium	 44216	✓		✓	✓					32-42 AA, A, B, C, D	111
Dianna Bonnets souples sans couture		Sans Couture	Basic	 44112  44107  44116				✓	✓				32-42 AA, A, B, C, D	111
Ella Bonnets souples		Classique	Basic	  2133				✓	✓		✓		34-42 B; 34-46 C, D, DD; 36-42 DDD	111
Ellen Bonnets souples		Classique	Premium	 44419  44245				✓	✓			✓	32-42 A, B, C, D, DD	112

INDEX TEXTILES POUR LES SOINS DU SEIN / STYLES BIENTÔT DISCONTINUÉS

Nom du produit	Photo	Gamme de produit	Basic/ Advanced/ Premium	Couleur/Style	Besoins médicaux / Caractéristiques								Taille	Page
					Bonnets rembourrés pour camoufler les cicatrices inégales	Encolure haute pour camoufler cicatrices ou marques de radiothérapie	Bretelles larges pour soulager les épaules	Tissu respirant pour une circulation d'air optimale	Pochettes en tissu respirant	Haute teneur en coton pour la peau sensible	Tissu extensible pour fluctuations de volume	Fermeture à l'avant		
Frances Bonnets souples		Classique	Basic	 2128 Rose			✓	✓	✓	✓		✓	XS, S, M, L, XL, 2XL Cups: A/B; C/D; DD/DDD	112
Kelly Bonnets souples		Classique	Basic	 2153			✓	✓	✓				34-46 B, C, D, DD; 36-44 DDD	112
Marlena Bonnets souples		Sans Couture	Basic	 2167N			✓		✓		✓		34-42 A, B, C; 32-42 D, DD	113
Rita Bonnets souples		Classique	Basic	 44234			✓		✓				34-44 A, B, C; 34-46 D; 36-46 DD	113
Performance Cami sport		Active	Advanced	 0794		✓	✓		✓		✓		32-42 A, B, C, D, DD	113
Ayon Une Pièce		Classique	Premium	 71112	✓	✓	✓						8-26 B, C, D	114
Ayon Tankini		Style	Advanced	 71116	✓								8-20 B, C	114
Cocos Une Pièce		Style	Advanced	 71122	✓								6-16 B, C, D	115
Cocos Haut		Style	Advanced	 71123	✓								6-16 B, C, D	115
Cocos Culotte taille moyenne		Style	Advanced	 71123									6-20	115
Key West Une Pièce		Classique	Advanced	 71299  71298	✓	✓	✓						6-22 B, 8-20 C, D	116
Rhodes Une Pièce		Classique	Advanced	 70654	✓	✓	✓						6-22 B, C	116

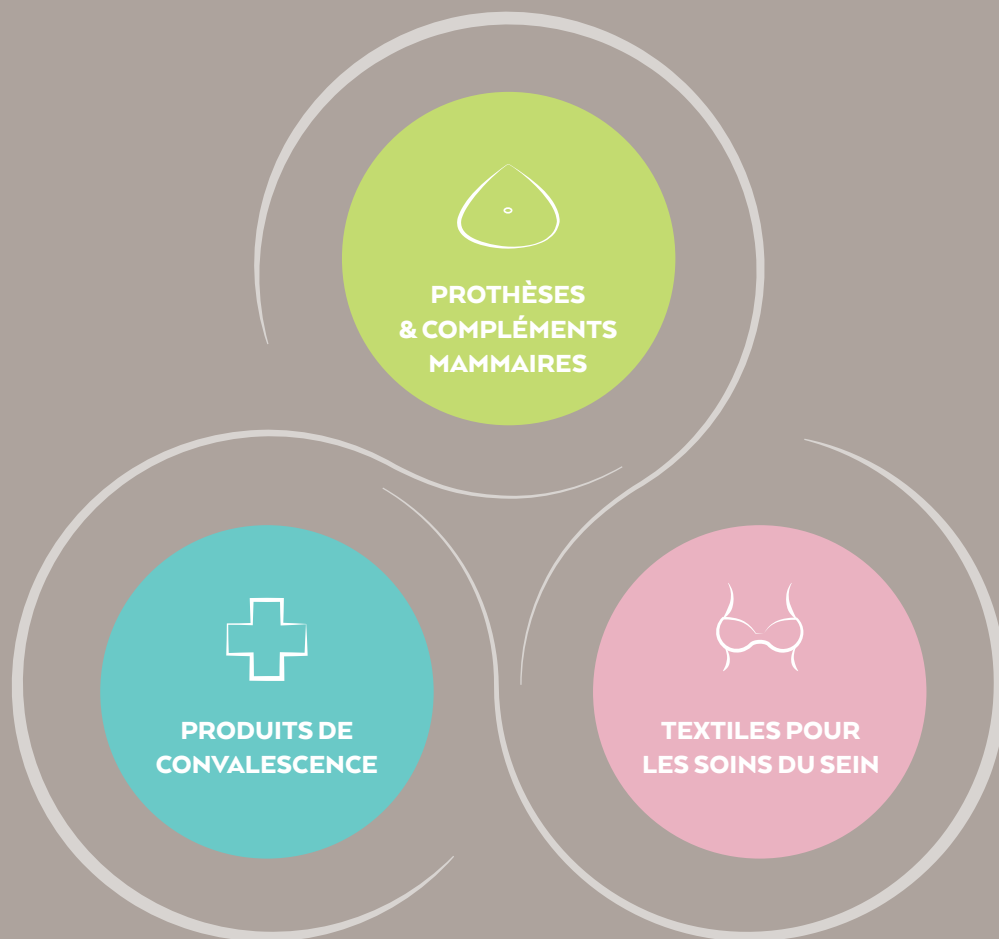

amoena

Soutenir la confiance

Amoena Canada Inc.
6790 Century Ave., Suite 101
Mississauga ON L5N 2V8
amoena.ca

Amoena est une compagnie certifiée ISO 9001/13485/14001.

Les prothèses mammaires, les vêtements postopératoires,
les soutiens-gorge à pochettes et les maillots Amoena
portent la marque CE.



Amoena est une marque déposée de Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH.
©2021. Tous droits réservés Amoena Canada Inc.